



ACCUNIQ (아큐닉)

BP650

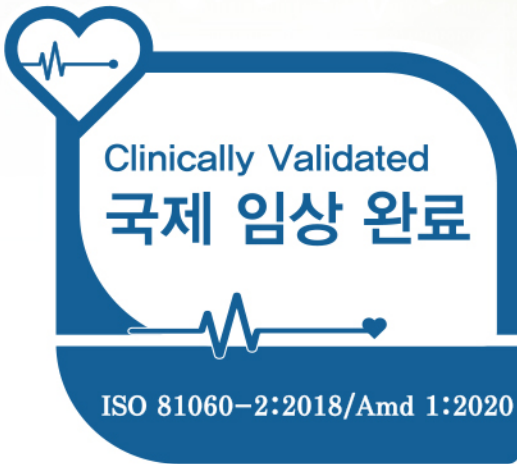

Clinically Validated
국제 임상 완료

ISO 81060-2:2018/Amd 1:2020



selvas 
Healthcare

BP650은 대한고혈압학회 '2022년 고혈압 진료 지침'에
혈압 분류 (BP Classification) 기준을 따라 혈압판독결과를
화면에 표시하는 병원용 자동전자혈압계입니다.



혈압	주의혈압	고혈압전단계	고혈압1기	고혈압2기	수축기단독고혈압
최고혈압	120~129	130~139	140~159	160 이상	140 이상
최저혈압	80 미만	80~89	또는 90~99	또는 100 이상	그리고 최저혈압 90 미만

본 제품으로 측정된 혈압 및 기타 결과치를 가지고 의사의 처방 없이 측정자의 판단하에 약이나 치료를 하지 마시고, 반드시 의사와 상의 하십시오.


측정 전에는 휴식을 취한 후 안정된 상태에서 측정하십시오.
서서 측정하거나, 움직이거나, 다리를 곧 자세로 측정하지 마십시오.

주의 사항
* 주의를 환기하는 것이 중요합니다. * 불충분한 공기 펄스도.
* 측정 중 움직이거나 말하지 마세요. * 동맥 질환 시, 긴급정지 버튼을 누르세요.
* 기타 사항은 사용지침서를 꼭 읽어 보시기 바랍니다.



국제 임상으로 입증된 측정 정확도

ACCUNIQ의 자동전자혈압계(시험 모델명: BP500)는
국제표준화기구(International Standard Organization)의
'ISO 81060-2:2018/Amd 1:202' 인증을 통과하였습니다.
정확도, 재현성 등 국제적인 검증 요구 사항을 모두 충족,
임상 목적으로 사용 가능한 자동전자혈압계입니다.

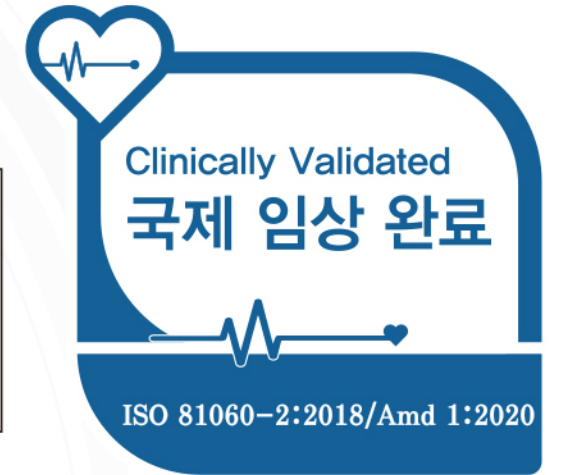

ACCUNIQ BP650은 임상 시험이 이루어진 BP500과
동등성 검증을 통해 임상적 성능이 동등하다는 검증을
완료하였습니다.



대한고혈압학회 '2022년 고혈압 진료 지침'에 따른 혈압 분류

정상혈압
최고혈압
120 미만
그리고
최저혈압
80 미만

주의혈압
최고혈압
120~129
그리고
최저혈압
80 미만

고혈압전단계
최고혈압
130~139
또는
최저혈압
80~89

고혈압1기
최고혈압
140~159
또는
최저혈압
90~99

고혈압2기
최고혈압
160 이상
또는
최저혈압
100 이상

수축기단독고혈압
최고혈압
140 이상
그리고
최저혈압
90 미만



ACCUNIQ BP650 전용 연동 전용앱

BP Monitor

BP Monitor는 병원용 자동전자혈압계 ACCUNIQ BP650과 연동하여 태블릿으로 태블릿에서 혈압 측정 가이드, 혈압측정 결과 안내, 카카오톡 전송, 아이디카드 인식, 병원시스템 연동, 혈압계 설정 등의 기능을 제공하는 전용 앱입니다. (Galaxy Tab A8권장, iPad 미지원)

※ 태블릿과 전용 태블릿 거치대는 ACCUNIQ BP650과 별도로 판매됩니다.

※ BP Monitor 앱은 Android 전용으로 Google Play Store에서 다운로드 하실 수 있습니다.

※ BP Monitor 앱의 사양은 제조사 사정에 의해 별도 통지 없이 변경 될 수 있습니다.


+ 다양한 출력지



• 심플모드A



• 심플모드B

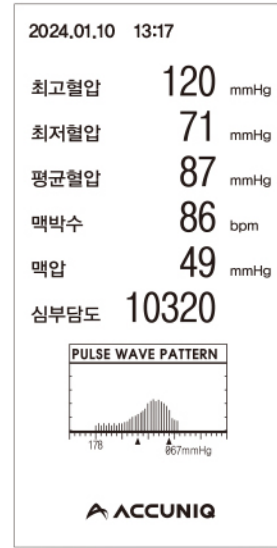

• 일반모드

+ 사용자의 요구에 맞춘 다양한 옵션



써얼프린터



태블릿



전용의자



전용카트



아큐닉 체성분분석기 연동



혈압 측정 시 안내 제공
보다 바른 자세로 측정할 수 있도록
측정 전 주의 사항을 안내합니다.


ACCUNIQ BP650 제품사양

모델명	ACCUNIQ BP650
측정방법	오실로메트릭
표시방법	Custom Mono LCD디스플레이
측정범위	압력 0 ~ 300mmHg, 맥박 30 ~ 240bpm
정밀도	압력 ±2mmHg, 맥박 ±1.5%
커프형식	이중커프방식
최소누금단위	1mmHg
가압방법	완전 자동가압
배기방법	마이크로 컨트롤에 의한 전자배기방식
전원	압력 AC 100 ~ 240V, 50/60Hz / 출력: DC 12V, 5A adapter
작동범위	온도 10 ~ 40°C, 습도 15 ~ 85% (비응축)
보관범위	온도 -10 ~ 60°C, 습도 95% (비응축)
크기	450(W) × 502.4 (D) × 278.7(H)mm (±10mm)
장비중량	약 4.8 kg
프린터	써멀프린터
결과항목	최고혈압, 최저혈압, 평균혈압, 맥박, 맥파패턴, 심부담도
전용앱	BP Monitor (안드로이드앱, USB C로 혈압계 연결) 태블릿 및 태블릿 거치대 별도 구입

※ 외관과 사양은 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품은 의료진단기기입니다. '사용 시 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

※ 가용 횟수가 많거나, 사용 횟수가 많지 않더라도 구입 후 3년이 지난 제품은 2년에 한 번씩 캘리브레이션 받기를 권장합니다.

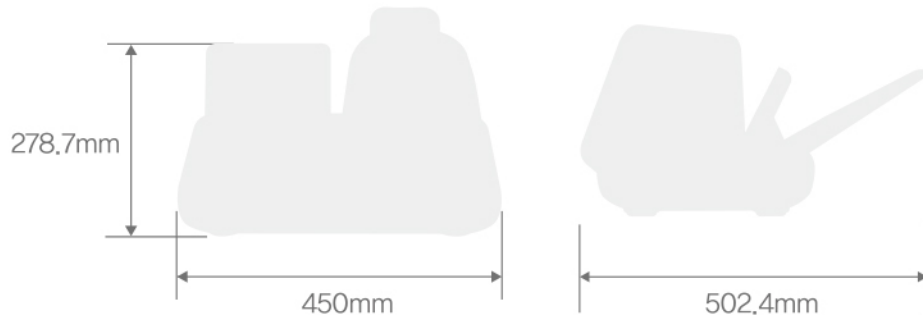

셀바스헬스케어가 획득한 국제인증 마크, 특허 및 수상내역



SELVAS
Healthcare

본사 대전광역시 유성구 신성로 155 | TEL 042-879-3000 | FAX 042-864-4462

서울지점 서울시 금천구 가산디지털1로 19 대륭테크노타운 18차 20층 | TEL 02-587-4056 | FAX 02-588-1937

Copyright © SELVAS Healthcare, Inc. All Rights Reserved | 2024.02.21. REV A.0