

# ACCUNIQ

## Dashboard

---

### 사용설명서

# 목차

목차.....	3	<b>회원 관리</b> .....	<b>25</b>
소개.....	4	회원 정보.....	26
주요기능.....	4	체성분 정보.....	27
일러두기.....	5	체성분 추이.....	28
		체성분 결과 비교.....	29
<b>시작하기</b> .....	<b>7</b>	<b>센터 정보</b> .....	<b>30</b>
체성분 측정기에서 통신 설정하기.....	7	센터 정보 수정.....	31
설정 진입.....	7	센터 매니저 변경.....	32
블루투스로 연동하기.....	7	센터 이관하기.....	33
블루투스로 이름 변경하기.....	8	<b>장비관리</b> .....	<b>34</b>
체성분 측정기 장비 표준시간대		장비 상세 정보.....	35
설정하기.....	11	장비 사용 정보.....	35
다운로드.....	12	<b>공지사항 관리</b> .....	<b>36</b>
Android 또는 iOS 태블릿에서		공지사항 상세.....	37
다운로드하여 사용하기.....	12	공지사항 등록.....	37
Web에서 접속하여 사용하기.....	12	<b>내 정보 관리</b> .....	<b>38</b>
회원가입.....	13	공지사항 등록.....	39
입력 항목.....	14	언어설정.....	41
로그인.....	15	<b>기타</b> .....	<b>42</b>
센터 등록.....	15	아큐닉 공지사항 확인.....	42
장비 등록.....	16	아이디 찾기, 비밀번호 찾기.....	42
트레이너 등록.....	17	<b>자주 묻는 질문</b> .....	<b>43</b>
회원 등록.....	18		
<b>ACCUNIQ Connect ID로 측정하기</b> .....	<b>19</b>		
ACCUNIQ Connect 앱 설치.....	19		
ACCUNIQ Connect로 정보 불러오기.....	20		
<b>ACCUNIQ Dashboard로 측정하기</b> .....	<b>22</b>		
<b>트레이너 관리</b> .....	<b>23</b>		
트레이너 정보.....	24		

# 소개

ACCUNIQ Dashboard는 당사의 체지방측정기 연동 관리자용 Web 애플리케이션입니다. 피트니스 센터, 병원 등에서 측정한 체성분 결과 데이터를 장비 관리자가 확인 및 관리 할 수 있도록 클라우드 기반의 데이터관리 솔루션을 제공합니다.

## 주요 기능


- 1) 관리자용 ACCUNIQ Dashboard와 개인 회원용 ACCUNIQ Connect이 연동됩니다.
  - 센터 개인 회원을 위한 별도 스마트폰용 애플리케이션인 ACCUNIQ Connect를 지원합니다.
  - ACCUNIQ Connect에 가입된 센터 회원의 아이디를 ACCUNIQ Dashboard의 회원 관리에서 소속 회원으로 등록할 수 있습니다.
  - ACCUNIQ Dashboard에서 공지사항을 등록하면, ACCUNIQ Connect 앱에서 센터 회원이 확인할 수 있습니다.
- 2) 체성분 측정 결과를 ACCUNIQ Dashboard로 실시간으로 전송합니다.
  - 아큐닉 체지방 측정기를 인터넷 연결하면 클라우드 서버에 정보가 저장되며 ACCUNIQ Dashboard로 측정 결과가 전송됩니다.
- 3) 체성분 측정 데이터가 ACCUNIQ Dashboard에 결과지 형태로 저장됩니다.
  - 결과지를 출력하여 보관할 필요 없이 ACCUNIQ Dashboard에 저장하고 관리할 수 있습니다.
  - 출력이 필요하면 태블릿과 연결된 프린터에서 즉시 출력이 가능합니다.
  - PDF로 다운로드를 받아 측정 결과를 파일로 공유할 수 있습니다.
- 4) 결과지 비교 기능을 제공합니다.
  - 금회 측정한 데이터와 이전 측정한 데이터 또는 특정 날짜에 측정한 결과지를 비교할 수 있습니다.
- 5) 주기적으로 측정한 체성분 측정 결과를 체성분 추이 그래프로 보여줍니다.
  - 체중, 근육량, 체지방량, 체수분량과 부위별 근육량 (상체 좌우, 하체 좌우, 상체 하체)의 변화를 기간을 선택하여 확인할 수 있습니다.
- 6) 계정을 매니저와 트레이너로 나누어 센터의 임직원들이 개별적으로 접속할 수 있습니다.
  - 별도 계정으로 가입한 소속 트레이너의 아이디를 센터 매니저 계정에서 검색하여 등록할 수 있습니다.

## 일러두기

### 회원 등급 및 체계

ACCUNIQ Cloud 서비스의 계정은 관리자 계정인 센터 매니저와 트레이너 계정, 개인 사용자 계정인 회원으로 나뉩니다.

#### [ACCUNIQ Cloud 서비스 도식화]

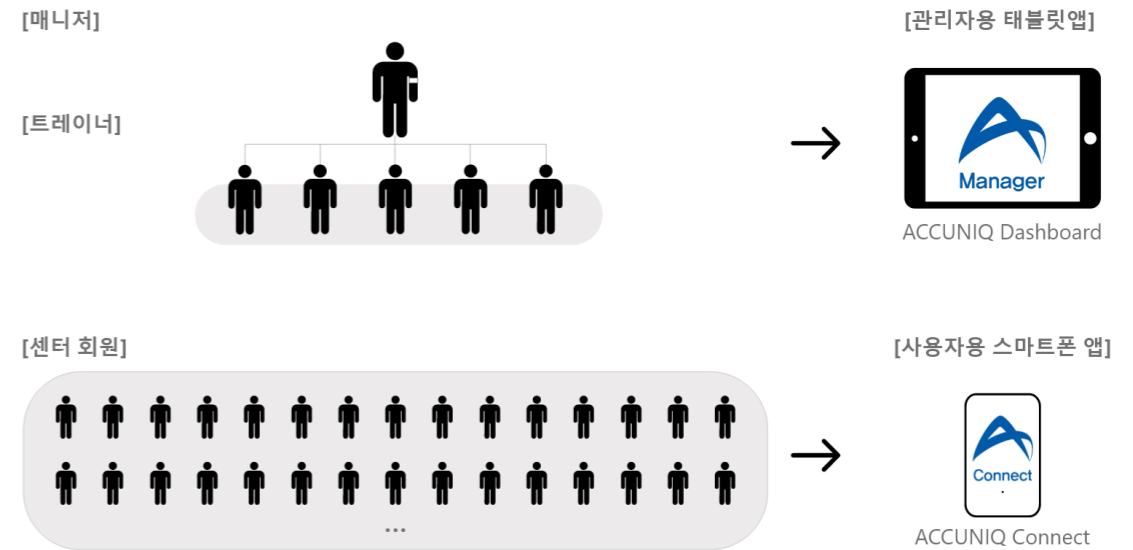

- 1) 센터 매니저 계정
  - ACCUNIQ Dashboard에 가입하여 트레이너, 회원, 센터정보, 장비, 공지사항 관리 등 모든 메뉴에 접근 및 관리가 가능합니다.
- 2) 트레이너 계정
  - ACCUNIQ Dashboard에 가입하여 회원 관리 메뉴에 접근 및 관리가 가능합니다. ACCUNIQ Dashboard에서 센터 매니저 계정으로 트레이너 아이디 검색 및 등록이 가능합니다.
- 3) 회원 계정
  - 별도 모바일용 앱인 ACCUNIQ Connect에서 가입하여 개인의 체성분 측정 결과를 확인할 수 있습니다. ACCUNIQ Dashboard에서 센터 매니저 계정으로 ACCUNIQ Connect의 회원 아이디 검색 및 등록이 가능합니다.

**[매니저, 트레이너 계정 메뉴 권한 비교]**

센터 매니저는 앱의 모든 기능을 관리할 수 있지만 트레이너는 회원관리 기능만 사용할 수 있습니다.

메뉴	매니저	트레이너
트레이너관리	•	-
회원관리	•	•
센터 정보 관리	•	-
장비 관리	•	-
공지사항 관리	•	-

- 회원 정보탭에서는 개인 민감 정보를 포함하고 있습니다. 매니저의 권한을 갖고 있을 경우 모든 회원의 회원 정보탭에 접근이 가능하지만, 트레이너 권한일 경우 회원 정보탭에 접근이 불가능합니다.
- ※ 회원 정보탭 제공항목: 아이디, 이메일, 생년월일, 신장, 휴대폰 번호, 최근 체성분 측정일자

**회원 등급 및 체계**

당사의 체지방측정기 중에서 장비의 소프트웨어 버전명 뒤에 ‘\_CONNECT’라고 적힌 장비부터 지원됩니다.

1) 지원되는 체지방 측정기 모델명

- ACCUNIQ BC720 (클라우드 기능 지원)
- ACCUNIQ BC380 (클라우드 기능 지원)
- ACCUNIQ BC360 (QR code로 기능 지원)
- ACCUNIQ BC300 (QR code로 기능 지원)

- ※ 장비 혹은 언어 버전에 따라 ACCUNIQ Dashboard가 지원되지 않을 수 있습니다.
- ※ 장비와 ACCUNIQ Dashboard를 연동하기 위해서는 먼저 장비를 인터넷에 연결하여 ACCUNIQ Cloud 서비스에 등록하여야 합니다. 장비 인터넷 연결은 각 장비 별 사용자 설명서를 참고하여 주세요.
- ※ 연동 장비는 당사의 서비스 정책 등에 따라 변경될 수 있습니다.

# 시작하기

## 체성분 측정기에서 통신 설정하기

ACCUNIQ Dashboard 프로그램은 블루투스로 ACCUNIQ 체성분 측정기와 연동하여 사용할 수 있습니다. 프로그램을 사용하기 전 장비의 시스템 설정 > 통신에서 설정을 변경하여 주세요.

※ 본 매뉴얼은 ACCUNIQ BC720 LCD 화면을 기준으로 작성되었습니다. 제품에 따라 LCD 이미지가 다를 수 있습니다.



**설정 진입**




초기화면에서 왼쪽 하단의 [ ⚙ ] 아이콘을 눌러 비밀번호 '0-0-0-0' 을 누르면 시스템 설정 화면으로 들어갑니다. 사용자 설정 진입 시 비밀번호는 “기본설정-비밀번호”에서 변경이 가능합니다.

**블루투스로 연동하기**

1) 사용자설정 > 통신 > 프로그램으로 이동합니다.

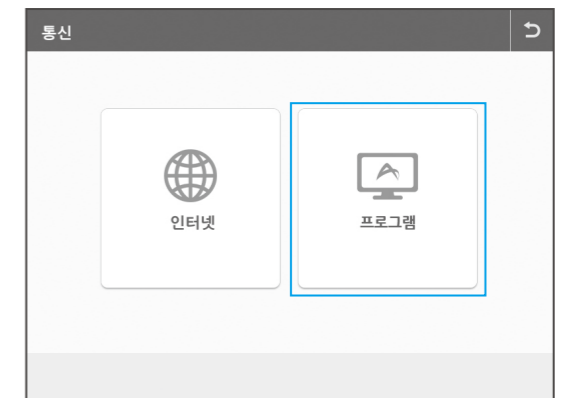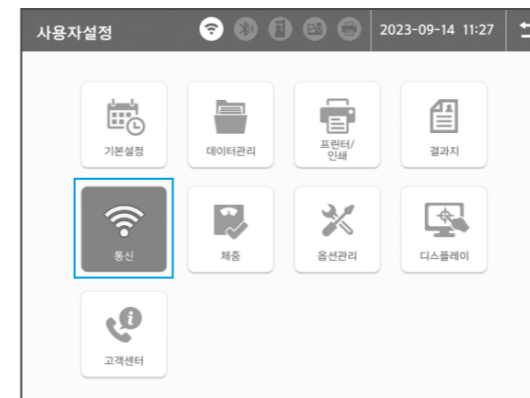

2) 매니저 프로그램을 [ACCUNIQ Dashboard]로 선택합니다.

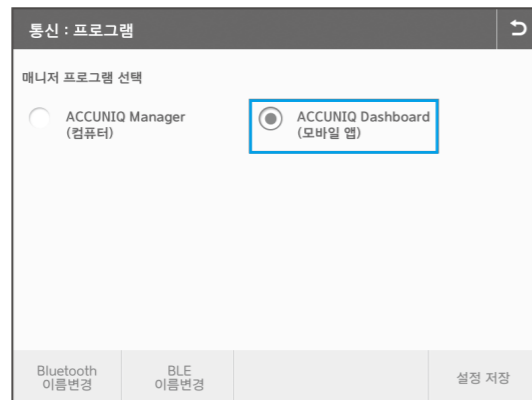

**블루투스로 이름 변경하기**

체성분 측정기 설치 장소에 동일한 모델의 블루투스 모듈이 여러 개 있을 경우 장치가 블루투스 모듈을 식별할 수 없습니다. 이 경우, 블루투스 이름 변경을 ACCUNIQ 체성분 측정기에서 변경해야 합니다.

**1) Bluetooth 모듈로 연동하기 (Android 기기 연동 시)**

※ 지원되는 Bluetooth 모듈은 HC-05-USB Bluetooth (자사 제품품), Sena Technology 사의 Parani SD1000U (별도 구매 필요) 입니다. 이외에 Bluetooth 모듈은 지원하지 않습니다.




HC-05-USB Bluetooth (자사 제품품)




Parani SD1000U (별매품)

1. 사용자설정 > 통신 > 프로그램에서 화면 좌측의 [Bluetooth 이름변경]을 선택합니다.
2. 제품과 함께 제공되는 Bluetooth 모듈을 체성분 측정기 후면의 Bluetooth USB 포트에 꽂습니다.
3. 사용할 Bluetooth 이름을 입력 합니다.

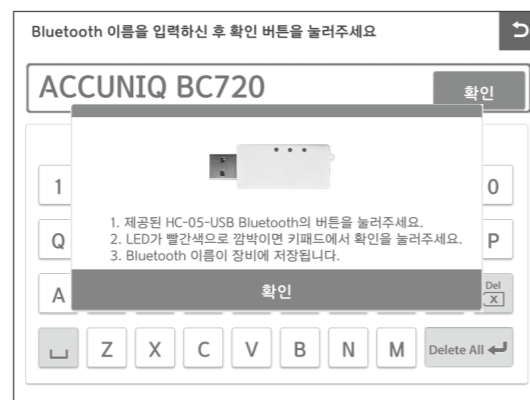

4. Bluetooth 모듈의 측면의 버튼을 누르면 LED가 빨간색으로 깜박입니다.

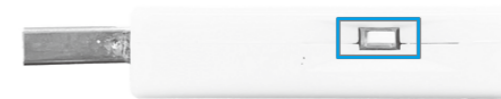

※ Parani SD1000U Bluetooth 모듈 (별매품)은 별도의 버튼이 없습니다.

5. 장비 화면의 확인 버튼을 누르면 Bluetooth 이름이 저장되며 Bluetooth로 장비와 프로그램이 연동 됩니다.

**2) BLE 모듈로 연동하기 (Android, iOS 기기 연동 시)**

※ 지원되는 BLE 모듈은 칩센사의 RCPOR-TD420 (별도 구매 필요) 입니다. 이외에 BLE 모듈은 지원하지 않습니다.




RCPOR-TD420 (별매품)

1. BLE 모듈의 설정을 아래 그림과 같이 통신속도 다이얼 [38.4K], 장치선택 다이얼[1], 동작스위치 [S]로 변경하세요.




2. BLE 모듈을 장비 후면의 Bluetooth USB 포트에 꽂습니다.

3. 사용자설정 > 통신 > 프로그램에서 [ACCUNIQ Dashboard]를 선택하고 [설정 저장] 버튼을 선택 하시면 프로그램이 선택이 완료됩니다.

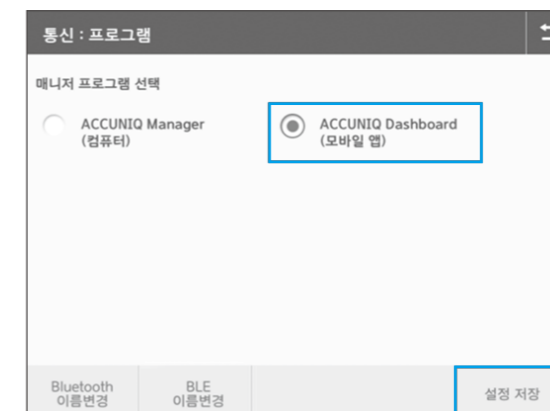

※ 설치 장소에 BLE 모듈을 사용하는 장비가 2대 이상일 경우에는 BLE 이름 변경을 해야 합니다.

1. 사용자설정 > 통신 > 프로그램에서 화면 좌측의 [BLE 이름변경]을 선택합니다.

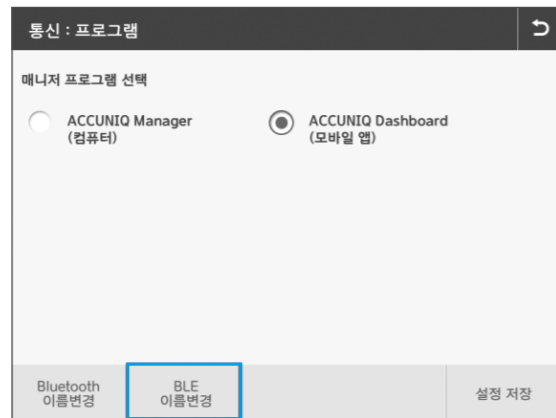

2. BLE 모듈의 설정을 아래 그림과 같이 통신속도 다이얼 [SET], 장치선택 다이얼[1], 동작스위치 [S]로 변경하세요.




3. BLE 모듈을 장비 후면의 Bluetooth USB 포트에 꽂은 후 변경할 이름을 입력한 후 확인 버튼을 눌러주세요.


## 체성분 측정기 장비 표준시간대 설정하기

ACCUNIQ Dashboard를 사용하기 위해서는 장비의 시간 설정이 ACCUNIQ 서버와 동기화가 되어야 합니다.

1) 장비의 사용자설정 모드로 진입한 후, 옵션관리 > 클라우드 설정 > 표준시간대 설정에 들어갑니다.

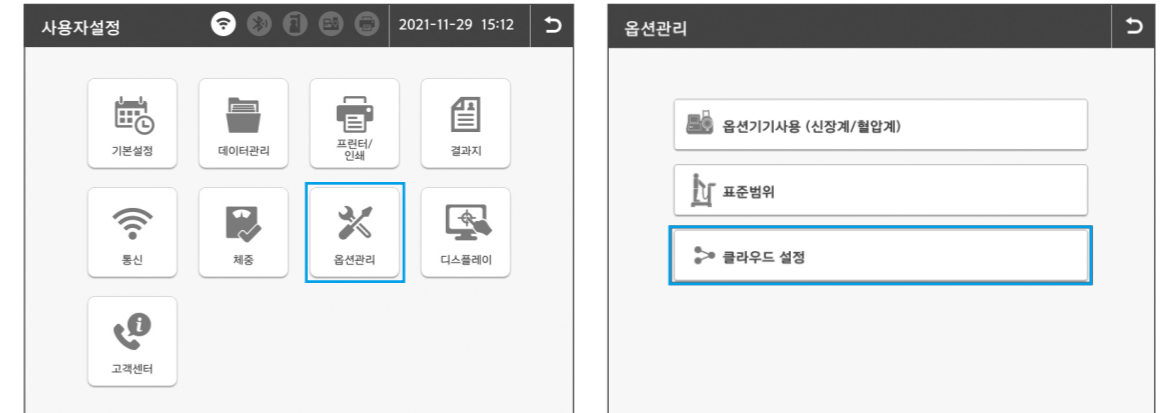

2) 장비가 설치된 장소의 UTC시간대(Universal Time Coordinated.)로 시간을 시, 분 단위를 설정 후, 설정 저장 버튼을 눌러주세요.

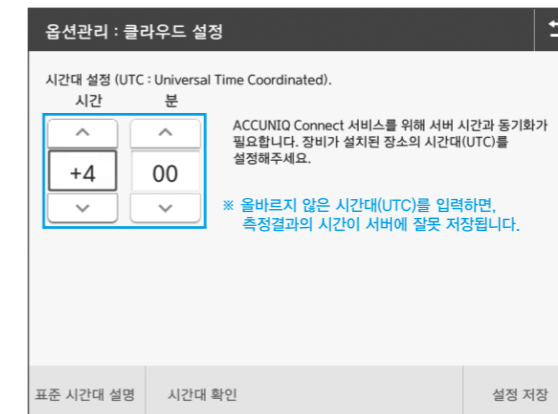

※ 시간대를 잘못 설정한 경우 서버와 동기화가 되지 않아 장비와 ACCUNIQ Dashboard의 측정일자가 맞지 않을 수 있습니다.

## 다운로드


ACCUNIQ Dashboard는 태블릿용 애플리케이션으로 Android 혹은 iOS 태블릿에서 다운로드를 하거나 Web에서 접속하여 PC에서 사용할 수 있습니다.

### Android 또는 iOS 태블릿에서 다운로드하여 사용하기

- 1) 구글 플레이 또는 iOS 앱스토어를 실행하여 [ACCUNIQ Dashboard]를 검색합니다.
- 2) 앱을 다운로드 및 설치합니다.
  - ※ ACCUNIQ Dashboard의 화면은 태블릿 가로보기 모드에 최적화되어 설계되었습니다. 세로 보기 모드에서는 화면이 바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
  - ※ 태블릿 권장 해상도에서 벗어나면 화면의 일부가 잘리거나 보이지 않을 수 있습니다.
    - I-Pad air5 디스플레이 10.9인치 59:41 비율의 2360×1640 해상도 지원. 패널은 IPS TFT-LCD 방식의 Liquid Retina 디스플레이
    - Android S7 FE, 12.4인치 16:10 비율 2560×1600 IPS LCD
  - ※ 태블릿 권장 소프트웨어 사양은 다음과 같습니다.
    - Android 최소 사양 12 이상
    - iOS 최소 사양 14 이상 (권장사양 16)

### Web에서 접속하여 사용하기


- 1) PC에서 인터넷 창을 엽니다.
- 2) 인터넷 주소창에 <https://manager.accunIQ.com>를 입력합니다.
- 3) 아래와 같이 로그인 화면이 표시됩니다.

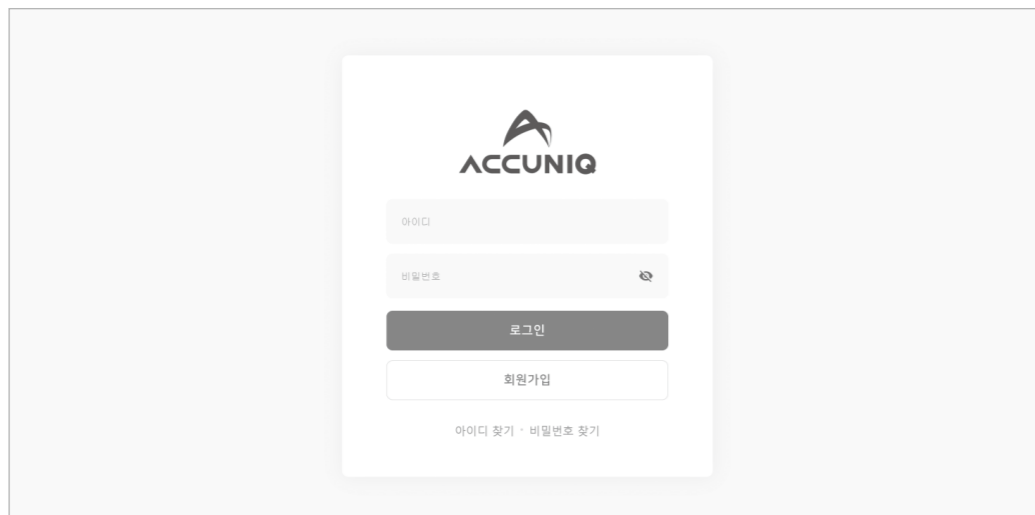


## 회원가입

ACCUNIQ Dashboard의 계정은 [매니저]와 센터에 소속된 [트레이너]로 나뉩니다. 회원 가입 후 [트레이너] 계정은 관리자의 승인이 필요합니다. 아래의 방법으로 먼저 회원 가입을 진행해주세요.

- 1) 프로그램을 실행합니다.
- 2) 회원가입 버튼을 누릅니다.
- 3) 항목별로 입력 및 이용 관련 약관동의를 합니다.

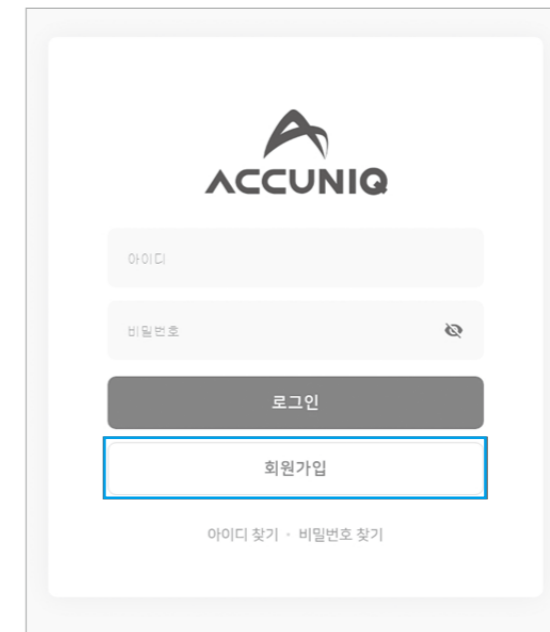

[입력 항목]

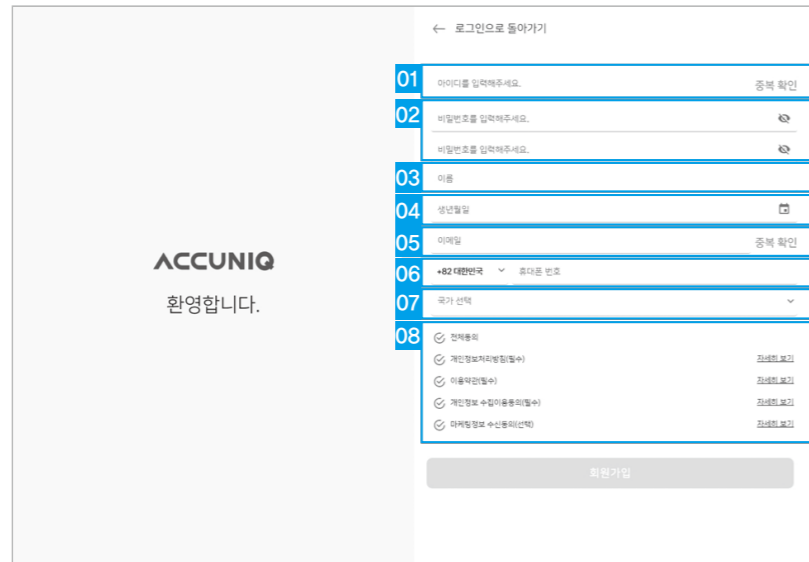


01. 아이디: 아이디를 입력하고 중복여부를 확인합니다.  
(5~48자의 영문 소문자, 숫자와 특수문자(!@#\$%^&()~\_+-,{}':/.<.>?)만 사용가능합니다.)
  02. 비밀번호 입력/확인 : 사용할 비밀번호와 비밀번호 확인을 입력합니다.
  03. 이름: 이름을 입력합니다.
  04. 생년월일: 생년월일을 선택합니다.
  05. 이메일: 이메일을 입력하고 중복여부를 확인합니다.
  06. 전화번호: 사용하는 휴대전화의 국가코드와 전화번호를 입력합니다.
  07. 국가선택 : 국가를 선택합니다.
  08. 약관 동의 : 국가 선택에 따른 약관내용을 확인하고 동의여부를 선택합니다.
- 4) 확인버튼을 누릅니다.
- 5) 회원가입이 완료되었습니다. 완료 버튼을 누르면 로그인 화면으로 이동합니다.



- 6) 본인이 센터를 소유하는 매니저일 경우 관리하는 센터를 등록합니다.

로그인


아이디와 패스워드를 입력한 후 로그인합니다.

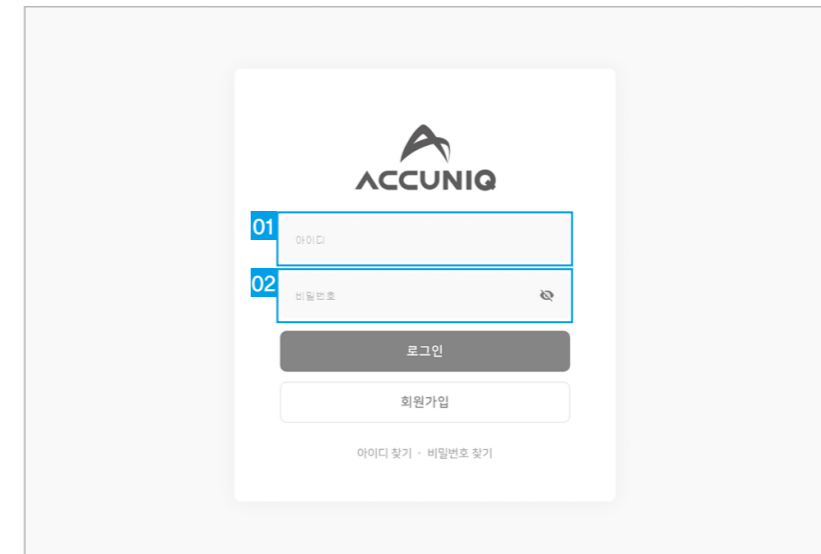

센터 등록

관리자 계정인 경우 사용하기에 앞서 각 항목 별 내용을 등록하여 센터를 등록하여주세요.

01. 센터명: 센터명을 입력합니다.
02. 센터 국가: 센터가 위치해 있는 국가를 선택합니다.
03. 센터 주소: 센터의 주소를 입력합니다.
04. 센터 전화번호: 국가번호 선택 후 전화번호를 입력합니다.
05. 센터 로고: 센터의 로고 이미지를 등록합니다.

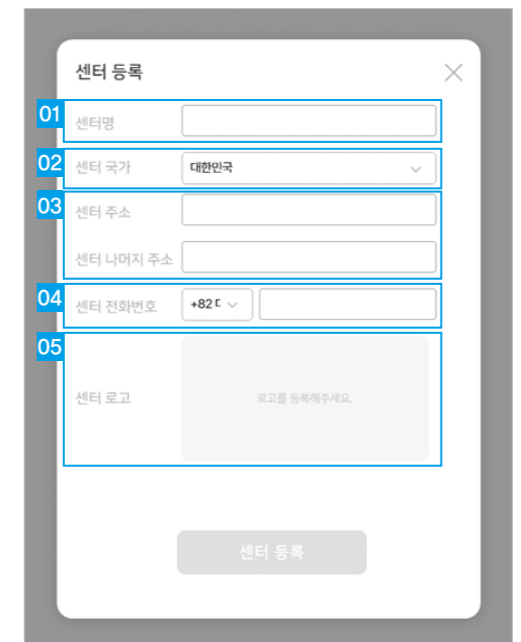




## 장비 등록


장비와 ACCUNIQ Dashboard를 연동하기 위해서는 먼저 장비를 인터넷에 연결하여 ACCUNIQ Cloud 서비스에 등록해야 합니다. 장비의 관리자모드 > 통신 > 인터넷에서 Wifi 혹은 이더넷으로 연결할 수 있습니다. 상세한 내용은 각 장비의 사용자 매뉴얼을 참고해주세요.

1) ACCUNIQ Dashboard 홈화면에서 장비관리 > 장비등록을 선택합니다.

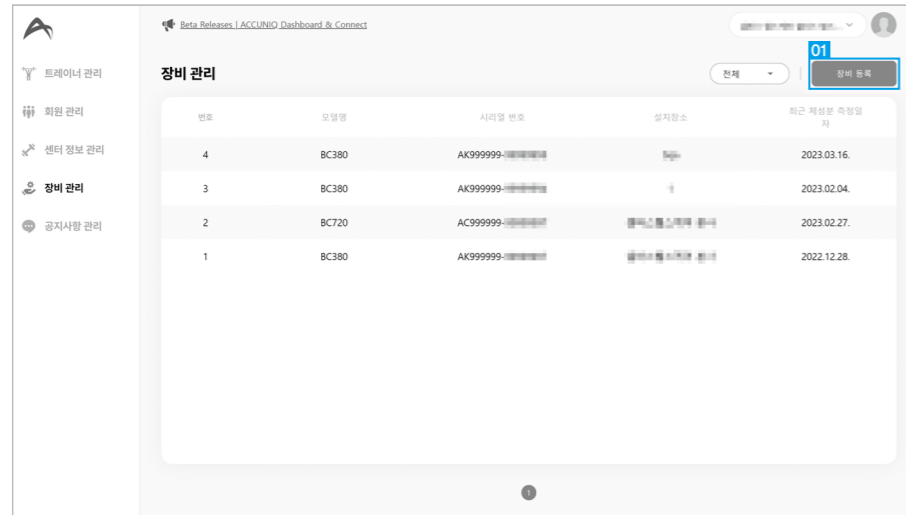


2) 아래 항목을 입력 후 등록 버튼을 선택합니다.

01. 장비 시리얼 번호 검색: 등록할 장비의 시리얼 번호를 입력하고 검색합니다.
02. 장비 검색 결과: 입력한 시리얼 번호로 검색된 장비 정보를 확인하고 다음버튼을 클릭합니다.
03. 설치 장소 정보: 등록할 장비의 상세정보를 확인하고 설치 장소, 설치 국가, 설치 주소, 관리자 연락처, 이메일, 관리자 정보를 입력하고 등록합니다.

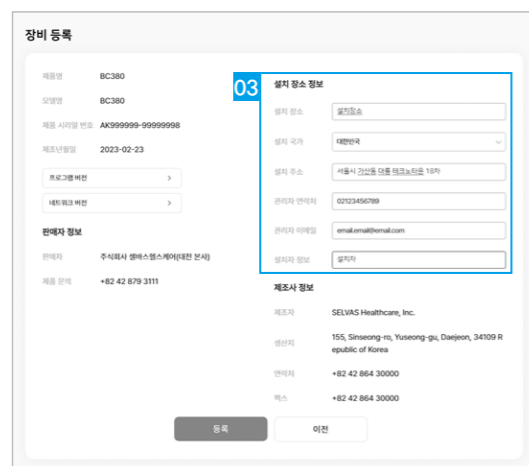

## 트레이너 등록

센터에 소속된 트레이너가 있을 경우 ACCUNIQ Dashboard에 회원가입을 합니다. 관리자 계정으로 로그인 후 홈 > 트레이너 관리 > 트레이너 등록에서 등록을 합니다.

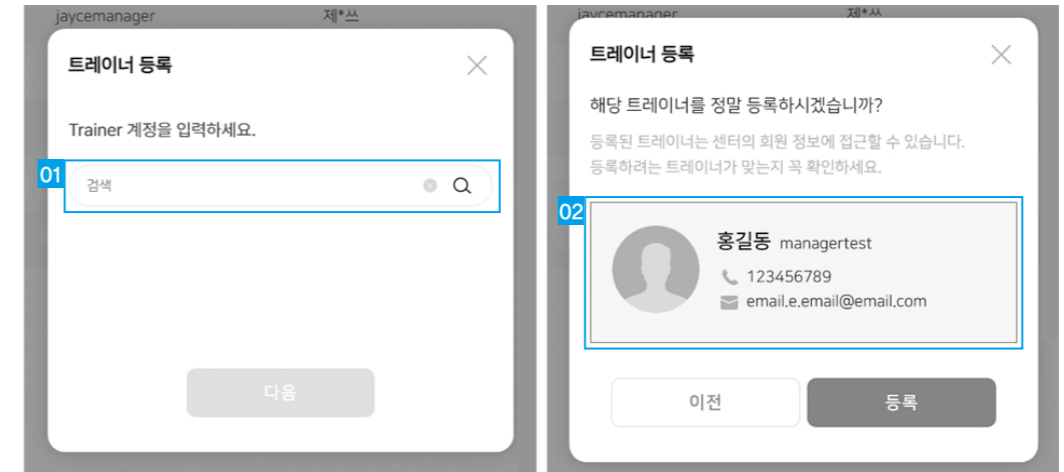


01. 트레이너 검색: 등록할 트레이너의 계정 아이디를 정확히 입력 후 다음을 누릅니다.
02. 등록 트레이너 정보: 등록할 트레이너의 계정 정보를 확인하고, 센터에 등록합니다.

## 회원 등록

ACCUNIQ Connect 에서 가입한 센터 회원의 계정 아이디를 검색하여 센터 회원으로 등록합니다.



1. 회원 검색: 등록할 회원의 ACCUNIQ Connect 앱 계정 아이디를 정확히 입력 후 다음을 누릅니다.
2. 등록 회원 정보: 등록할 회원 계정 정보를 확인하고, 센터에 등록합니다.
3. 회원 등록 후 회원 목록에 있는 [권한 요청] 버튼을 눌러 정보 공개 권한 요청을 합니다.  
조회 권한 요청을 보내면 ACCUNIQ Connect 앱에서 회원이 승인 혹은 거절을 할 수 있습니다. 회원이 승인을 하면 정보 공개가 [공개]로 변경되며, 측정 데이터를 ACCUNIQ Dashboard에서 볼 수 있습니다. (회원이 승인을 하지 않으면 측정 데이터가 공유되지 않습니다.)


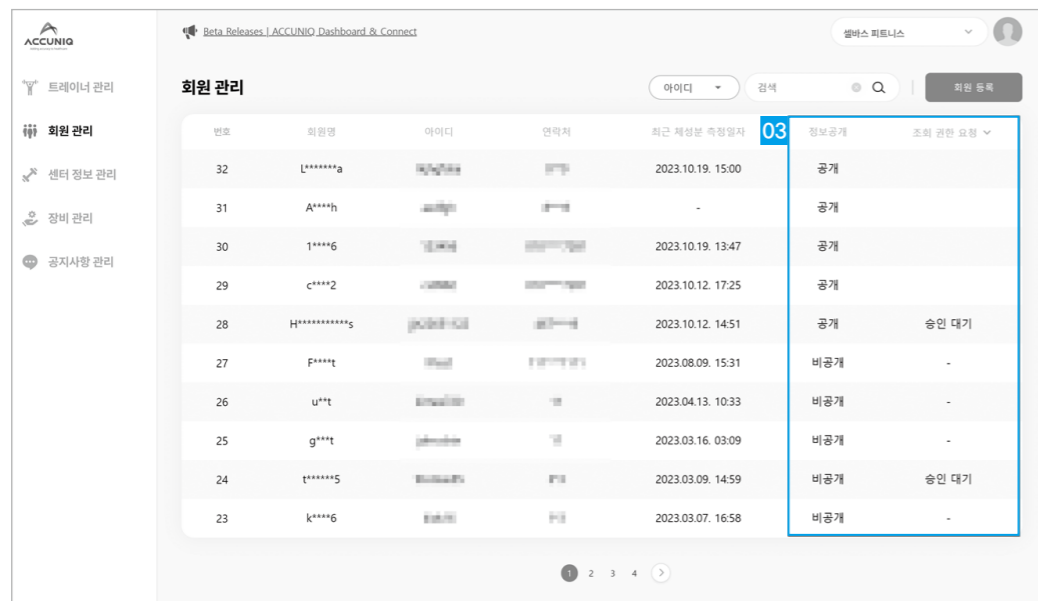


## ACCUNIQ Connect ID로 측정하기

ACCUNIQ 체성분 측정기에서 측정한 결과를 ACCUNIQ Dashboard에 전송하기 위해서는 센터 회원 개인용 체성분 데이터 관리 앱인 ACCUNIQ Connect에 회원 가입 후 로그인하여 측정을 진행해야 합니다. ※ 본 설명서에서는 ACCUNIQ BC380의 화면을 기준으로 설명합니다.

### ACCUNIQ Connect 앱 설치

- 1) 센터 등록 회원의 스마트폰에서 구글플레이 또는 iOS 앱스토어를 실행하여 [아쿠닉커넥트] 앱을 검색 합니다.
- 2) 앱을 다운로드 및 설치합니다.
- 3) 센터 회원이 사용할 아이디로 가입을 합니다.

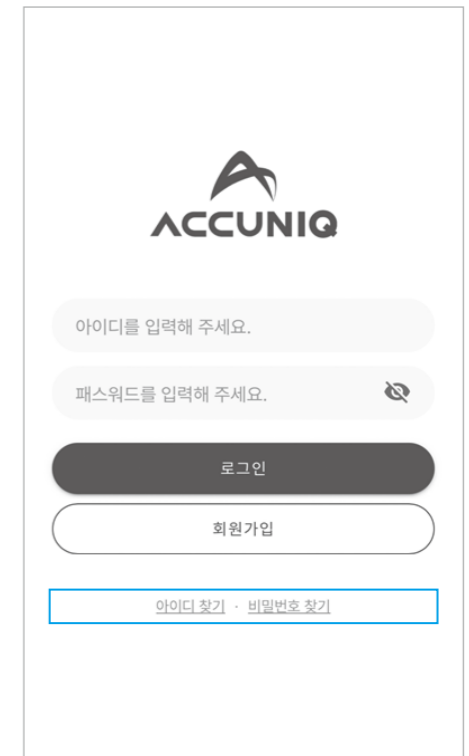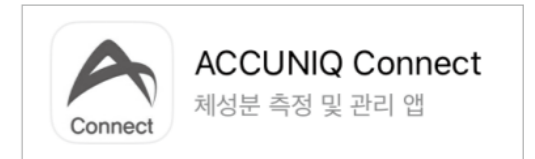

※ ACCUNIQ Dashboard에 등록된 장비에서 회원이 로그인 후 측정을 하면 자동으로 ACCUNIQ Dashboard 프로그램의 회원으로 등록이 됩니다.

## ACCUNIQ Connect로 정보 불러오기

1) 초기화면에서 [Login with ACCUNIQ Connect] 버튼을 선택합니다.



2) 장비의 [아큐닉 커넥트앱으로 내 정보 불러오기] 화면 우측에 있는 QR코드를, 센터 회원의 스마트폰에 다운로드한 [ACCUNIQ Connect] 앱의 화면 상단 우측에 있는 카메라 버튼을 눌러서 스캔합니다.



3) 앱에서 불러온 정보가 맞는지 확인 후 측정을 진행합니다.




4) 측정이 끝나면 ACCUNIQ Dashboard와 ACCUNIQ Connect로 결과가 전송됩니다.


# ACCUNIQ Dashboard로 측정하기

ACCUNIQ 체성분 측정기와 ACCUNIQ Dashboard와 연동 후, ACCUNIQ Dashboard에서 바로 측정을 할 수 있습니다.

- 1) ACCUNIQ Dashboard에서 회원 메뉴로 이동합니다. 측정을 하고자 하는 회원을 선택합니다.
- 2) 회원정보탭에서 [체성분 측정하기] 버튼을 선택합니다.

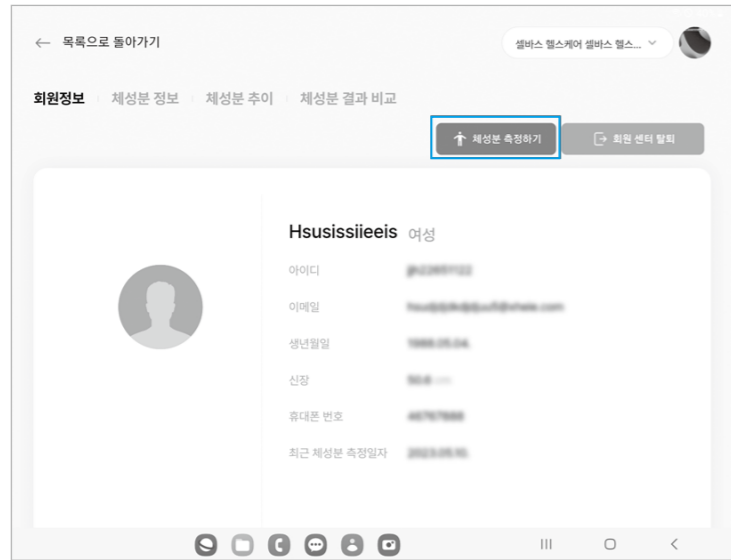


3) 연결된 장비 목록에서 측정할 ACCUNIQ 체성분 측정기 모델명을 선택합니다.

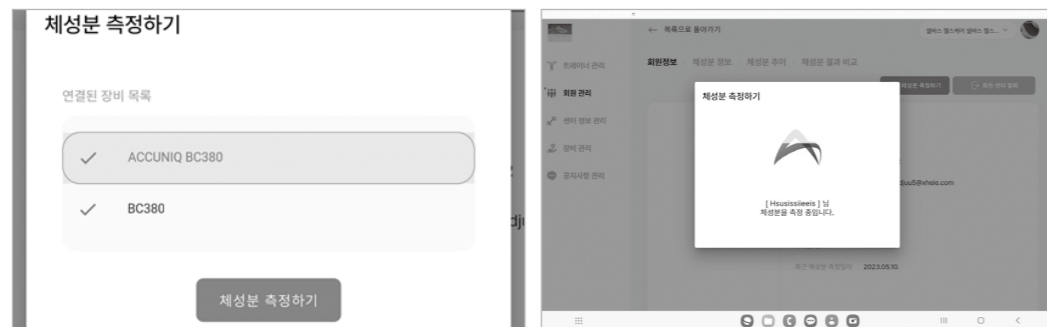

- 4) 체성분 측정 준비가 되면 발판 위에 맨발로 올라서면 측정이 시작됩니다.
  - 5) 측정이 완료되면 측정 결과가 ACCUNIQ Dashboard에 자동으로 전송됩니다.
- ※ 장비가 인터넷 연결이 되어 있으면 자동으로 아큐닉 서버에 전송합니다.


# 트레이너 관리

센터에 소속된 트레이너 계정을 관리할 수 있는 메뉴입니다.

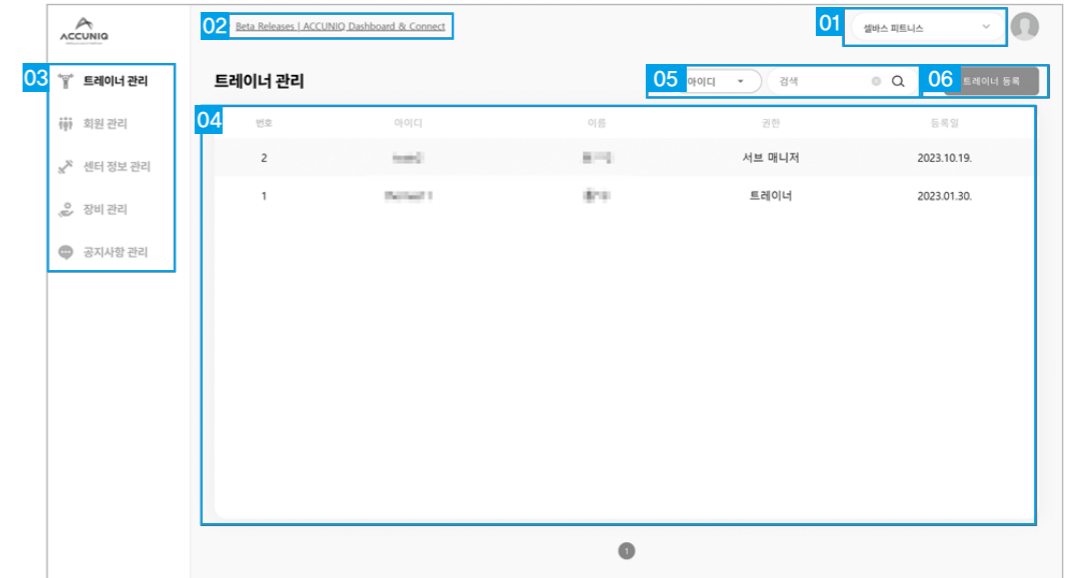

1. 센터 선택 : 아큐닉 매니저 관리할 센터를 표시합니다. 클릭 시 센터목록을 표시하고 관리할 센터를 선택합니다.
2. 공지사항 : 공지사항을 제공합니다.
3. 사이드 메뉴 : 아큐닉 매니저 관리 메뉴를 제공합니다.
4. 트레이너 목록 : 해당 센터에 등록된 트레이너 목록을 표시합니다. 트레이너 클릭 시 상세 화면으로 이동합니다.
5. 트레이너 검색 : 해당 센터에 등록된 트레이너를 목록에서 검색합니다.
6. 트레이너 등록 : 해당 센터에 등록되지 않은 트레이너를 목록에 등록합니다.


## 트레이너 정보

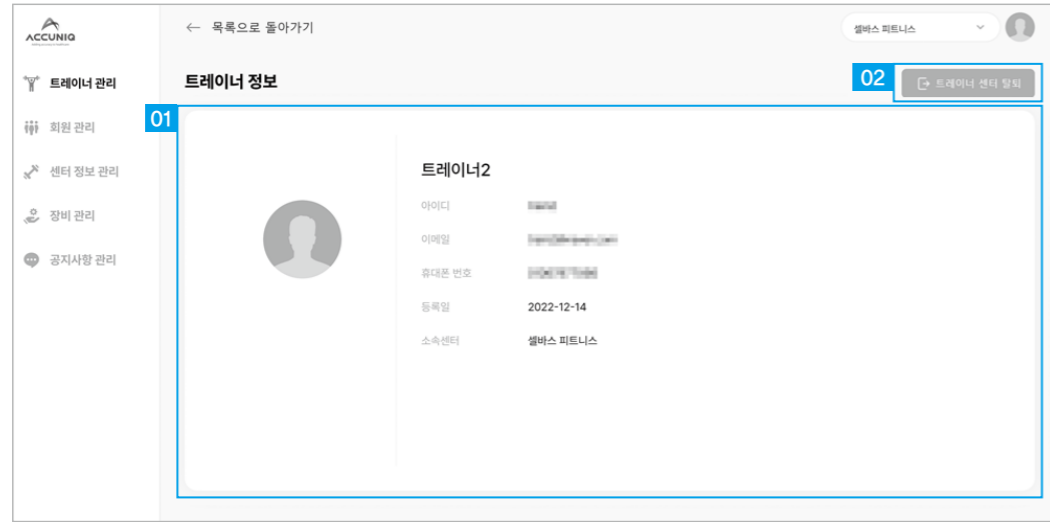

1. 트레이너 상세 정보: 해당 트레이너의 프로필 사진, 이름, 아이디, 이메일, 휴대폰 전화 번호, 센터 등록일, 소속 센터 정보를 표시합니다.
2. 트레이너 센터 탈퇴: 해당 트레이너를 센터에서 탈퇴 시킵니다.  
※ 트레이너를 탈퇴시키면 계정 정보가 모두 삭제되며 복구가 불가능합니다.

## 회원 관리

ACCUNIQ Connect 에서 가입한 개인 회원을 ACCUNIQ Dashboard에 등록하고 체성분 결과를 확인 및 관리할 수 있는 메뉴입니다.

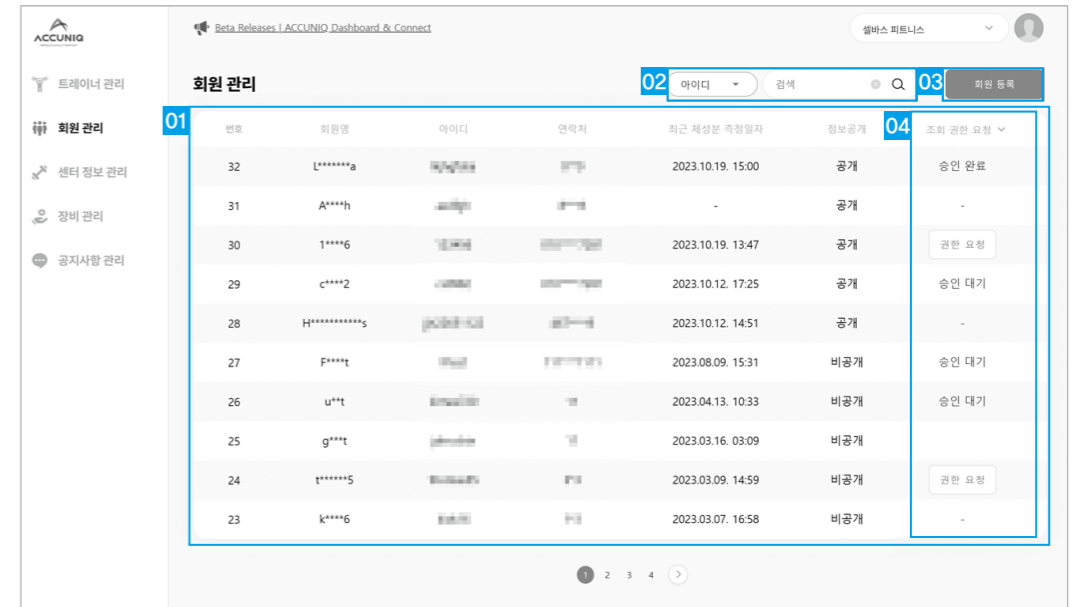


1. 회원 목록: 해당 센터에 등록된 회원 목록을 표시합니다. 회원 클릭 시 상세 화면으로 이동합니다.
2. 회원 검색: 해당 센터에 등록된 회원을 목록에서 검색합니다.
3. 회원 등록: 해당 센터에 등록되지 않은 회원을 목록에 등록합니다.
4. 정보 조회권한 요청: 회원의 개인정보 보호를 위해 정보 공개 권한을 요청합니다.

## 회원 정보




1. 회원 상세 메뉴: 회원정보/ 체성분정보/ 체성분추이/ 체성분 결과 비교 메뉴를 제공합니다. 매니저의 권한을 갖고 있을 경우 모든 회원의 회원 정보 탭에 접근이 가능하고, 트레이너 권한일 경우 회원 정보탭에 접근이 불가능합니다.
2. 회원 정보: 회원의 프로필사진, 이름, 성별, 아이디, 이메일, 생년월일, 신장, 최근 체성분 측정일자 정보를 표시합니다.
3. 회원 센터 탈퇴: 해당 회원을 센터에서 탈퇴 시킵니다.

## 체성분 정보

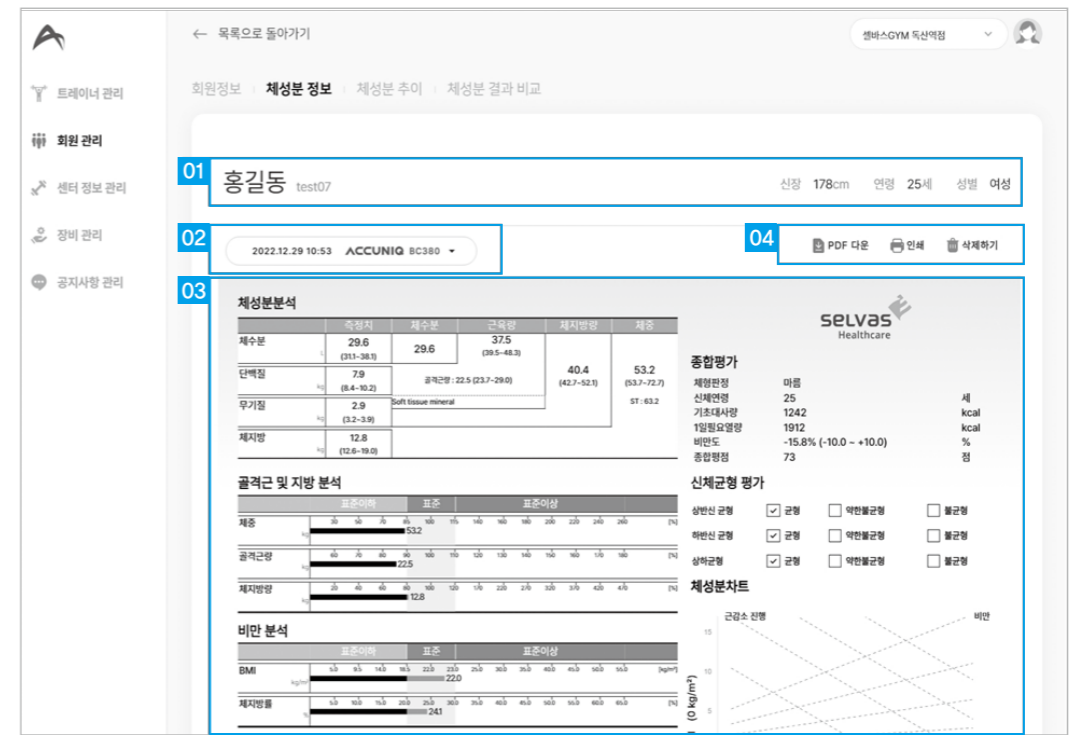

1. 회원 정보: 회원의 이름, 아이디, 신장, 연령, 성별을 표시합니다.
2. 체성분 측정 목록: 표시중인 체성분 측정결과와 측정일시를 표시합니다. 클릭 시 체성분 측정결과 목록이 팝업되고 다른 측정결과를 조회할 수 있습니다.
3. 체성분 측정 결과: 체성분 측정 결과를 표시합니다.
4. 체성분 측정 결과 관리: 표시중인 체성분 측정결과를 PDF 다운 / 인쇄 / 삭제가 가능합니다.

## 체성분 추이

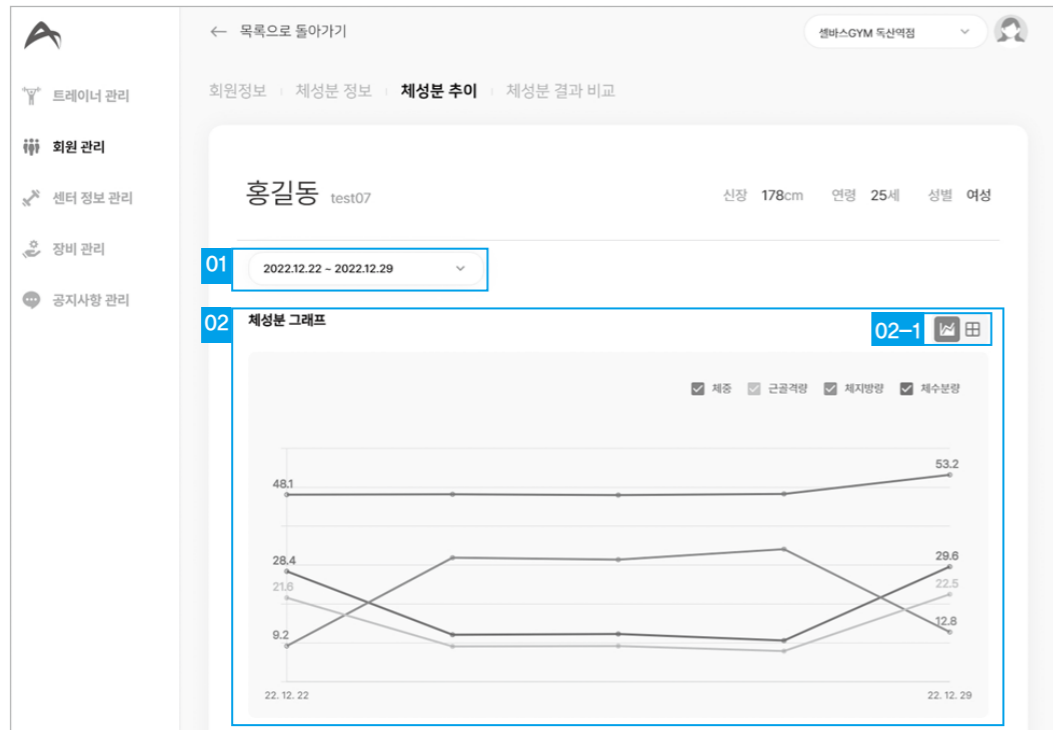


1. 체성분 추이 조회 기간: 체성분 추이를 조회할 기간을 선택합니다.

2. 체성분 추이 그래프: 선택한 기간의 체성분 주요지표에 대한 추이 그래프를 표시합니다.


02-1 그래프 범례: 표시중인 그래프 항목을 범례를 클릭하여 표시 또는 미표시 가능합니다.

02-2 오버랩/그리드 뷰: 표시중인 체성분 주요 지표의 항목을 겹쳐서 한 그래프에 표시하는 오버랩 뷰 또는 각각의 독립적인 그래프로 표시하는 그리드 뷰 중 선택합니다.

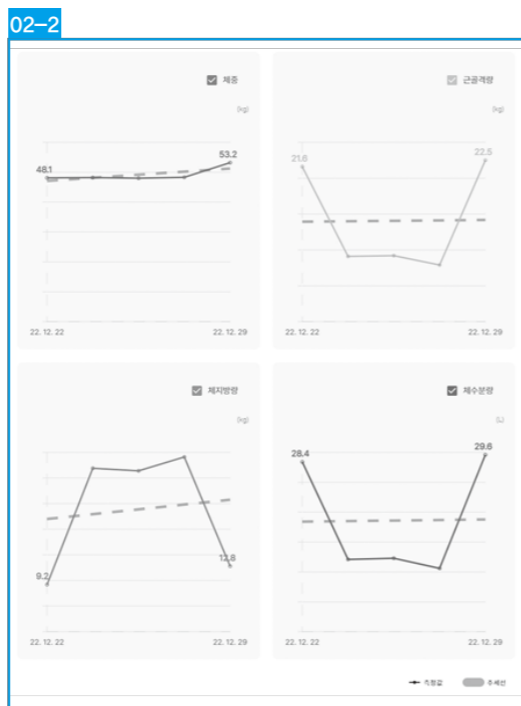

3. 부위별 근육량: 조회한 기간동안 부위별 근육량을 비교하여 신체의 밸런스를 확인합니다.

03-1 부위 선택: 상체좌우 / 하체좌우 / 상체하체 중 조회할 부위별 근육량 비교 그래프를 선택합니다.

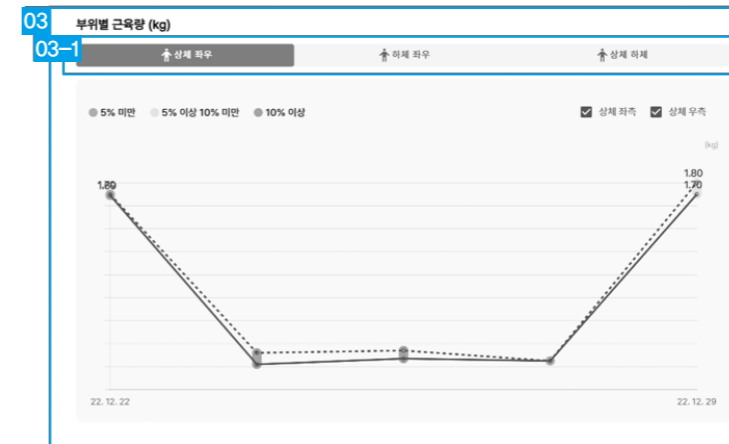

## 체성분 결과 비교



1. 체성분 결과 비교: 특정 두 체성분 측정결과를 한 화면에서 비교 합니다.

01-1 결과 선택: 비교할 체성분 측정 결과를 선택합니다.

01-2 체성분 결과 화면 이동: 체성분 결과를 좌/우 버튼을 이용하여 결과지 표시내용을 이동하여 확인할 수 있습니다.



# 센터 정보

센터 정보를 확인하고 관리할 수 있는 메뉴입니다.



1. 센터 정보: 해당 센터의 로고 이미지, 센터 매니저, 센터명, 센터 전화번호, 센터 국가, 센터 주소, 센터 운영시간을 표시 및 수정합니다.
  - 01-1 센터로고: 등록된 로고 이미지를 표시합니다. 클릭 시 이미지를 변경 가능합니다.
  - 01-2 센터로고 삭제: 등록된 로고 이미지를 삭제합니다.
  - 01-3 센터 매니저 변경: 센터를 관리하는 매니저를 소속 트레이너 중 1명에게 권한을 부여할 수 있습니다.
2. 센터 이관하기: 해당 센터의 모든 정보를 다른 매니저에게 이관합니다.
3. 센터 삭제하기: 해당 센터를 삭제합니다.
  - ※ 소속된 회원 또는 트레이너가 남아있을 경우 센터를 삭제할 수 없습니다.


## 센터 정보 수정



1. 센터명: 센터명을 입력합니다.
2. 센터 전화번호: 센터의 대표 전화번호를 입력합니다.
3. 센터 국가: 센터가 위치해있는 국가를 선택합니다.
4. 센터 주소: 센터의 주소를 입력합니다.
5. 센터 운영시간: 센터의 운영시간을 설정합니다. 설정내용으로 표현할 수 없는 내용은 메모란에 추가로 기입합니다.



## 센터 매니저 변경

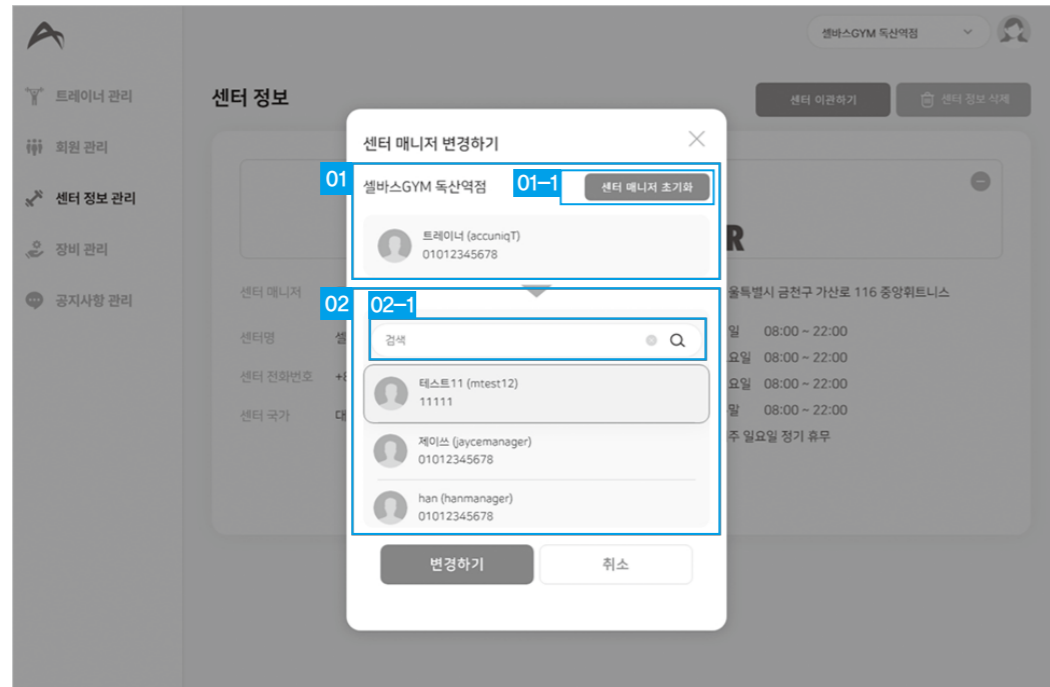

1. 센터 매니저 정보: 현재 설정된 센터 매니저의 정보를 표시합니다.  
01-1 센터 초기화: 센터 매니저를 소속 트레이너가 아닌 매니저 권한을 가진 계정으로 초기화 합니다.
2. 트레이너 목록: 해당 센터의 소속된 트레이너 목록을 표시합니다. 권한 부여할 트레이너를 선택합니다.  
02-1 트레이너 검색: 트레이너를 검색합니다.


## 센터 이관하기



1. 매니저 계정 검색: 이관 받을 매니저의 계정을 정확히 입력하고 다음을 클릭합니다.
2. 매니저 정보: 이관 받을 매니저의 기본 정보를 표시합니다.  
02-1 매니저 인증: 이관 받을 매니저의 이메일로 발송된 인증번호를 입력합니다.
3. 센터 이관 / 센터 이관 취소: 인증번호 입력 후 센터 이관을 누를 경우 해당 센터의 모든 정보가 이관됩니다. 센터 이관 취소 클릭 시 센터 이관 진행을 취소합니다.


# 장비관리

ACCUNIQ Dashboard와 연동된 아큐닉 체성분측정기를 관리할 수 있는 메뉴입니다.

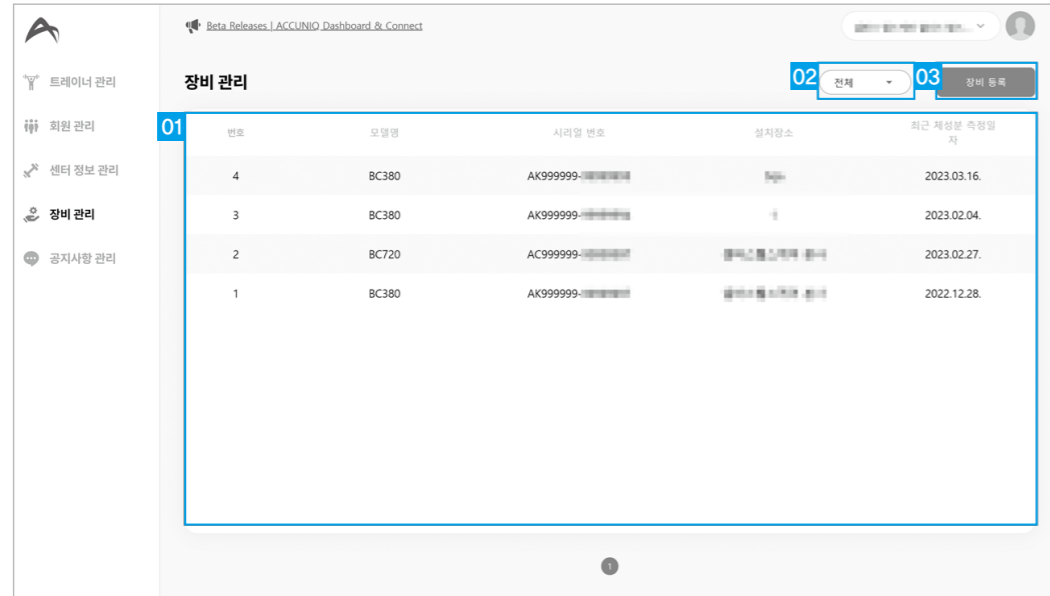

1. 장비 목록: 해당 센터에 등록된 장비 목록을 표시합니다. 장비 클릭 시 상세 화면으로 이동합니다.
2. 장비 검색: 장비 목록을 기기의 종류로 검색합니다.
3. 장비 등록: 해당 센터에 등록되지 않은 장비를 목록에 등록합니다.

# 장비 상세 정보

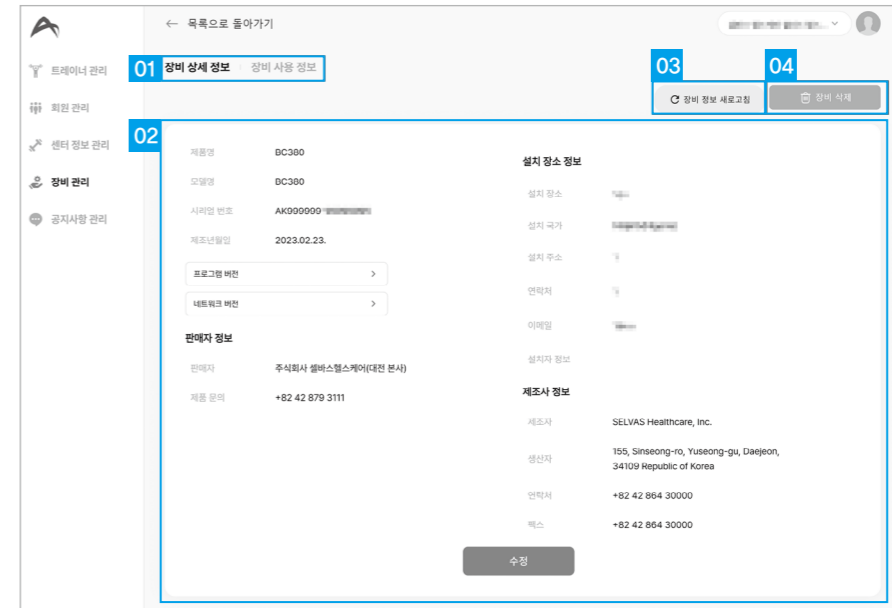

1. 장비 상세 메뉴: 장비 상세 정보 / 장비 사용 정보 메뉴 중 선택합니다.
2. 장비 정보: 장비의 제품명, 모델명, 시리얼번호, 제조년월, 프로그램 버전, 네트워크 버전, 판매자 정보, 설치장소 정보, 제조사 정보를 확인합니다.
3. 장비 정보 새로고침: 장비의 정보를 새로고침 합니다.
4. 장비 삭제: 해당 장비를 센터에서 삭제합니다.


# 장비 사용 정보



1. 장비 사용 정보: 장비의 오늘, 총 누적 측정 건수를 표시합니다.
2. 장비 사용 추이: 정보 선택한 기간동안 해당 장비의 측정건수를 표시합니다.

# 공지사항 관리

공지사항을 작성하면 ACCUNIQ Connect 앱의 공지사항에 등록되어 센터 회원이 확인할 수 있습니다.

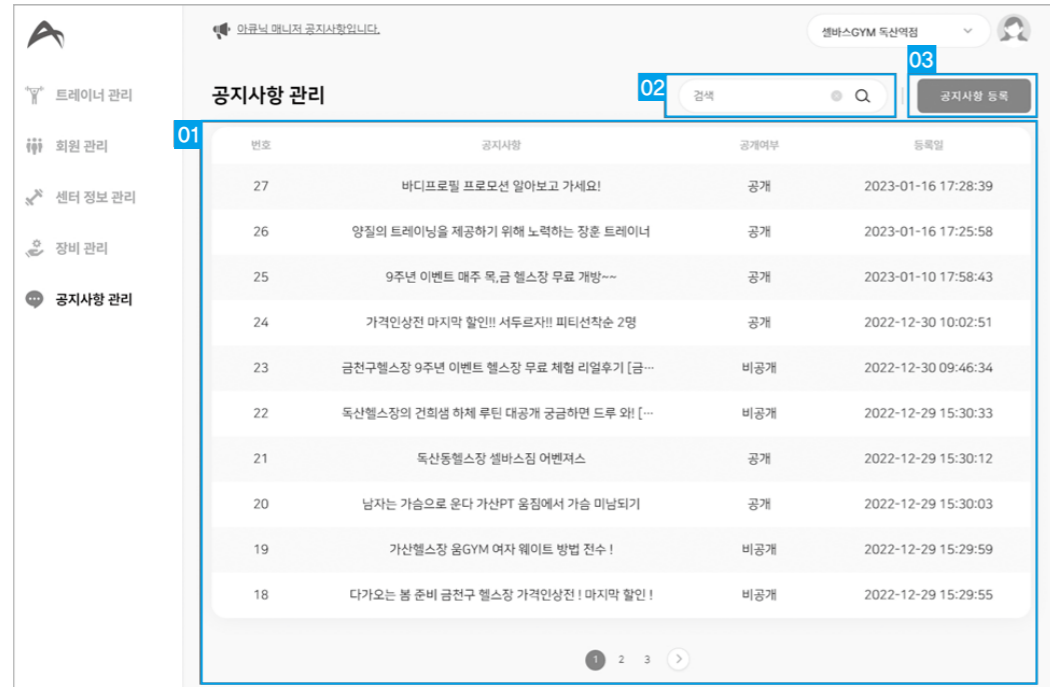

1. 공지사항 목록: 센터에 등록된 공지사항 목록을 표시합니다. 공지사항 클릭 시 상세 화면으로 이동합니다.
2. 공지사항 검색: 등록된 공지사항을 목록에서 검색합니다.
3. 공지사항 등록: 해당 센터의 공지사항을 등록합니다.

# 공지사항 상세



1. 공지사항 상세 내용: 공지사항의 제목과 내용을 표시합니다.
2. 공개/비공개: 해당 공지사항 공개 여부를 선택합니다.
3. 공지사항 삭제: 해당 공지사항을 삭제합니다.


# 공지사항 등록



1. 공지사항 제목: 등록할 공지사항의 제목을 입력합니다.
2. 공지사항 내용: 등록할 공지사항의 내용을 입력합니다.


# 내 정보 관리

화면 우측 상단의 프로필 사진을 클릭하면 내 정보와 언어설정을 확인하고 수정할 수 있습니다.

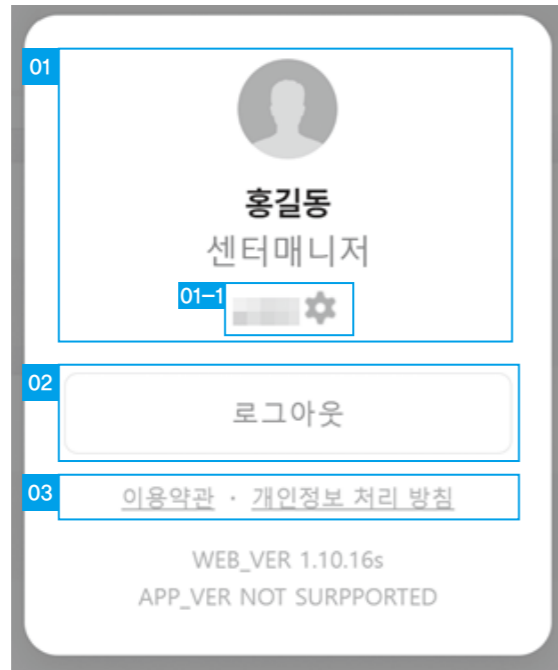


1. 내 정보: 프로필사진, 이름, 권한, 계정 아이디를 표시합니다.  
01-1 내 정보 수정/언어설정: 내 정보 수정과 언어설정으로 이동합니다.
2. 로그아웃: 해당 계정을 로그아웃하고 로그인 화면으로 이동합니다.
3. 이용약관/개인정보 처리 방침: 이용약관과 개인정보 처리 방침 내용을 확인합니다.


## 공지사항 등록

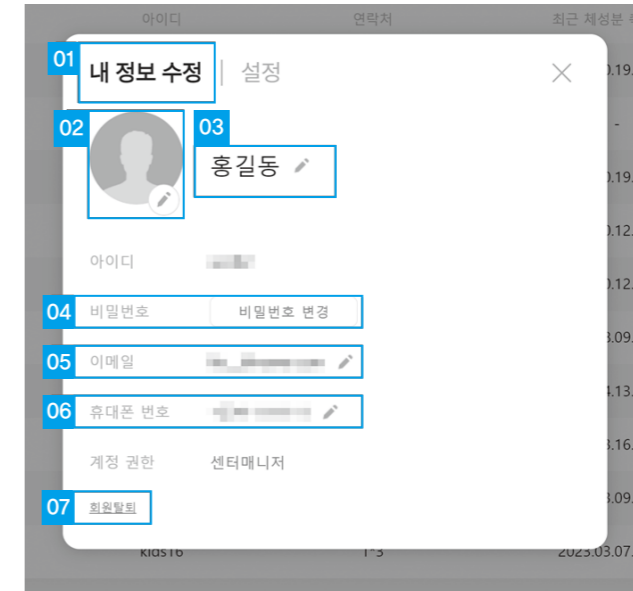


1. 설정 메뉴: 내 정보 수정 / 언어 설정 메뉴를 제공합니다.
2. 프로필 사진: 프로필 사진을 표시하고 수정버튼 클릭 시 02-1의 프로필 변경 화면으로 이동합니다.  
02-1. 프로필 사진 변경: 설정된 프로필 사진을 변경하거나 삭제합니다.

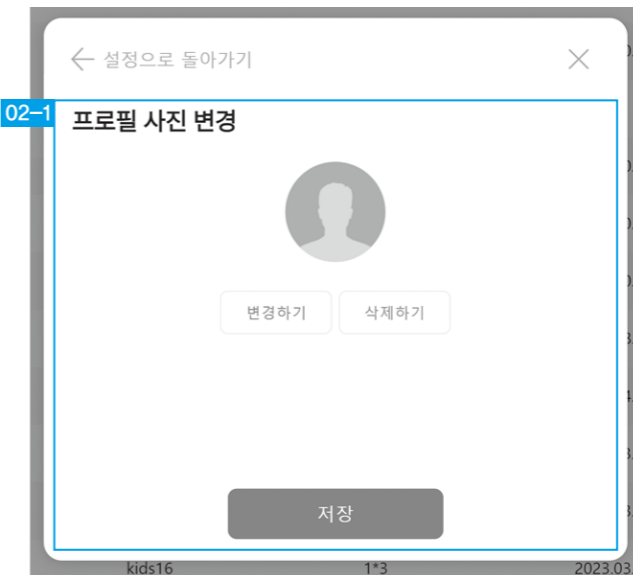


3. 이름: 이름을 표시하고 수정버튼[ ✎ ]을 클릭하여 수정합니다.
4. 비밀번호 변경: 비밀번호 변경 화면으로 이동합니다.
  - 04-1. 비밀번호 변경: 현재 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인을 입력하고 비밀번호를 변경합니다.

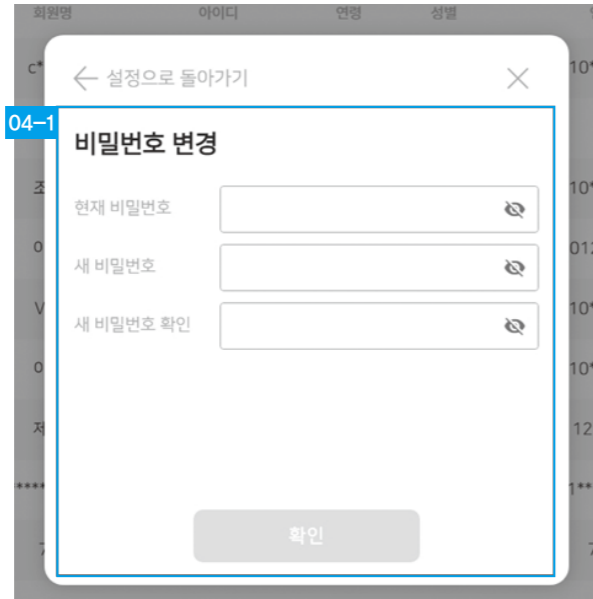

5. 이메일: 이메일을 표시하고 수정버튼[ ✎ ] 클릭 시 변경화면 으로 이동합니다.
  - 05-1. 이메일 주소 수정: 변경할 이메일을 입력 후 인증 번호를 발송합니다. 인증번호를 입력하고 이메일 주소를 변경합니다.

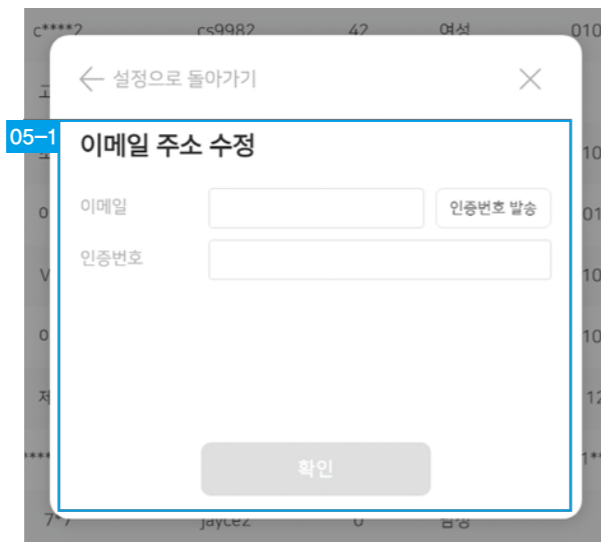

6. 휴대전화 번호: 휴대전화 번호를 표시하고 수정버튼[ ✎ ]을 클릭하여 수정합니다.
7. 회원 탈퇴: 회원 탈퇴 화면으로 이동합니다.

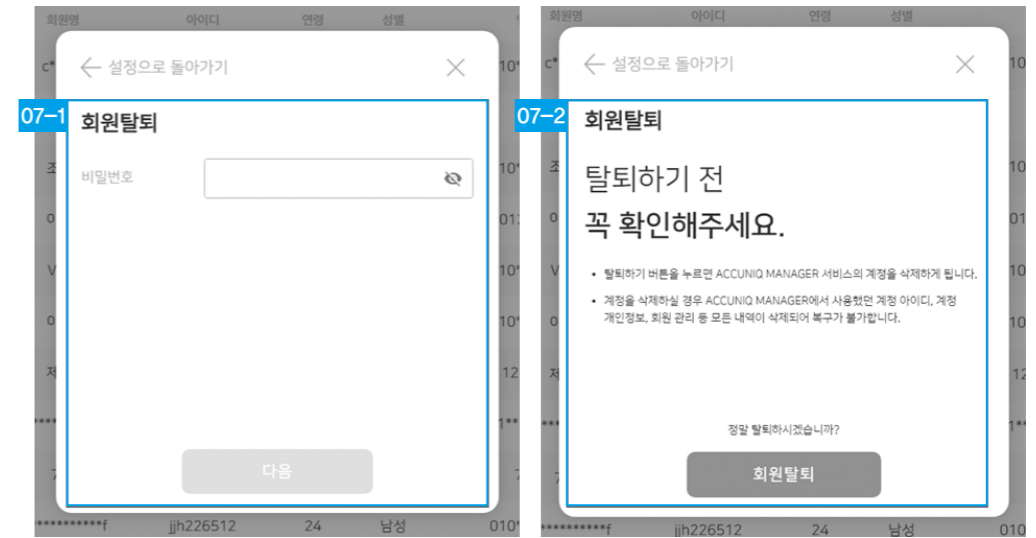

- 07-1. 회원탈퇴 현재 비밀번호를 입력하고 다음화면으로 이동합니다.
- 07-2. 회원탈퇴 확인 탈퇴 전 고지 내용을 확인하고 회원 탈퇴합니다.
  - ※ 탈퇴 시 계정 아이디, 계정, 개인정보, 회원 관리 등 모든 내역이 삭제되어 복구가 불가능합니다.

## 언어설정




1. 언어설정: 설정할 언어를 선택합니다.

# 기타

## 아큐닉 공지사항 확인


화면 좌측 상단의 확성기 아이콘을 클릭하면 ACCUNIQ Dashboard와 관련하여 ACCUNIQ에서 올린 공지사항의 목록을 표시합니다.

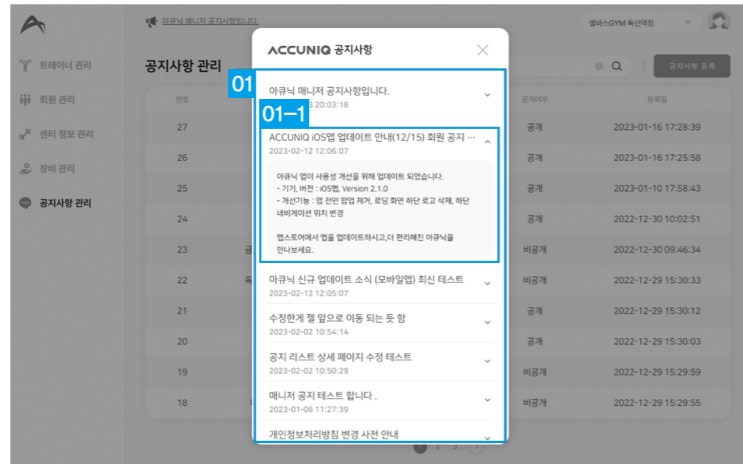

1. 시스템 공지사항: ACCUNIQ Dashboard 시스템 관련 공지사항을 확인합니다.  
01-1상세 공지사항을 클릭하여 펼치기 또는 접어서 공지사항 상세 내용을 확인합니다

## 아이디 찾기, 비밀번호 찾기

로그인 화면에서 아이디 찾기, 비밀번호 찾기를 할 수 있습니다.

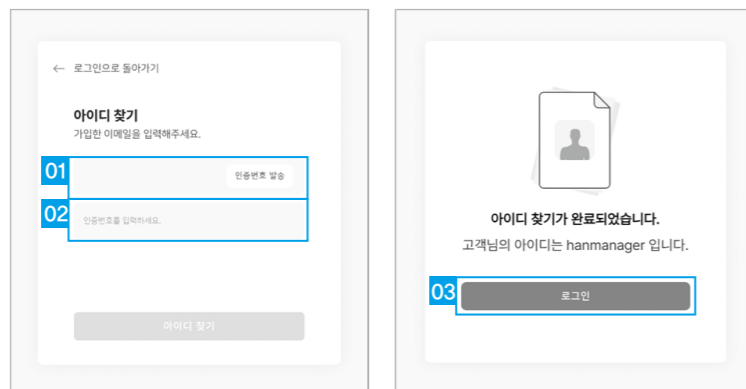

1. 이메일: 가입한 이메일을 입력하고 인증번호를 발송합니다.
2. 인증번호: 이메일로 전달받은 인증번호를 입력한 후 아이디 찾기 버튼을 선택합니다.
3. 로그인: 아이디를 확인하고 로그인 합니다.

# 자주 묻는 질문

1. 체성분 측정 데이터를 지우면 다시 복구할 수 있나요?  
체성분 측정 데이터를 지우면 다시 복구할 수 없으니 삭제 시 주의하여 주세요.
2. 회원이 아큐닉 커넥트 앱에서 '회원 센터 탈퇴'를 하면 데이터는 어떻게 되나요?  
회원이 센터 탈퇴를 할 경우 아큐닉 커넥트 매니저에서도 데이터가 삭제되어 복구가 불가능합니다. 탈퇴 시 주의가 필요합니다.
3. 계정 권한이 트레이너인 사람이 탈퇴를 하면 데이터는 어떻게 되나요?  
계정 권한이 트레이너인 사람이 탈퇴를 하면 트레이너 목록에서 삭제되며, 트레이너 아이디, 이름 등 관련 정보도 서버에서 영구히 삭제됩니다. 탈퇴 시 주의하여 주세요.
4. 계정 권한이 센터 매니저인 사람이 탈퇴를 하면 데이터는 어떻게 되나요?  
센터 매니저가 탈퇴를 해도 개별 회원의 아큐닉 커넥트 앱에 저장된 체성분 데이터는 삭제되지 않습니다. 그 이외의 모든 데이터는 서버에서 영구히 삭제됩니다. 탈퇴 시 주의하여 주세요.
5. 공지사항을 등록했는데 센터 회원이 아큐닉 커넥트에서 공지 사항을 받지 못했습니다.  
아래 사항을 확인해 주세요.
  - 센터 회원이 아큐닉 커넥트 앱의 푸시 알람을 켜두었는지 확인해주세요.
  - 센터 회원이 아큐닉 커넥트 앱을 최신 버전으로 업데이트했는지 확인해주세요.
6. 아큐닉 커넥트 매니저의 측정 결과지와 센터에서 보유하고 있는 종이 결과지가 다릅니다.  
아큐닉 커넥트 매니저는 최신의 결과지 버전을 기준으로 체성분 측정 결과를 보여줍니다. 장비의 결과지를 구입하고자 하시면, 제품 구입처로 연락주세요.
7. 아큐닉 커넥트 매니저 > 장비관리 > 장비 삭제로 장비를 삭제하면 해당 장비로 측정된 데이터는 어떻게 되나요?  
장비를 삭제하면 해당 장비로 측정된 데이터는 서버에서 영구히 삭제됩니다. 삭제 시 주의하여 주세요.
8. 장비에서 측정한 측정일자와 아큐닉 커넥트 매니저에 저장된 측정 일자가 서로 맞지 않습니다.  
체성분측정기에서 저장된 '표준시간대'가 잘못 설정된 경우 동기화가 되지 않아 측정일자가 아큐닉 커넥트 매니저와 맞지 않을 수 있습니다. '표준시간대'를 다시 설정해주세요.

### [아큐닉 장비에서 표준시간대 설정하기]

1. 장비에서 관리자 설정 > 옵션관리 > 클라우드 설정 > 표준시간대로 이동합니다.
2. '시간대확인' 버튼을 누르고 스마트폰으로 QR코드를 촬영하면 장비를 설치한 지역의 표준 시간대를 확인 할 수 있습니다.
3. 장비를 사용하고 있는 지역의 시간대(UTC: Universal Time Coordinated)을 입력 후 설정 저장을 누르면 시간대가 저장됩니다.



**(주) 셀바스헬스케어**

본사 | 대전광역시 유성구 신성로 155 Tel 042) 879-3000 Fax 042) 864-4462

서울지점 | 서울시 금천구 가산디지털1로 19 대륭테크노타운 18차 20층 Tel 02) 587-4056 Fax 02) 588-1937