

ACCUNIQ

BC 300

사용설명서

목차

목차	3	DATE TYPE	32
소개	4	THERMAL PRINT.....	32
사용자 알림	5	ID USAGE	33
경고	6	ABDOMINAL CIRCUMFERENCE.....	34
안전 관리.....	7	GUIDE.....	34
체성분 분석	9	CHILD/ADULT/AUTO.....	35
체성분 분석이란?.....	9	HEIGHT METER.....	36
비만이란?.....	9	BACKUP/RESTORE	37
체성분 분석의 필요성	9	측정 및 분석	38
비만판정의 지표.....	9	측정 시 주의사항.....	38
복부비만	10	올바른 측정자세	39
부위별 평가.....	10	발판전극 체중계에 서는 법	39
신체연령.....	10	전극 손잡이 잡는 법.....	39
각 부위의 명칭 및 기능	11	측정자세	40
본체.....	11	분석방법	40
전면부	11	대기화면	41
후면부	12	개인자료 입력 및 기본측정	41
발판부	13	측정.....	44
기기 상단의 밑면부	14	결과화면	45
키패드.....	15	결과 인쇄 및 재시작.....	45
주요 구성물	16	혈압계를 이용한 분석.....	46
옵션.....	17	USB 메모리를 이용한 데이터 저장	47
설치	19	데이터 저장	47
제품 설치.....	19	FLASH MEMORY 저장을 선택한 경우....	47
전원 연결.....	21	USB MEMORY 저장을 선택한 경우	47
외부 연결.....	22	ID 검색 (FLASH MEMORY 사용 시에만 해당)....	48
컴퓨터 연결법.....	22	데이터 삭제 (FLASH MEMORY 사용 시에만 해당) ..	48
프린터 연결법.....	23	결과 판정 기준 및 해설	49
혈압계 연결법.....	24	체성분결과지	49
써멀프린터 감열지 교체법 (옵션).....	25	소아용 결과지 (옵션).....	53
SYSTEM SETUP	26	보관 및 유지	57
종류.....	26	문제 해결	58
메뉴로 들어가기	27	에러 발생과 처치요령.....	58
‘SYSTEM SETUP’ 화면에서 초기화면으로 나오기....	27	오차 발생과 문제 해결	59
메뉴에서 ‘SYSTEM SETUP’ 화면으로 나오기	27	사용상 문제점.....	60
설정.....	28	부작용 보고 관련 문의처.....	60
DATE/TIME	28	포장 및 운송	60
VOLUME	29	기기 사양	61
PRINT	29	제품보증서	62
PRINT POSITION	30		
CLOTHES.....	31		
ABDOMINAL FATNESS	31		

소개

당사의 임피던스 체지방측정기를 구매해 주셔서 감사드립니다.

본 제품은 당사의 축적된 기술로 탄생한 접이식 체성분 분석기입니다.

본 제품은 생체전기 임피던스 측정법을 이용하여 체지방량, 제지방량, 근육량, 체수분량, 단백질량, 무기질량 등의 체성분과 체지방률, 체질량지수, 체형평가, 부위별평가, 조절가이드, 기초대사량, 복부비만, 신체연령 및 이전데이터 등 관련정보를 제공하는 기기입니다.

생체 전기 임피던스법이란 인체에 무해한 미세 전류를 보내 인체성분에 따라 다른 전기저항으로부터 체내 성분을 분석해 내는 방법으로 생활 습관병의 주원인인 비만을 진단, 예방할 뿐만 아니라 그에 따른 2차 질환을 예방하고 체성분의 변화로 파악할 수 있는 문제의 치료 효과를 알아낼 수 있도록 도와주는 분석법입니다.

당사의 임피던스 체지방측정기는 접촉전극을 이용한 4전극법으로 신체저항을 측정하며 체성분 분석에 이용하는 전극은 초기의 접촉형, 클립형을 거쳐 접촉형으로 발전해 왔습니다. 현재의 접촉전극은 손에 쥐거나 발로 밟거나 하여 신체저항을 측정합니다.

사용자 알림

사용설명서는 소비자의 제품 사용을 최대한 돕기 위해 만들어졌으므로, 제품과 함께 보관하시고 궁금한 사항이 있을 경우에 유용하게 사용하십시오.

본 사용설명서는 본 제품을 사용하는 동안 사용자와 기기의 안전을 확보하고 기기의 성능을 효율적, 안정적으로 장기간 유지하기 위하여 제작되었습니다. 사용 중 일어나는 문제점이나 언급된 지시사항에 대한 설명이 명확하지 않을 때는 즉시 이 사용설명서에 수록된 내용을 다시 읽고 숙지하신 다음, 기기를 작동 또는 사용하셔야 합니다.

사용자가 부정확한 방법으로 작동을 시도하였거나 임의 작동 또는 기계를 적절하게 보존하지 못하여 발생한 문제는 취급 부주의에 의한 것이므로 제조자는 특별한 책임을 지지 않습니다.

기기 사용 중 작동상 문제가 발생하면, 전원 버튼을 눌러 끈 다음 사용설명서에 따라 다시 작동해 보십시오. 그래도 결되지 않는 문제가 발생되면 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

특히 주의할 점에 대해서는 사용설명서 안에 있는 경고, 주의, 알림을 통하여 명시하였으니 참조하시기 바랍니다.



경고

여기에 명시하고 있는 내용은 그 경고가 소홀히 되었을 때 다음과 같은 심각한 손상이 올 수 있다는 것을 말하고 있습니다.

개인이나 장비의 심각한 손해나 손상, 개인 자산의 소실



주의

주의 사항에서 나타나고 있는 지시 사항이 무시되었을 때 다음과 같은 최소한의 손상이 일어날 수 있습니다.

개인적 손상이나 손해, 불이익 등 실질적 손해



알림

알림은 기계의 설치, 작동, 설비 유지에 도움이 되는 정보를 보여주는 것으로 위험 경고나 주의 사항과는 다른 내용입니다.

- 개인 자산이라 함은 주택, 세간, 가축, 애완동물 등을 널리 포함한 개념입니다.
- 개인이라 함은 사람의 심적, 육체적 개념은 물론 의류 등의 부착물까지도 널리 포함합니다.
- 당사는 본 사용설명서의 인쇄상의 오류, 오기에 대한 책임을 지지 않으며 언급되지 않은 사항에 대한 어떠한 결과에도 책임이 없습니다.

경고

- 본 제품을 구매하신 소비자께서는 제품을 사용하기 전에 반드시 첨부된 당사 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다. 특히 안전하게 기기를 사용하기 위해서는 '사용자 알림', '안전관리', '보관 및 유지'를 숙지하고 실천하십시오.
- 본 제품으로 측정된 결과는 전문가의 분석이 필요한 자료입니다. 소비자의 판단에 따른 투약이나 치료에 사용될 수 없으며 반드시 의사와 상의하십시오.
- 당사는 소비자 임의로 판단하여 발생한 결과에 대해서 책임지지 않습니다. 반드시 의사와 상의하십시오.



경고

1. 지금까지 임피던스 체지방측정기 사용으로 인한 안전상의 문제나 피해는 보고된 바 없습니다. 그러나 추가적인 소비자의 안전을 위하여 다음 사항을 지켜 주십시오.
 - a. 아래의 경우에는 그 위험성이 밝혀진 바 없다 하더라도 사용하지 말기를 권장합니다.
 - 심박조절기(Pace-Maker), 심세동제거기(defibrillator), 스텐트(stent: 심동맥 확장용 그물망), 심장이나 대혈관에 사용된 금속 봉합재(metal suture in the heart and greatvessel)등 체내에 이식된 금속물질 또는 체내 이식형 의료 및 전자기기를 갖고 있는 사람
 - 인공심장, 인공심폐기 등 체내에 전기신호를 송, 수신하는 의료 또는 전자 기기를 이식한 사람
 - 용액으로 채워진 카테터나 전도 가능한 용구 및 전자 기기가 심장에 연결된 사람
 - b. 다음 사람이 임피던스 체지방측정기를 이용할 경우 전기적 신호를 교란하여 위험에 처하거나 목적하는 정확한 값을 측정할 수 없습니다.
 - 여러 가지 목적의 전기 자극기를 사용하고 있는 사람
 - 측정을 목적으로 체내에 전류를 주입받거나 기기가 연결, 작동되고 있을 때
 - 심전도(ECG), 근전도(EMG), 뇌파검사(EEG) 등
 - 기타 동일한 문제가 발생할 수 있다고 의사가 판단하는 치료나 검사를 받고 있는 사람
 - c. 다음 사람은 사용하기에 앞서 의사의 자문을 받으십시오.
 - 여성용 불임 기구를 삽입하고 있는 사람
 - 임신 중인 사람
 - 미세한 전기자극에 의해서도 신체의 손상을 입을 수 있는 사람
 - 기타 전도성이 좋은 전기, 전자 기구를 사용하는 경우
2. 제조자나 기기판매 업체의 허락 없이 기기를 열거나 분해하지 마십시오.
3. 비정상적인 분석결과가 나오면 반드시 의사나 인증된 전문가의 상담을 받으십시오.



알림

기기의 결함에 의해 비정상 값이 분석되면 기기 판매업체나 A/S 센터에 연락하여 서비스를 받으십시오.

안전 관리

본제품은 국제적인 규격에 의거하여 제조되었으며 아래의 주의사항을 반드시 준수하여야만 사용자의 안전과 제품의 신뢰성이 유지될 수 있습니다.

- 1) 이 기기의 내부는 기기의 기능과 구조에 대해 교육을 받고 제조자로부터 자격을 인정 받은 전문가만이 조작 할 수 있습니다. 따라서 사용자는 어떠한 경우에도 임의로 기기의 내부를 조작하여서는 안되며 이로 인한 기기의 손상, 전기쇼크, 화재 등의 손해는 당사가 책임 지지 않습니다.
- 2) 본 제품은 최적 상태로 작동되도록 설정하여 출고되었습니다. 사용설명서에 명시된 사항들 외의 어떠한 조정장치나 스위치의 조절도 시도해서는 안됩니다. 변형을 원하시면, 당사나 지정 거래처에 서비스요청을 하십시오.
- 3) 만일 기기에서 어떤 문제점이 발생 되었다면 즉시 전원을 끄시고 당사나 지정 거래처에 연락하여 도움을 받으십시오.
- 4) 아래와 같은 환경에서는 본 기기를 사용하거나 보관하지 마십시오.
 - 주위온도가 -25℃ ~ 70℃를 벗어난 곳에서의 보관
 - 주위온도가 5℃ ~ 40℃를 벗어난 곳에서의 사용
 - 대기압이 70kPa (700mbar) 이하이거나 106kPa (1060mbar) 이상인 곳
 - 습도 15% 미만이거나 93% 이상인 곳에서의 사용, 습도 93% 이상인 곳에서의 보관
 - 기기가 수증기나 물에 노출되는 곳
 - 기기가 먼지에 노출되는 곳
 - 기기가 진한 농도의 기름 증기에 노출되는 곳
 - 기기가 소금기 있는 대기에 노출되는 곳
 - 기기가 가스나 먼지의 폭발 위험에 노출되는 곳
 - 기기가 과도한 충격이나 진동에 노출되는 곳
 - 표면의 경사각이 10°이상인 곳
 - 기기가 직사광선에 노출된 곳
- 5) 본 기기는 반드시 접지가 되어 있는 상태에서 사용하십시오. 접지를 할 때는 가스나 수도관, 피뢰침, 전화선등 전기적 문제를 야기 할 수 있는 것과 접촉되지 않도록 주의하십시오.
- 6) 전원은 반드시 당사에서 제공하는 어댑터를 사용하여 공급하시고 전선, 플러그 등 전원공급 부속품은 결함이 없고 규격에 맞는 제품을 사용하십시오.
- 7) 전원선은 반드시 주전원 스위치를 끈 다음 뽑으십시오.
- 8) 젖은 손으로 기기를 조작하지 마십시오.
- 9) 본체를 옵션 또는 주변기기와 연결하여 사용할 경우 먼저 본 장비의 전원을 끄십시오. 전원이 켜진 상태에서 전선을 연결하면 전기적 충격이 발생하여 고장의 원인이 됩니다.

- 10) 주위에 다른 전원기기가 있을 경우 의사, 간호사, 사용보조자 등 설치 사용자나 측정고객 특히 체내 이식 전류장치나 다른 의료, 전자기기를 사용하고 있는 사람은 누설전류나 전도체 표면의 전위차에 의한 감전위험이 존재합니다. 기기 뒷면의 등전위 단자와 사용실 내의 접지선을 연결하여 사용하십시오.
- 11) 이물질이 들어갔거나 특수한 환경에 노출된 기기는 반드시 점검 서비스를 받은 후 사용하십시오.
- 12) 장시간 사용하지 않았던 기기를 재사용할 때는 제품의 외관이나 기능에 이상이 없는지 확인한 후 사용하십시오.
- 13) 기타 일반 전기기기 사용에 주의해야 되는 부분과 사용설명서에 명시된 사항을 지키십시오.



주의

1. 본 기기의 전원 공급은 반드시 제조자가 제공한 전용선을 사용하십시오.
2. 본 기기를 텔레비전, 마이크로 전자파를 이용한 기기, 엑스레이 또는 강한 전기장을 발생하는 기기 근처에서 사용하시면 측정상의 장애나 분석된 값의 신뢰도가 떨어질 수 있으니 충분한 거리를 두거나 다른 장비의 전원을 끄십시오.



알림

1. 본 기기는 IEC 60601-1(의료기기의 전기, 기계적 안전기기에 관한 공통기준규격)과 IEC 60601-1-2(의료기기 전자파 적합성)의 요구사항을 충족하는 기기입니다.
2. 본 기기를 폐기처분하고자 할 때는 의료기기 규정 및 각국의 규정에 의거 폐기되어야 하므로 이에 따른 절차를 밟아 주시기 바랍니다.

체성분 분석

체성분이란?

인체의 체성분은 수분, 단백질, 지방, 무기질이 일정한 비율로 구성되어 있습니다. 체수분은 세포막을 경계로 세포 내부와 외부에 존재하며, 일정한 범위 안에서 조절 및 유지됩니다. 단백질은 수분과 함께 주로 근육층을 형성하고 있는 성분으로 사지와 내장을 비롯하여 몸 전체에 분포하며, 체지방은 신체의 지방이 없는 성분 즉, 근육량과 무기질량을 합한 것으로 체지방과 구분하여 일컫는 이름입니다. 체지방은 피하와 복부 장기에 저장되어 있으며, 분해되어 정상적인 생리 기능을 수행하는데 필요한 에너지로 사용됩니다. 그러나 과다할 경우 체내에 축적되어 비만이라는 문제를 일으키기도 합니다.

건강한 사람은 이러한 체성분이 상호간에 일정한 비율을 유지하고 있으며, 반대로 건강치 못한 사람은 비만, 영양결핍, 부종, 골다공증 등 체성분 상호간의 불균형이 일어날 수 있습니다.

비만이란?

비만을 판정하는 데는 여러 가지 방법을 사용하지만 비만의 정도를 판단하는 핵심은 체지방입니다. 일반적으로 비만은 키에 비해 체중이 많이 나가는 것이라고 알고 있지만, 엄밀한 의미에서 비만은 체지방의 비율이 과다하게 높은 상태를 말합니다.

체성분 분석의 필요성

우리 몸을 구성하는 성분이 조화와 균형을 이루고 있어야 건강한 신체를 유지할 수 있으며, 그 성분의 양과 분포의 불균형은 각종 질환과 관련이 있을 가능성을 말해 줍니다.

임피던스 체지방측정기는 인체를 구성하는 체지방을 측정하여 기본 건강상태를 파악하고 건강상의 위해 요소에 미리 대비할 수 있도록 하는 목적으로 사용되는 기기로서, 질병에 대한 예방과 치료에 응용되는 기초 검진 도구의 하나입니다.

비만판정의 지표

- 체지방률(%): 체중에 대한 체지방량의 비율입니다. 보이지 않는 비만을 찾아줍니다.
- 체질량지수(kg/m²): 체중을 신장의 제곱으로 나눈 값. 질병이환율과 깊은 관계를 가집니다.
- 비만도(%): 표준 체중을 통하여 현재 체중이 가지는 비만의 정도를 나타내는 값입니다.

복부비만

체지방은 피하에 저장되는 피하지방(Subcutaneous fat)과 복부에 저장되는 내장지방(Visceral fat)으로 분류할 수 있으며, 체지방의 비율과 함께 복부비만도 건강에 영향을 주는 중요 인자로 인정되고 있습니다. 내장지방(Visceral fat)내에서는 지방분해효소(Lipoprotein lipase)의 활성도가 잘 일어나기 때문에 내장지방은 피하지방보다 쉽게 분해되어 혈관을 통해 간으로 들어가서 혈액 내 지질의 상승이나 지방 간 등을 유발하고 고인슐린혈증, 고혈압, 심혈관계질환의 위험성을 높입니다.

내장지방은 일반적으로 체지방의 10~20%를 차지하는데 그 면적이 100cm²(남), 80cm²(여) 이상이거나 또는 피하지방과의 비율(VSR: Visceral fat/Subcutaneous fat Ratio)로 평가하여 0.4이상이면 내장비만으로 분류됩니다. 내장비만은 남자에게서는 30대 이후 증가하며 여자는 폐경기 이후 급증합니다. 여자보다 남자가 많고 나이가 들수록 증가하는 경향입니다. 또한 피하지방보다 분당 연소율이 높아 운동과 식사요법을 하면 복부비만에서 내장지방이 선택적으로 빠르게 감소하는 효과를 보입니다. WHR은 허리둘레와 엉덩이둘레의 비율로 감별하는 것이므로 체형을 판정해 준다고 볼 수 있습니다.

부위별 평가

본 제품은 오른팔, 왼팔, 오른다리, 왼다리, 몸통의 5부위에 대한 근육량과 체지방량 평가를 나타내어 줍니다. 인체가 늘 정확한 대칭을 유지하는 것은 아니기 때문에 좌우 발달이 약간씩 보이는 차이를 문제 삼기 보다는 최초 분석 값을 기준으로 근력이나 근육량 증가를 위한 운동 재활 치료 등에 의해 얼마나 목적인 바를 효율적으로, 긍정적으로 달성하느냐를 평가하는데 이용하십시오.


신체연령

피검자의 성별, 실제연령, 체성분 결과에 따라 고려된 생물학적 연령입니다. 모든 측정자의 체성분이 표준범위 내에 위치해 있더라도 모두 동일한 상태라고 가정할 수는 없습니다. 따라서 체성분 결과의 기준을 보다 세분화하여 신체연령이 고려되었으며, 이를 통해 피검자의 신체 건강 수준을 참고할 수 있습니다.

각 부위의 명칭 및 기능


본체

전면부

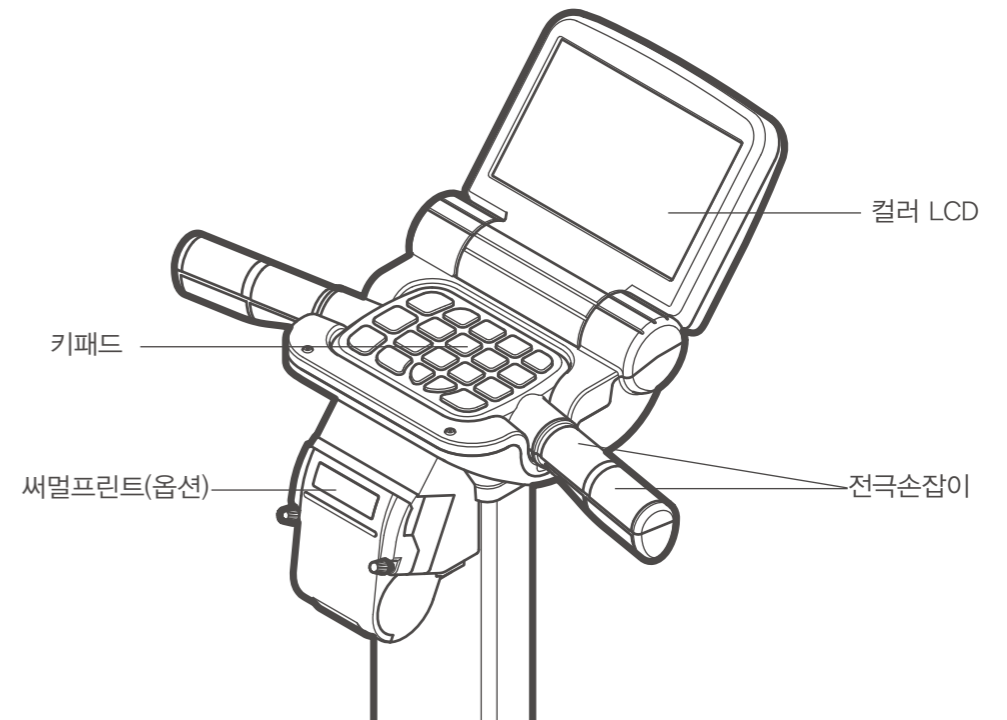


- **컬러 LCD(액정화면):** 입력된 데이터와 측정과정 및 결과를 보여주는 화면입니다.
- **전극손잡이:** 인체에 전류를 통전시키고, 인체의 임피던스를 측정합니다.
- **키패드:** ID, 신장, 성별, 나이 등 개인정보를 입력합니다.
숫자와 알파벳, '◀', '▶', 'BACK', 'NEXT', 'CE', '.', '•' 그리고 'ID', '♂/♀', '🖨️'로 이루어져 있습니다.
- **써멀프린터(옵션):** 감열지에 측정결과를 인쇄하는 프린터입니다.

후면부

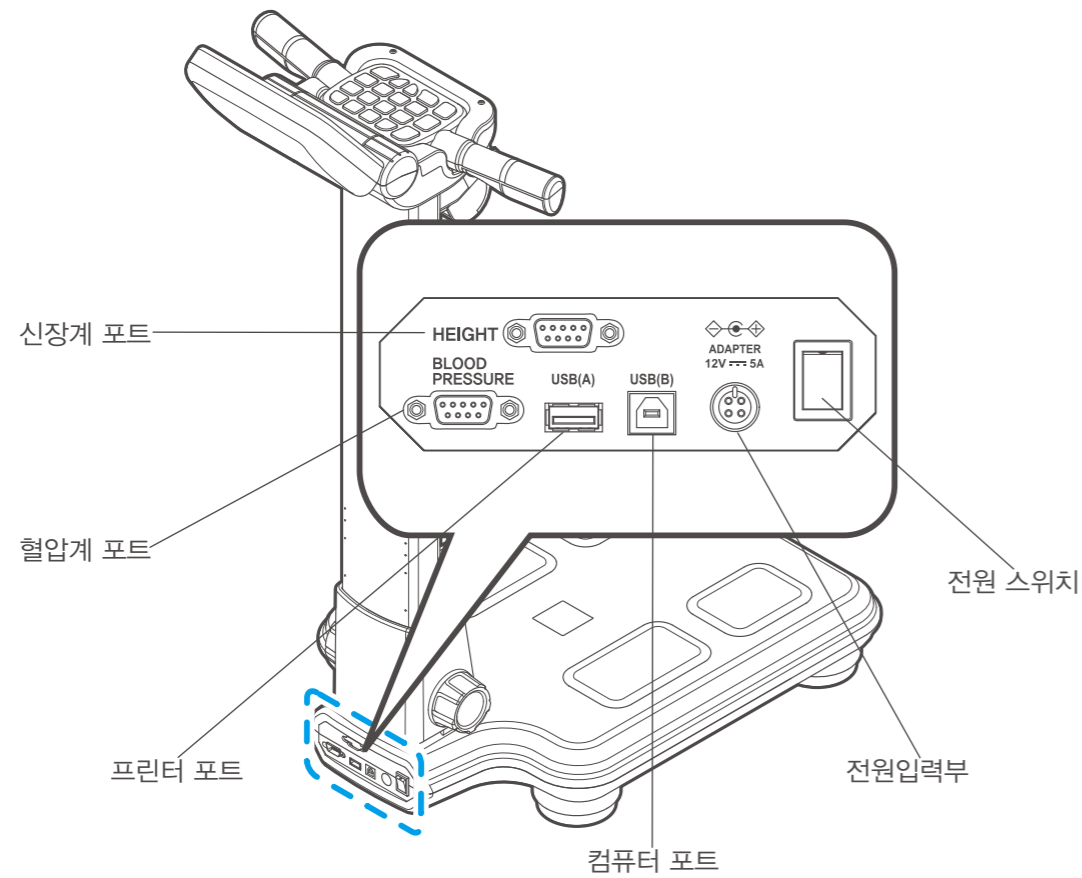


- **혈압계(RS-232C) 포트** : 혈압계(옵션)와 기기를 연결하는 단자
- **프린터 (USB (A)) 포트** : 프린터와 기기를 연결하는 단자
- **컴퓨터 (USB (B)) 포트** : 사용자의 컴퓨터와 기기를 연결하는 단자
- **전원 입력부(ADAPTER)** : 어댑터 연결
- **전원 스위치** : 전원을 끄거나 켜는 스위치
- **신장계 포트** : 신장계를 옵션으로 선택할 경우 신장계가 연결됩니다.

발판부

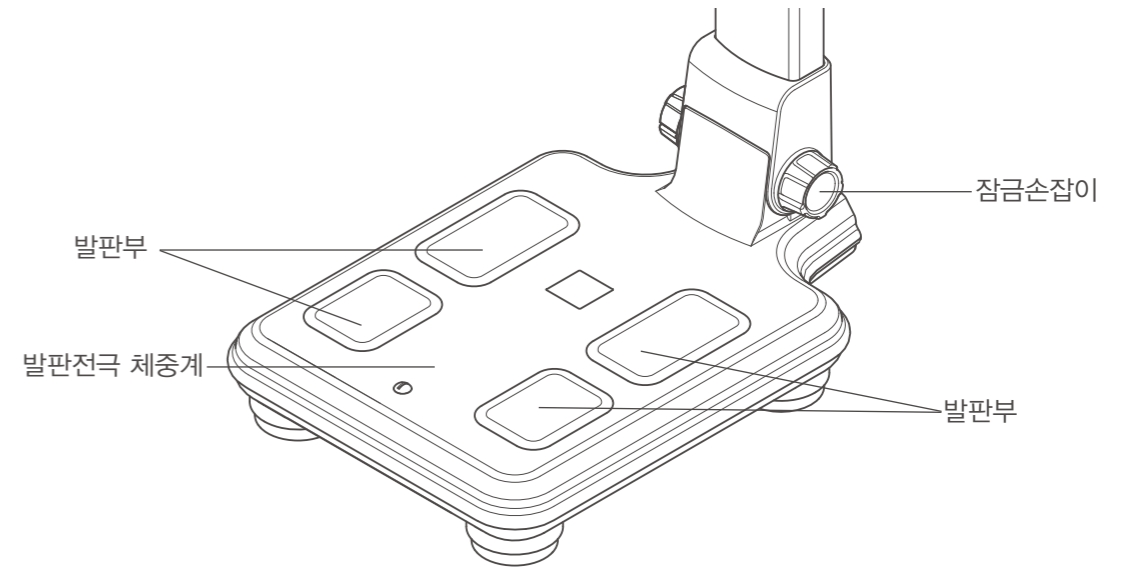


- **잠금손잡이** : 이동이 필요할 경우 반시계 방향으로 돌려 본체를 접을 수 있습니다. 이 경우, 손잡이를 풀기 전에 다른 한 손으로 몸체부를 지지해 주시기 바랍니다.
- **발판전극 체중계** : 발판전극이 부착된 체중계입니다. 체중을 측정합니다.
- **발판전극** : 피검자의 발 측정 부위가 닿는 전극입니다. 신체 임피던스를 측정합니다.

기기 상단의 밑면부

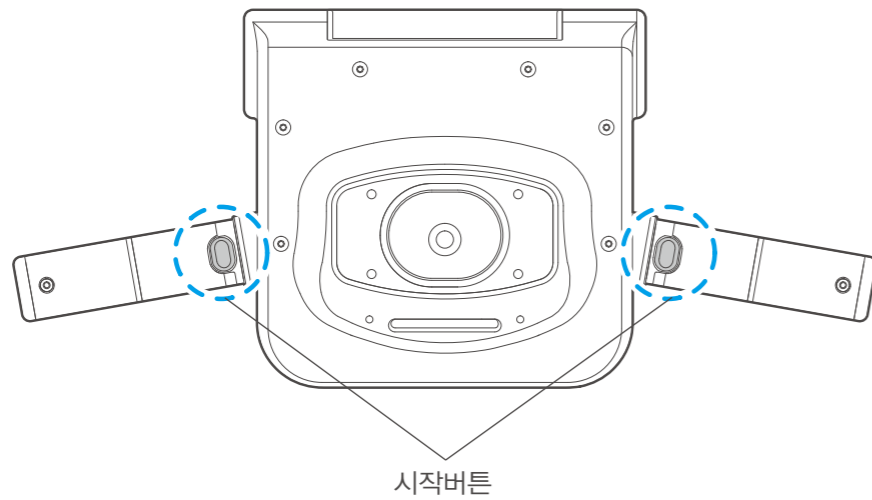

- **시작버튼** : 데이터 입력 후 눌러서 체성분 측정을 시작하는 측정시작 버튼입니다.

키패드

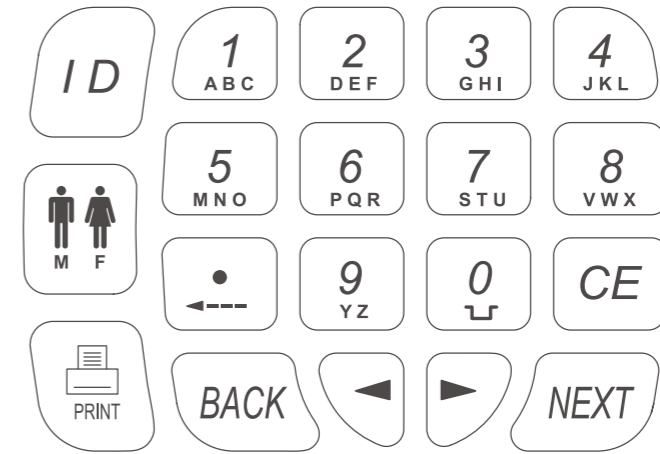


- **ID 버튼** : 초기화면에서 누르면 ID 검색과 검색된 ID의 최근 결과화면을 볼 수 있고, PRINT 버튼을 눌러인쇄 가능합니다.
- **M F 버튼** : 성별 선택 시 사용합니다.
- **PRINT 버튼** : 측정결과를 출력할 때 사용합니다.
- **숫자 및 영문버튼** : ID 입력 시 사용합니다.
(예를 들어 숫자버튼 "1"을 순차적으로 누르면 1→A→B→C 순으로 입력)
- **. 버튼** : ID 입력 시에는 한 글자 지우기로 사용되고, 신장 입력 시에는 . 을 입력할 때 사용합니다.
- **0 버튼** : ID 입력 시에는 0과 띄어쓰기로 사용되고, 나이, 신장 입력 시에는 숫자 0을 입력할 때 사용합니다.
- **CE 버튼** : 입력한 ID 또는 입력 데이터를 모두 지울 때 사용합니다.



알림

- 사용 후 항상 그림과 같이 헤드를 원위치에 놓아주십시오.
- 정확한 측정을 위해서는 전원을 켜고, 체중측정 후 헤드부를 들어 동작 하셔야 합니다.

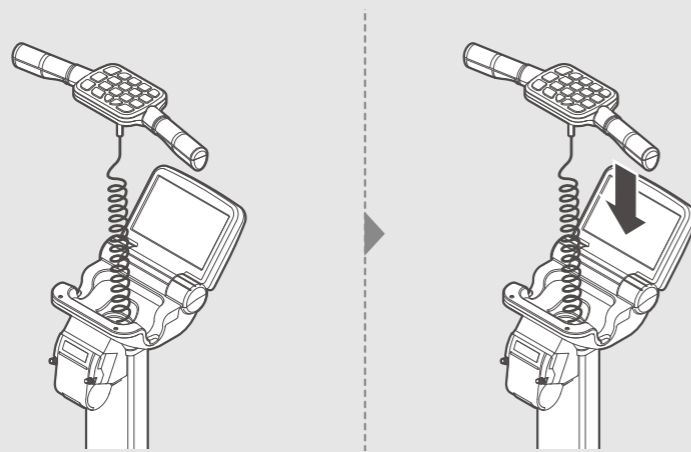


주요구성물

본 제품의 기본 구성은 다음과 같습니다.

- ① 본체 1대
- ③ 전원케이블 및 어댑터
- ⑤ 체성분관리 프로그램
- ⑦ 프린터 카트

- ② 사용설명서
- ④ USB 케이블
- ⑥ USB 프린터


① 본체

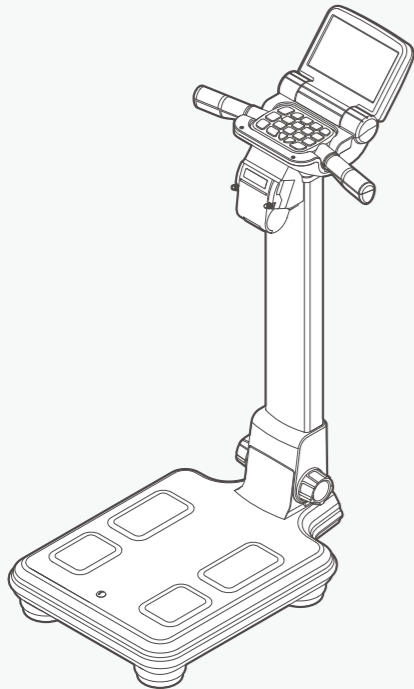


② 사용설명서




⑤ 체성분 관리 프로그램

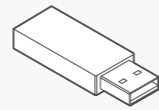

③ 전원케이블 및 어댑터

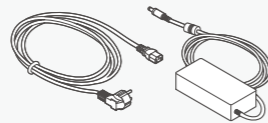


⑥ USB 프린터

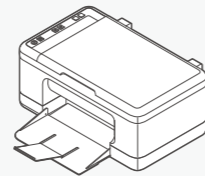

④ USB 케이블



⑦ 프린터 카트

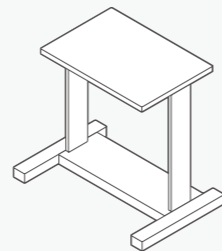


- ※ 구성물들의 외관 및 사양은 품질개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 프린터 및 프린터 카트의 외관 및 사양은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 사용설명서는 인쇄책자 또는 USB로 제공 될 수 있습니다.

옵션


1. 전문상담 프로그램

간편하게 체계적으로 체성분을 관리할 수 있는 프로그램입니다. 체지방 측정결과를 깊이 있고 알기 쉽게 평가, 해석해 주며 일목요연하고 핵심적인 내용만을 정선하여 체성분을 조절할 수 있도록 구성하여 실용성이 높습니다.

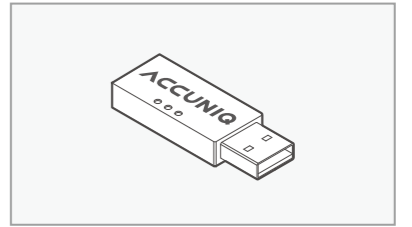


2. 전자동 혈압계

혈압을 측정하는 당사의 전자동 병원용 혈압계를 연결하시면 혈압과 비만, 체성분과의 연계성 안에서 혈압을 관리할 수 있으며 기왕력이 있는 고혈압 환자의 체중조절을 통한 관리를 효율적으로 할 수 있습니다.

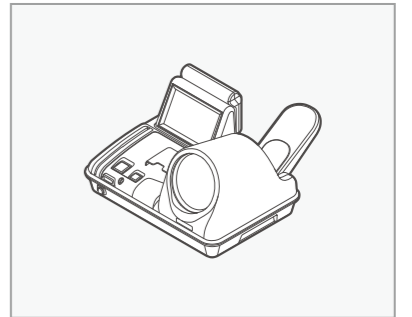


3. 혈압계 카트

혈압계 카트가 준비되어 있습니다. 필요한 경우 지정 대리점에 연락 주시고 조립 방법은 구매할 때 제공되는 조립도를 참조하십시오.

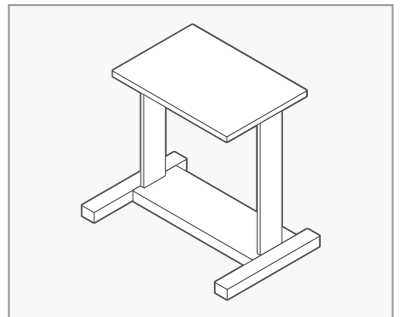


4. 소아용 결과지

소아용 결과지는 소아성장곡선을 통해 체중, 신장, BMI 백분위의 성장 상태를 쉽게 표시한 결과지입니다.

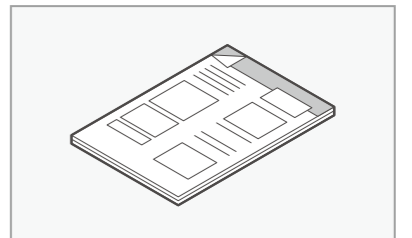


6. 써멀프린터

써멀프린터를 통한 신속하고 간편한 인쇄가 가능합니다.

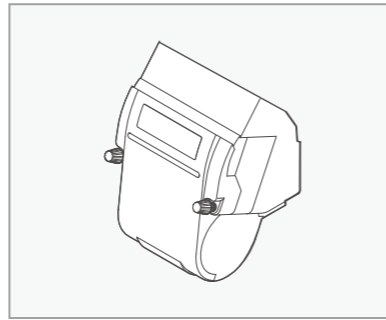


7. 감열지

출력결과를 간편하고 알기 쉽게 표시해 줍니다.

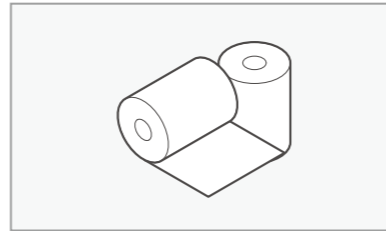

8. 초음파신장계

신장계를 연결하여 정확한 신장을 측정할 수 있습니다.
신장계 연결법 및 조립방법은 조립설명서를 참고하십시오.

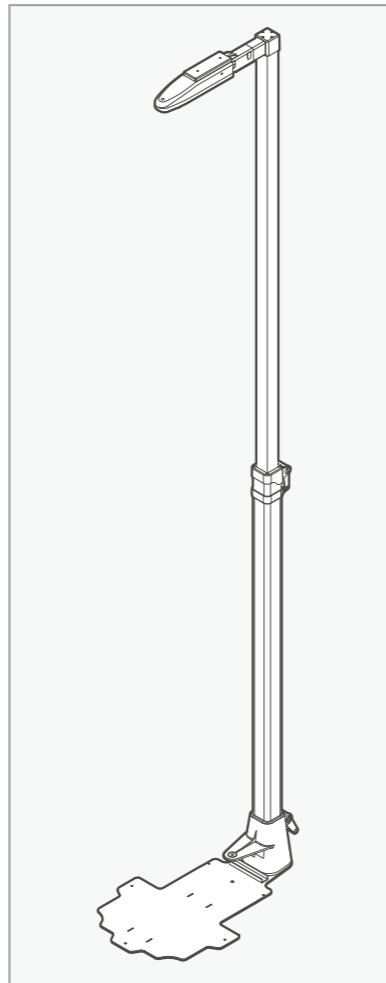


설치


제품 설치

본 제품은 접이식 체성분 분석기로 그림과 같이 이동이 용이하도록 가방에 들어 있습니다.


1) 가방 상단에 붙어있는 드라이버를 사용하여 가방 주변의 나사를 풉니다.

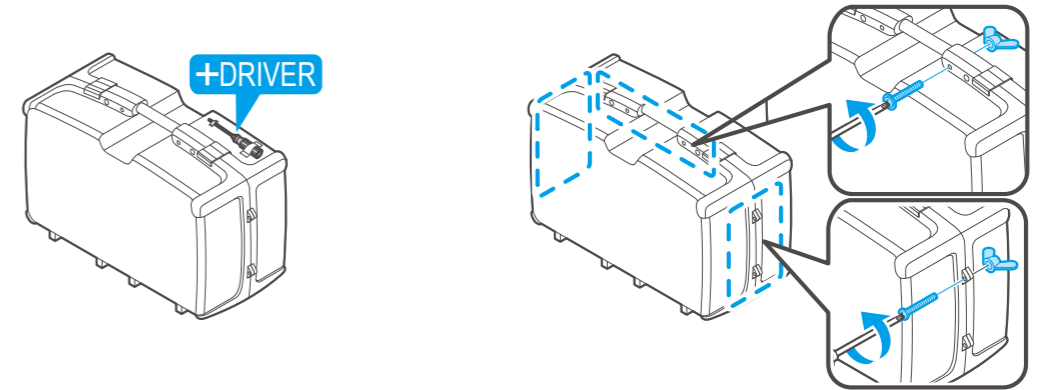


2) 'TOP' 부분의 화살표가 위로 오도록 하여 가방을 바닥에 놓고, 손잡이 양쪽의 잠금장치를 풀어 가방을 엽니다.

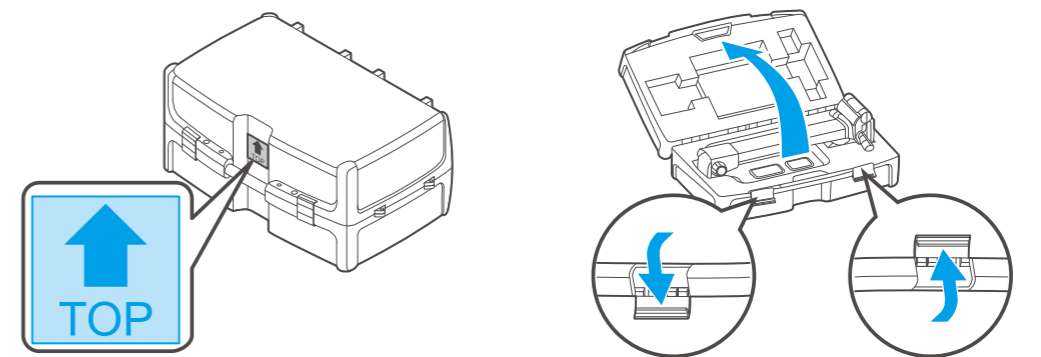


3) 제품의 발판부 양쪽에 손을 넣어 두 손으로 잡고 제품을 꺼냅니다.

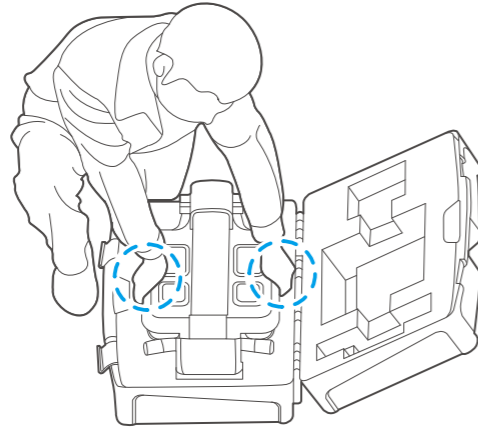

4) 가방에서 꺼낸 제품을 평평한 바닥에 놓고, 한 손으로 몸체부를 세우고 나머지 한 손으로 잠금손잡이를 시계방향으로 돌려 고정 시키십시오. 손을 바꾸어 나머지 방향의 잠금손잡이도 시계방향으로 돌려 완전히 고정 시킵니다.

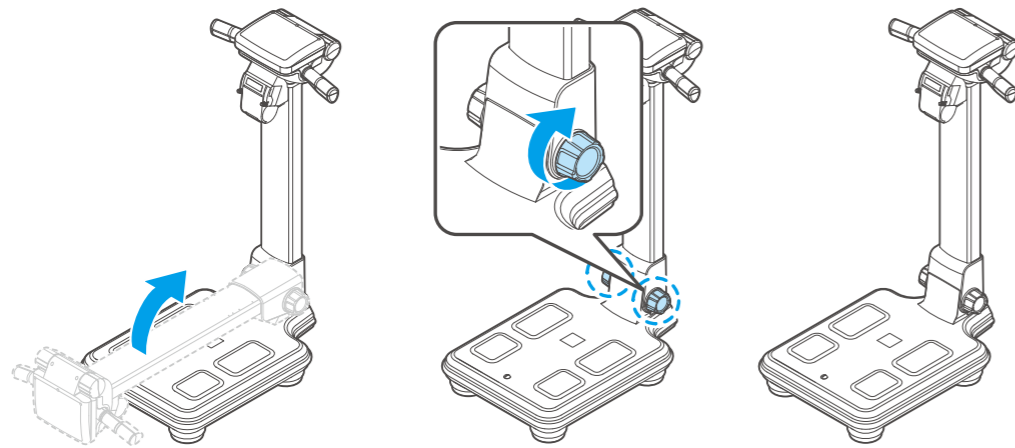


5) LCD를 열어 LCD 각도를 조절한 후 전원을 연결합니다.

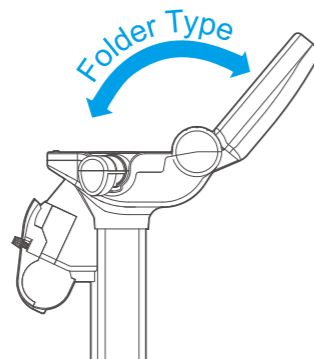

전원 연결

본 기기의 후면부에 설치되어 있는 전원입력부에 당사에서 제공하는 어댑터를 연결합니다.

전선 연결 후 전원 입력부 우측에 설치된 전원 스위치를 켭니다.

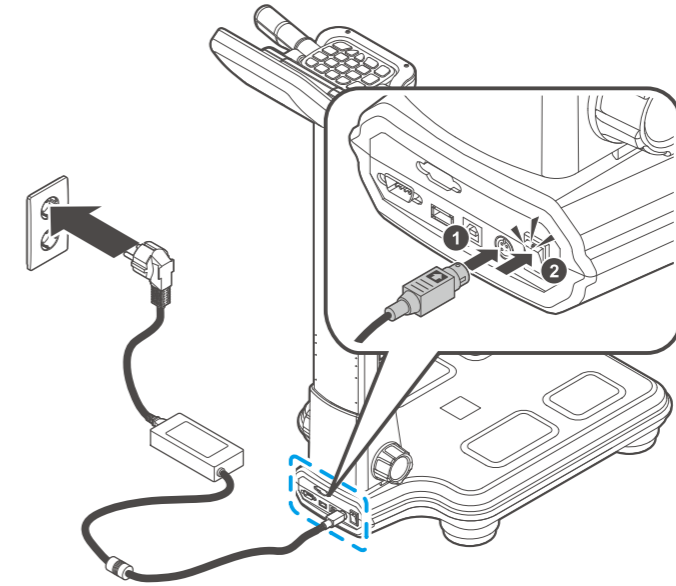


주의

1. 본 기기와 주변기기의 연결은 반드시 전원이 꺼진 상태에서 하셔야 합니다. (기기에 전기적 충격이 가해져 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.)
2. 본 기기와 주변기기가 연결된 상태에서의 전원공급의 순서는 주변기기부터 해야 하며 전원 차단은 반대로 본 기기부터 해야만 기기의 성능과 안전이 유지됩니다.
3. 전원공급은 반드시 당사에서 제공하는 어댑터와 케이블을 사용하십시오.
4. 전원을 껐다 켤 때 체중계 자동 캘리브레이션이 진행됩니다. 체중계 자동 조절이 진행되는 동안 발판 위에 발이나 손 또는 물건 등을 올려놓지 마십시오. 체중계의 영점이 틀어지게 됩니다.
5. 기기는 표면 경사각 10° 미만인 평평한 바닥에 설치하십시오. 바닥이 고르지 않은 곳에서 사용 시 제품이 흔들릴 수 있습니다.
6. 제품이 흔들려 체중 값이 맞지 않을 경우, 본체의 전원을 껐다 켜십시오.



주의


어댑터를 연결할 때는 오른쪽 그림과 같이 어댑터 연결부의 화살표가 위로 오도록 하여 본체 후면의 전원 입력부에 정확히 연결해 주십시오. 잘못된 연결은 화재의 원인이 될 수 있습니다.

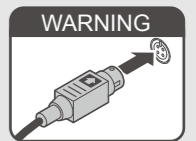

외부 연결

컴퓨터 연결법


기기 후면부에 있는 USB(B) 단자에 USB 케이블을 이용하여 컴퓨터 USB 단자와 연결합니다.

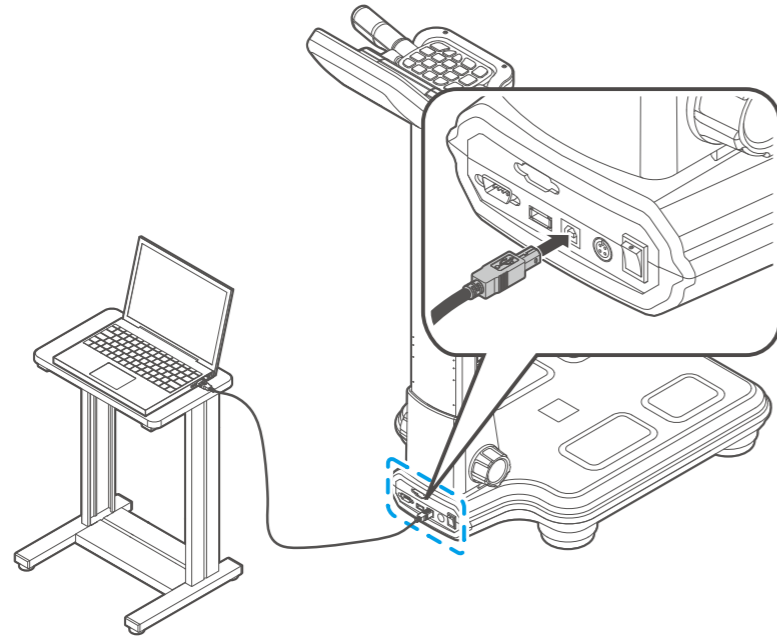

프린터 연결법


1) 기기-프린터를 직접 연결하는 방법

본 기기 후면부에 있는 USB(A) 단자에 A4 프린터를 프린터케이블로 연결합니다.

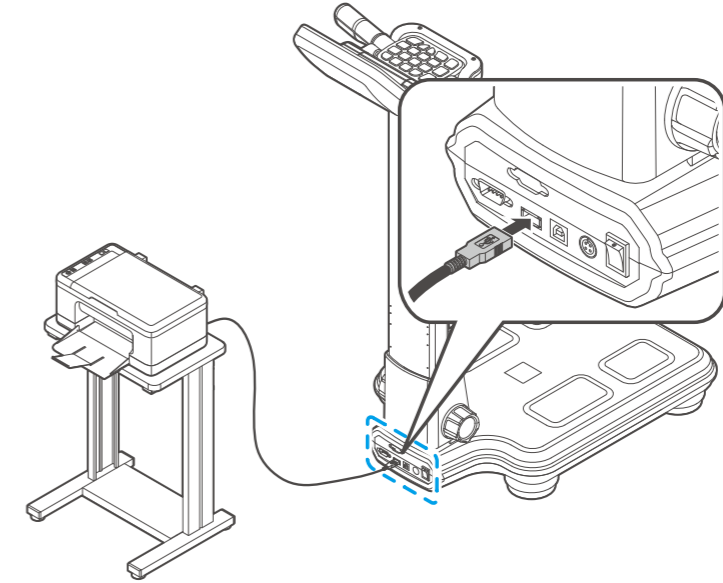

2) 기기-컴퓨터-프린터를 연결하는 방법

A4프린터를 컴퓨터에 연결하여 측정 결과를 보고자 할 경우, 본 기기 후면부에 있는 USB(B) 단자에 USB케이블을 이용하여 컴퓨터에 연결한 다음, 당사에서 제공하는 A4프린터를 프린터 케이블로 컴퓨터에 연결하면 분석 결과를 출력할 수 있습니다.

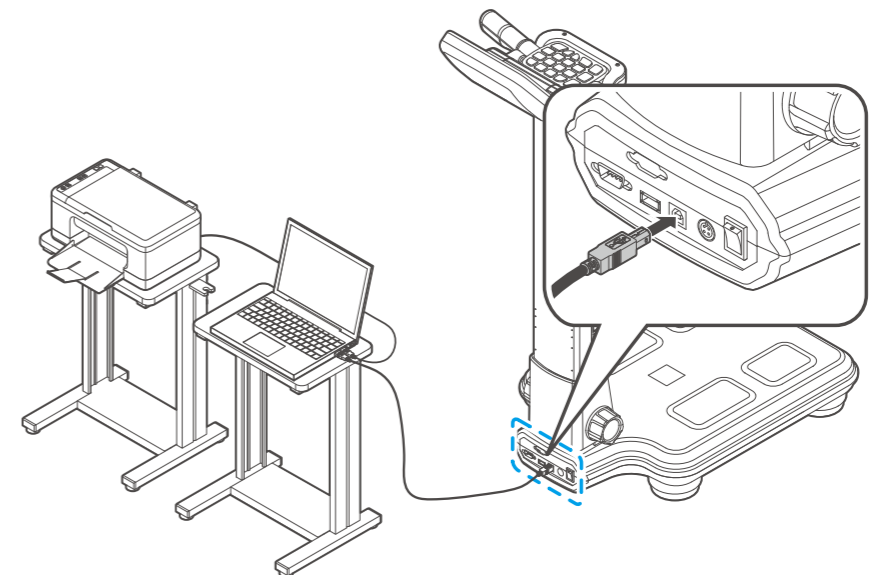


알림

1. 체성분관리 소프트웨어를 이용하여 고객의 자료를 저장하고 검색하고자 할 때는 본 프로그램이 설치된 컴퓨터를 연결하여야 하며, 이 때는 컴퓨터를 통하여 인쇄할 수 있습니다.
2. 전문상담 소프트웨어를 선택하시면 체지방 측정결과를 알기 쉽게 평가, 해석해 주며 일목 요연하고 핵심적인 내용의 구성으로 체성분 조절을 효과적으로 하실 수 있습니다.
3. 소프트웨어의 설치 및 사용 방법은 각 프로그램에 내장된 사용설명서를 참고하십시오.

혈압계 연결법

본 기기는 당사의 전자동 혈압계를 옵션으로 연결할 수 있습니다. 본 기기의 후면부에 있는 혈압계 (RS-232C) 단자와 혈압계를 당사에서 제공하는 혈압계 케이블로 연결합니다.

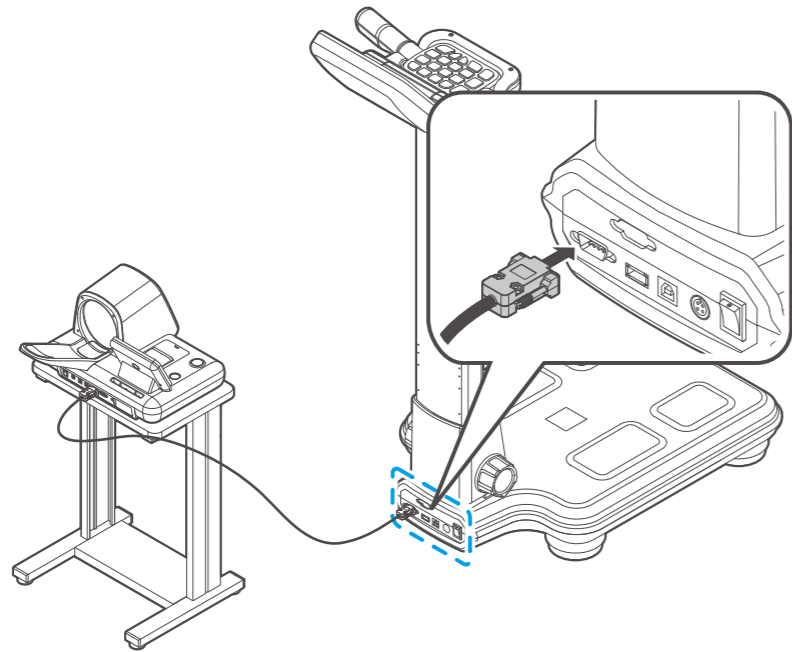


알림

혈압계와 연결하는 RS-232C 통신 케이블은 반드시 당사에서 제공하는 전용케이블을 사용하십시오.

써멀프린터 감열지 교체법(옵션)

감열지 교환은 전원이 켜진 상태에서 진행됩니다.

- 1) 그림과 같이 써멀프린터 고정나사를 그림과 같이 시계반대방향으로 돌려 프린터커버를 엽니다.
- 2) 써멀프린터에 삽입된 보호용 감열지를 화살표 방향으로 천천히 잡아당겨 제거합니다.
- 3) 그림과 같이 감열지 끝단을 프린터 투입구 방향으로 살짝 밀어 넣으면 감열지가 출력되고 자동으로 종이가 잘립니다.
- 4) 프린터 커버를 닫고 고정나사를 시계방향으로 돌려 프린터커버를 고정합니다.

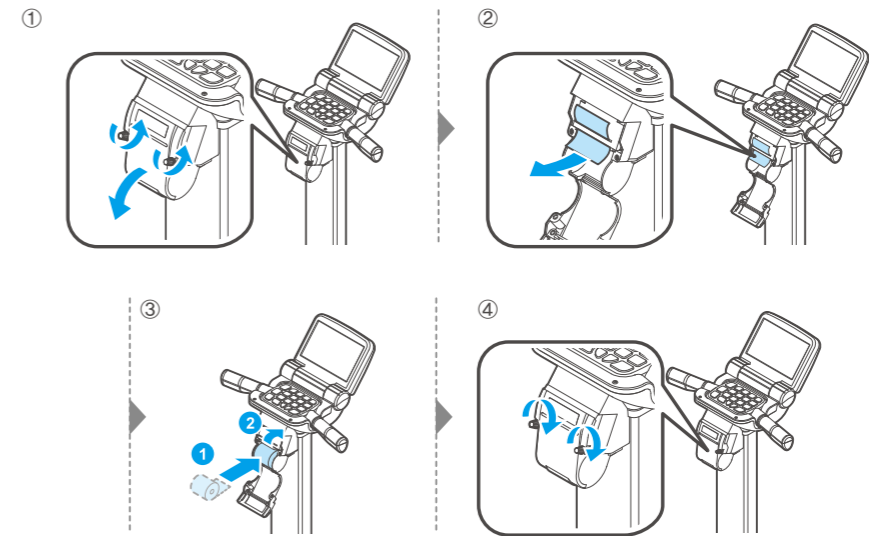



[써멀프린터 FEED/CUT 기능]

• FEED기능

초기화면에서 ‘0’ 버튼 5회 누르고, ‘’ 버튼을 누르면 감열지가 출력됩니다.

• CUT 기능

초기화면에서 ‘’ 버튼 5회 누르고, ‘’ 버튼을 누르면 감열지가 잘립니다.

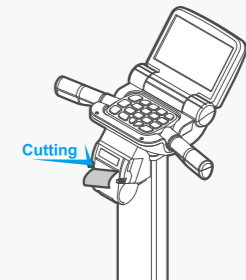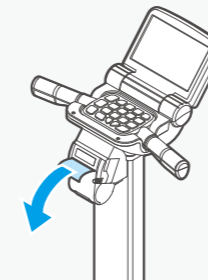

알림

감열지 인쇄 중에 종이를 당기지 마십시오. 인쇄가 완료되면 자동으로 종이가 잘립니다. 인쇄 중 기기 작동은 제품 고장의 원인이 됩니다.

SYSTEM SETUP


기기의 작동 환경을 조절하기 위하여 'SYSTEM SETUP'이 내장되어 있어 사용자가 기기 환경을 설정할 수 있습니다.

'SYSTEM SETUP' 화면으로 들어가기

초기화면에서 '◀→1→2→3→4→▶'을 순차적으로 누르면 'SYSTEM SETUP' 화면으로 들어갑니다.

종류

설정 메뉴는 아이콘으로 되어 있습니다. 각 아이콘의 기능은 아래와 같습니다.

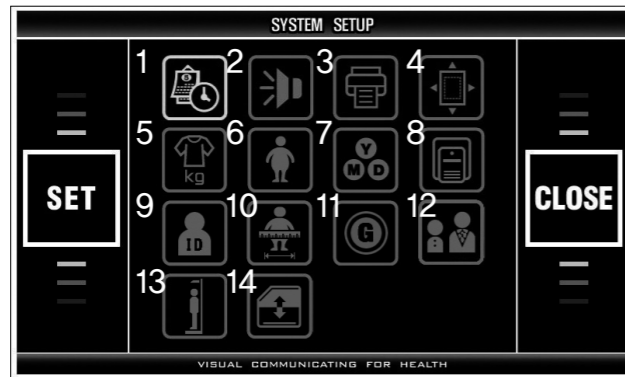

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1) DATE/TIME(날짜/시간) | 8) THERMAL PRINT(써멀프린터-옵션) |
| 2) VOLUME(음량) | 9) ID USAGE(ID 사용 설정) |
| 3) PRINT(인쇄) | 10) ABDOMINAL CIRCUMFERENCE(복부둘레 설정) |
| 4) PRINT POSITION(인쇄위치) | 11) GUIDE(가이드 설정) |
| 5) CLOTHES(옷무게) | 12) CHILD/ADULT/AUTO(결과지양식 선택) |
| 6) ABDOMINAL FATNESS(복부비만) | 13) HEIGHT METER(신장계-옵션) |
| 7) DATE TYPE(날짜유형) | 14) BACKUP/RESTORE(백업/복원) |

메뉴로 들어가기

키패드의 '▶'을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 'BACK' 버튼을 누릅니다.

(시스템설정에서 키패드의 BACK 버튼은 'SET' 버튼의 역할을 하고, NEXT 버튼은 'CLOSE' 버튼의 역할을 합니다.)




'SYSTEM SETUP' 화면에서 초기화면으로 나오기

시스템설정 화면에서 키패드의 'NEXT' 버튼을 누릅니다.



메뉴에서 'SYSTEM SETUP' 화면으로 나오기


각각의 선택 메뉴 화면에서 'NEXT' 버튼을 누르면 'SYSTEM SETUP' 화면으로 나가며, 'SYSTEM SETUP' 화면의 'NEXT' 버튼을 누르면 기기의 초기 화면으로 나갑니다.

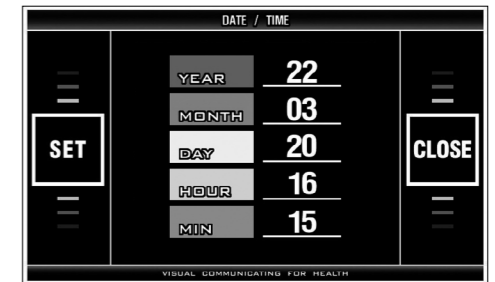

설정

DATE/TIME

날짜 및 시간(년, 월, 일, 시간, 분)을 설정합니다.

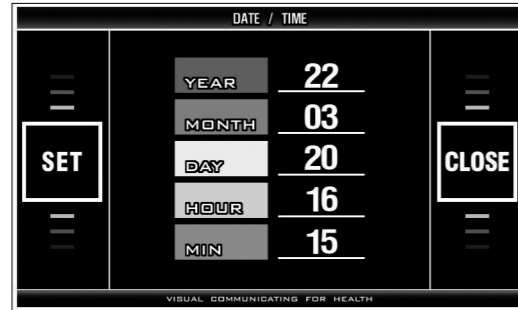

- 기본 설정: 2000년 01월 01일 12시 01분
- 키패드의 숫자버튼 “1”을 눌러 ‘YEAR’을 선택하고 ‘◀’, ‘▶’ 버튼을 이용하여 숫자를 입력하시면 됩니다. 키패드의 숫자 “2”를 누르면 ‘MONTH’가 깜박이며 커서가 이동합니다. ‘YEAR’과 동일한 방법으로 숫자를 입력하시면 됩니다.
- 숫자버튼 “3”, “4”, “5”를 이용하여 ‘DAY’, ‘HOUR’, ‘MIN’을 각각 선택하고 ‘YEAR’과 동일한 방법으로 숫자를 입력하시면 됩니다.
- 설정이 끝나면 ‘BACK’ 버튼을 눌러 설정을 완료하고 ‘NEXT’ 버튼을 눌러 ‘SYSTEM SETUP’ 화면으로 나갑니다.




알림

1. 설정 중간에 ‘BACK’ 버튼을 누르면 그 때까지 설정한 내용이 기기에 저장되고 ‘NEXT’ 버튼을 누르면 ‘SYSTEM SETUP’ 화면으로 나가게 됩니다. 저장하지 않은 상태에서 ‘NEXT’ 버튼을 누르면 원래 저장되었던 날짜가 유지되면서 ‘SYSTEM SETUP’ 화면으로 나가게 됩니다.
2. 체성분관리 프로그램을 이용하여 데이터를 관리하는 경우, 기기에 설정된 ‘날짜/시간’이 측정 시에 측정 날짜로 자동 입력됩니다.

VOLUME


기기의 안내 메시지의 음량을 조절합니다.

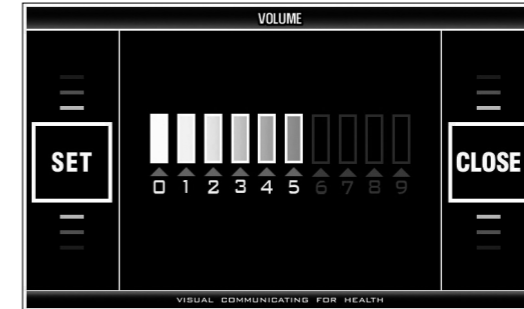

- 조절범위: 0~9
- 기본설정: 4
- ‘▶’ (VOLUME)을 선택하여 메뉴로 들어갑니다.
- 키패드의 ‘◀’, ‘▶’ 버튼을 눌러 음량을 조절합니다.
- ‘BACK’ 버튼을 눌러 설정을 완료하고 ‘NEXT’ 버튼을 눌러 ‘SYSTEM SETUP’ 메인 화면으로 나갑니다.

PRINT


프린터 출력방식을 AUTO(자동), MANUAL(수동) 또는 OFF(꺼짐)로 설정합니다.

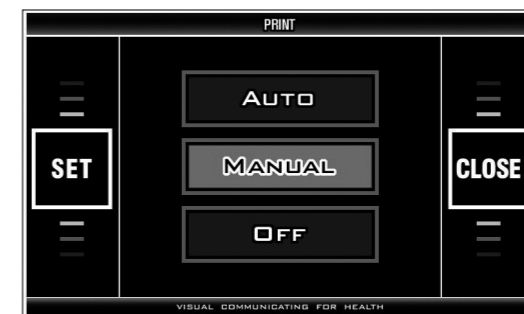

- 기본설정: MANUAL
- ‘▶’ (PRINT)를 선택하여 메뉴로 들어갑니다.
- 키패드의 ‘◀’, ‘▶’ 버튼을 눌러 출력 방식을 설정합니다.
- ‘BACK’ 버튼을 눌러 설정을 완료하고 ‘NEXT’ 버튼을 눌러 ‘SYSTEM SETUP’ 메인 화면으로 나갑니다.

PRINT POSITION

인쇄위치를 전용지에 맞도록 상-하, 좌-우로 조절할 수 있습니다.

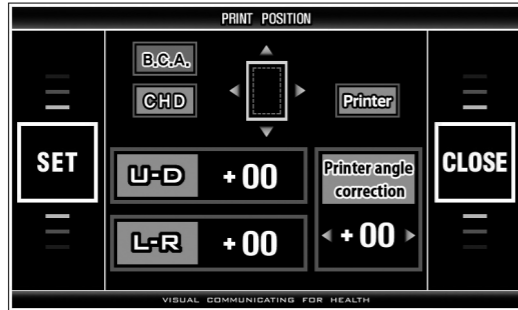

- 조절범위: U-D(상하), L-R(좌우) 각각 '-99~+99', Printer Angle Correction '-10~+10'
- 기본설정: U-D : +00, L-R:+00, Printer Angle Correction : +00
- '📄' (PRINT POSITION)을 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 기본제공 BCA 결과지와 옵션으로 제공되는 소아용 결과지의 인쇄위치를 각각 설정합니다.
- 키패드의 숫자버튼 "1"을 눌러 "BCA"를 선택한 후 숫자버튼 "3"을 눌러 'U-D'을 선택하고 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 인쇄위치를 설정합니다.
- 숫자버튼 "4"를 눌러 'L-R'을 선택하고 같은 방법으로 위치를 조절합니다.
- 숫자버튼 "2"를 누르면 소아용결과지 인쇄위치를 조절할 수 있습니다.
- 프린터용지가 출력시 좌-우기울기가 틀어지면 숫자버튼 "5"를 눌러 '◀', '▶'버튼을 이용하여 인쇄 기울기를 조절 할 수 있습니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.



알림

1. U-D (상하): '-'는 위쪽으로, '+'는 아래쪽으로 이동합니다.
L-R (좌우): '-'는 왼쪽으로, '+'는 오른쪽으로 이동합니다.
Printer Angle Correctino: '-'는 시계반대방향으로, '+'는 시계방향으로 이동합니다.
2. U-D, L-R는 체성분 결과지와 소아용결과지(옵션)를 각각 설정합니다.
Printer Angle Correction은 모든 결과지에 동일하게 설정됩니다.
"BCA"를 누르고 체성분결과지 인쇄위치를 설정 후 'BACK' 버튼을 눌러 저장하고, "CHD"를 눌러 소아용결과지 인쇄위치를 설정 후 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.
3. 시험인쇄
"BCA", "CHD" 결과지 위치를 각각 설정하고 "PRINT" 버튼을 누르면 시험인쇄가 가능합니다. 전용지의 인쇄위치 조절 시 사용하십시오.

CLOTHES


피검자가 착용한 옷무게를 보정합니다.



- 조절범위: 0 ~ -3.0kg
- 기본설정: +0.0kg
- '👕' (CLOTHES)를 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 눌러 옷무게를 설정합니다.
한번 누를 때 마다 0.1kg 단위로 변화합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.
현재 측정 체중에서 설정한 옷무게 만큼 보정시킨 체중이 분석에 이용됩니다.

ABDOMINAL FATNESS


18세미만 복부비만분석결과와의on,off 설정 기능 입니다.

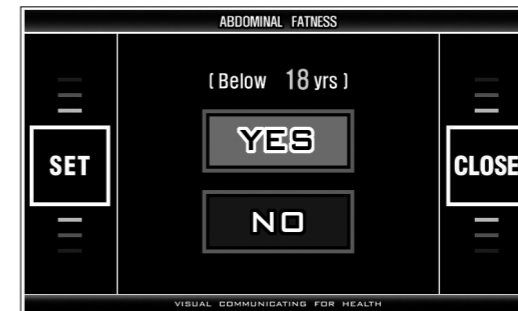

- 기본설정: YES
- '👤' (ABDOMINAL FATNESS)를 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 'YES' 또는 'NO'를 선택합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 화면으로 나갑니다.
- 'YES'를 선택하시면 모든 연령대에서 복부비만 결과를 나타내고, 'NO'를 선택하시면 18세 미만에서는 복부비만 결과가 나타나지 않습니다.

DATE TYPE


결과지의 날짜 유형을 선택합니다.

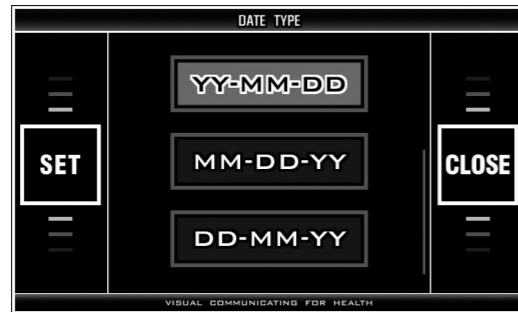

- 기본설정: YY/MM/DD(년/월/일)
- '📅' (DATE TYPE)을 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 원하는 날짜유형을 선택합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.

THERMAL PRINT


써멀프린트 출력방식을 선택합니다. (써멀프린트는 옵션사항입니다.)

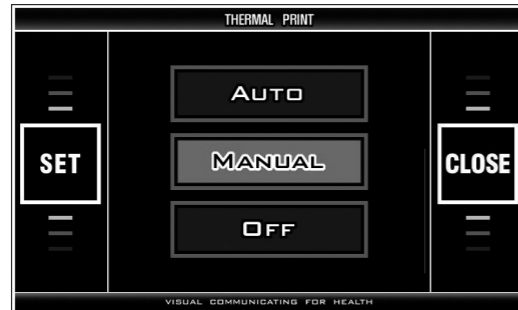

- 기본설정: MANUAL
- '🖨️' (THERMAL PRINT)를 선택하여 메뉴화면으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 'AUTO(자동)', 'MANUAL(수동)', 'OFF(꺼짐)' 중 출력방식을 선택합니다.
- AUTO로 설정하는 경우 체성분 측정 후 자동으로 출력되고, MANUAL의 경우 Print 버튼을 누르면 출력됩니다. (OFF면 출력되지 않음)
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.

ID USAGE

ID사용여부 및 데이터 저장 장치를 선택합니다.

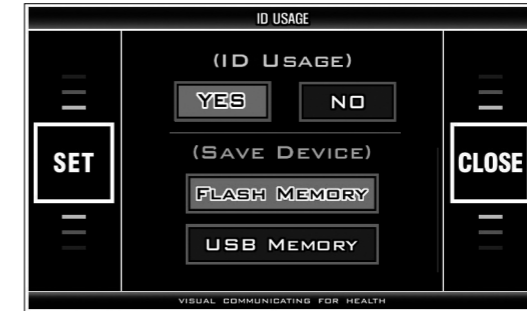

- 기본설정 : ID USAGE(ID사용) : NO, SAVE DEVICE(저장매체) : FLASH MEMORY
- '👤' (ID USAGE)를 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 숫자버튼 "1"을 눌러서 ID USAGE를 선택합니다.
키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 ID사용여부를 선택합니다. (최초 메뉴 진입시 ID USAGE선택 됩니다.)
- 숫자버튼 "2"을 눌러서 SAVE DEVICE를 선택합니다.
키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 FLASH MEMORY, USB MEMORY를 선택합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.



알림

1. ID 사용여부를 'YES'로 선택하시면 측정 시 ID를 입력하는 화면이 표시되어 ID 입력이 가능하고, 측정완료 시 측정 결과가 저장되고, 마지막 저장된 결과를 ID로 검색 할 수 있습니다. 'NO'를 선택하시면 측정 시 ID를 입력 하는 화면 없이 사용자의 기본정보만 입력하고 사용자 ID가 없으므로 측정결과를 불러올수 없습니다.
2. FLASH MEMORY는 본체 자체의 플래쉬 메모리에 저장되고, USB MEMORY는 이동식 USB 메모리에 저장됩니다.




알림

1. FLASH MEMORY 사용 시
A4프린터 및 써멀 프린터에서 결과지를 인쇄할 수 있습니다.
2. USB MEMORY 사용시
써멀 프린터에서만 결과지를 인쇄할 수 있습니다.
(USB(A) 포트에 USB MEMORY를 연결해야 하기 때문)
3. USB 메모리 사용시 FAT32 파일 시스템을 사용하는 USB 메모리를 사용해야 합니다.

ABDOMINAL CIRCUMFERENCE


복부둘레 표시 여부를 선택합니다.

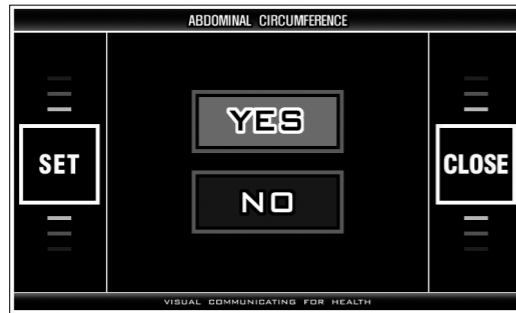

- 기본 설정: NO
- 'A' (ABDOMINAL CIRCUMFERENCE)를 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 복부둘레 표시여부를 선택합니다.
'YES'를 선택하시면 결과지에 복부둘레 결과를 표시합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.

GUIDE


가이드 화면 표시 여부를 선택합니다.

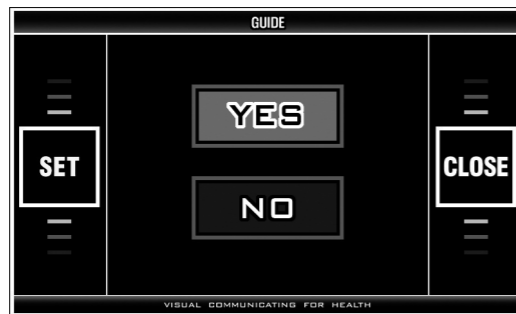

- 기본설정: NO
- 'G' (GUIDE)를 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 가이드 표시 여부를 선택합니다.
'YES'를 선택하시면 측정 시 LCD에 측정 가이드를 표시합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.
- GUIDE를 'YES'로 설정하면 체중 측정 후, 제품 헤드부를 들어 정보를 입력하는 방법에 대한 안내화면이 표시됩니다. 'NO'를 선택하면 체중 측정 후 바로 개인정보 입력화면으로 넘어갑니다.

CHILD/ADULT/AUTO

결과지 출력양식을 설정합니다.

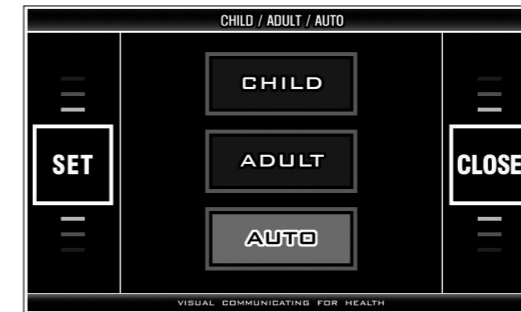

- 기본 설정: AUTO(자동)
- 'C' (CHILD/ADULT/AUTO)를 선택하고 'BACK' 버튼을 누르면 '설정화면'으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶', '▶' 버튼을 이용하여 결과지 양식을 선택합니다.
- 설정이 끝나면 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 화면으로 나갑니다.



알림

- 결과지 출력 양식
 - CHILD(소아/청소년): 나이에 관계없이 소아용 결과지로 출력됩니다.
단, 만 18세 이상은 소아성장곡선이 출력되지 않습니다.
 - ADULT(성인): 나이에 관계없이 성인용 결과지로 출력됩니다.
성인용 결과지를 선택했다라도 만 18세 미만일 경우는 결과지 상에 소아성장 백분위수를 표시하여 학생의 성장 정도를 확인할 수 있습니다.
 - AUTO(자동): 만 18세 미만은 소아용 결과지, 만 18세 이상은 성인용 결과지로 출력됩니다.

HEIGHT METER

신장계 조절과 사용 여부를 선택합니다.



- 기본 설정 : 신장계 조절 값 : +00.0cm, 신장계 사용 : OFF
- 조절범위 : +10.0 ~ -10.0
- 'HEIGHT METER' (HEIGHT METER)를 선택하여 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 숫자버튼 "1"을 누른뒤 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 신장계 조절 값을 설정합니다. (최초메뉴 진입시 신장계 조절값이 선택됩니다.)
- 숫자버튼 "2"를 누른 뒤 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 신장계 사용 여부를 'ON' 또는 'OFF'로 선택합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 설정을 완료하고 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.




알림

1. 신장계는 옵션입니다.
2. 신장계 연결 시 시스템설정에서 신장계 사용을 'YES'로 설정하셔야 신장을 측정할 수 있습니다.
3. 신장계가 연결되어 있지 않은 경우, "신장계가 연결되지 않았습니다. 신장 입력 모드로 전환됩니다." 라는 메시지가 표시되며 신장 입력화면이 표시됩니다. 신장계 연결 케이블을 확인하십시오. 신장계가 연결된 상태에서도 같은 메시지가 표시되면 당사나 지정 거래처로 문의하십시오.

BACKUP/RESTORE

장비 Flash 메모리에 저장된 측정결과 Database를 USB 메모리 저장(Backup) 하거나, USB 메모리에 있는 측정결과 Database를 장비 Flash 메모리에 저장(Restore) 합니다.

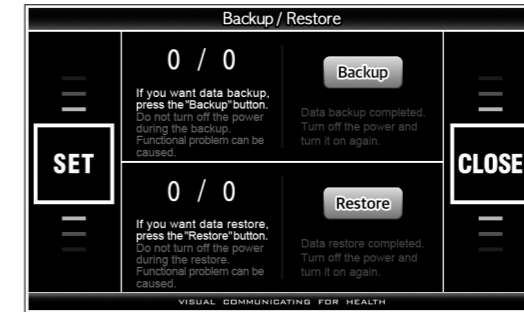

- 'BACKUP/RESTORE' (BACKUP/RESTORE)를 선택해서 메뉴 화면으로 들어갑니다.
- 키패드의 '◀', '▶' 버튼을 이용하여 'Backup' 또는 'Restore'를 선택합니다.
- 'BACK' 버튼을 눌러 Backup/Restore를 완료하고, 'NEXT' 버튼을 눌러 'SYSTEM SETUP' 메인 화면으로 나갑니다.



알림

1. Restore를 하게되면 기존 장비에 저장된 측정 데이터는 USB의 측정 데이터로 덮어 씁니다.
2. Backup 메뉴의 "YY / XX" 표시에서 'XX'는 장비 Flash 메모리에 저장된 데이터 개수이고, YY는 Backup 완료한 데이터 개수입니다.
3. Restore 메뉴의 "YY / XX" 표시에서 'XX'는 USB Flash 메모리에 저장된 데이터 개수이고, YY는 Restore 완료한 데이터 개수입니다.
4. Backup/Restore 시 전원을 끄면 측정 데이터에 손상이 발생할 수 있습니다.
5. USB 메모리가 꽂혀 있지 않은 상태에서 'BACK' 버튼을 누르는 경우 "USB memory stick is not connected." 라는 창이 표시되고 Backup/Restore를 진행하지 않습니다.
6. USB 메모리 사용시 FAT32 파일 시스템을 사용하는 USB 메모리를 사용해야 합니다.

측정 및 분석

측정 시 주의사항

체성분을 분석하여 얻은 결과의 신뢰도는 정확성을 통하여 판정할 수 있습니다. 체성분 분석 값이 피검자의 실제 몸에 얼마나 일치하는가 하는 기기의 정밀성을 '정확도'라 한다면, 신체적 조건과 분석 환경이 모두 같은 상태에서 똑같은 값을 분석해내는 기기의 안전성은 '재현성'이라 합니다. 분석값의 정확도를 유지하기 위해서 피검자는 아래 내용들을 지켜야 합니다.

1. 식후에는 수분량이 증가하므로 가능한 한 공복에 측정합니다.
 - 식사 후 3~4시간이 경과하면 측정합니다.
 - 측정 4시간 이내에는 커피 등 카페인이나 이뇨 작용이 있는 음료를 금합니다.
 - 측정 2시간 전에 미리 2잔 정도의 물을 마십니다.
2. 측정 전에는 안정된 상태를 유지하여 체액의 분포가 일정하도록 합니다.
 - 목욕, 사우나, 땀을 많이 흘리는 운동이나 활동 후에는 3~4시간 지나서 측정합니다.
 - 또는 운동, 땀의 분비량이 많은 활동 전에 측정합니다.
3. 측정 전 24시간 동안은 금주합니다.
4. 측정할 때는 가벼운 옷을 입습니다.
5. 앉은 자세에서 갑자기 선 자세로 자세를 옮겨 측정하면 수분이 하체로 내려오면서 측정에 영향을 끼칩니다. 선 자세에서 5분간 유지한 후 측정하십시오.
6. 측정 부위와 전극을 청결히 하고 둘 사이에 이물질이 닿지 않도록 합니다.
7. 실내 온도의 변화가 측정 결과에 영향을 미칠 수도 있습니다.
 - 20℃ 전후의 상온에서, 신체의 온기가 안정된 후 측정합니다.
8. 하루 중에도 체중과 체성분의 변화가 일어나므로 일정한 시간에 측정합니다.
 - 장시간 서있는 사람의 경우 오전에 측정하면 더 정확한 분석결과를 얻을 수 있습니다.
9. 측정 전 화장실을 다녀와 체내 잔유물을 최대한 제거합니다.
10. 측정할 때는 올바른 측정법과 측정 자세를 유지합니다.

지속적인 체성분 분석을 통하여 체성분의 변화 추이를 알아보고 그 결과들을 비교하여 체성분의 균형과 건강을 유지하고자 할 때는 신체적, 환경적 조건을 일정하게 하여 분석을 실시합니다. 이 때는 분석 결과의 정확도를 유지하기 위한 조건보다는 분석할 때의 조건을 같은 상태로 유지하는 것이 더욱 중요합니다. 이 때 이용되는 것이 기기의 재현성입니다. 식사량 및 식사 후 경과시간, 분석에 영향을 미치는 시간 이내에 일어나는 활동 조건들(운동, 기온, 사우나, 다량의 음료섭취, 배뇨 등)이 일정하게 유지되고, 기기의 재현성이 확보되면 각 분석 결과들은 지속적인 체성분 변화량을 나타내는 것이 되므로 목적하는 체성분 변화의 평가에 이용할 수 있습니다.

! **알림**
 체성분을 분석하는데 의사의 자문이 필요하거나 분석을 하지 말도록 권유 받는 경우는 7P의 '경고'에 나와 있습니다. 다시 읽고 참고하십시오.

올바른 측정자세


발판전극 체중계에 서는 법

- 발판전극이나 손잡이의 전극이 깨끗한지 확인합니다.
- 발판전극을 사용할 경우 양말이나 스타킹을 벗습니다.
- 손, 발 등 전극과 접촉할 부위의 땀이나 이물질을 제거합니다.
- 발판일 경우 위·아래의 발판 전극에 고루 접촉되도록 서고, 이 때 바지나 옷이 전극과 발 사이에 끼이지 않도록 조심합니다.



전극 손잡이 잡는 법

- 손의 땀이나 이물질을 제거합니다.
- 위아래의 전극 모두에 손바닥과 손가락이 닿도록 전극 손잡이를 쥘 후 양팔을 자연스럽게 뻗어 주십시오.

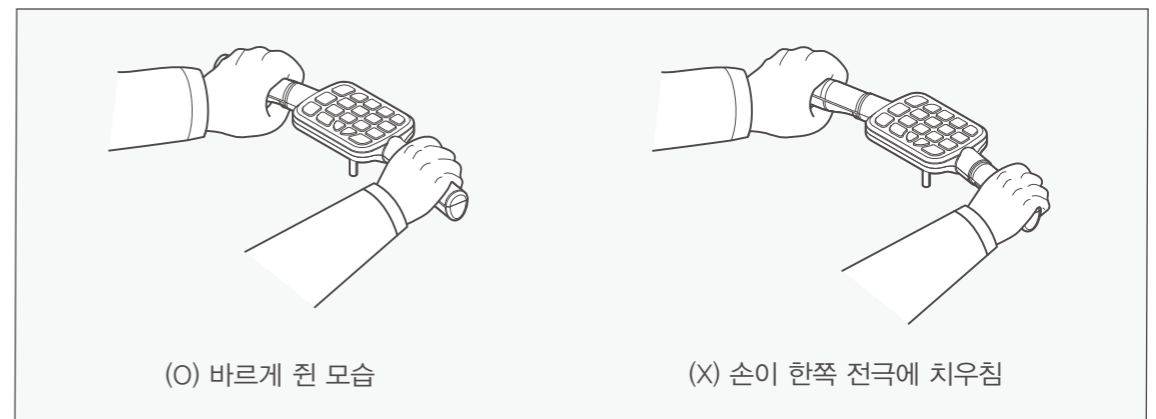



주의

1. 손이나 발이 작은 사람을 측정할 경우 올바른 방법으로 전극과 접촉될 수 있도록 주의를 기울여주십시오. 측정방법이 정확하지 않으면 측정값의 신뢰도가 떨어집니다.
2. 측정을 하는 사람의 몸이 다른 사람과 닿거나 전도성 물질과 접촉되지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 측정이 진행되는 8개 전극 중 하나의 전극이라도 접촉이 안되거나 불량하면 측정이 중지 되거나 데이터의 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.

측정자세

- 발판전극을 잘 밟고 선 다음, 손잡이 전극을 바르게 잡고 팔을 몸통과 30° 각도가 되도록 유지합니다.
- 측정이 끝날 때까지 몸을 움직이거나 말을 하지 마십시오.
- 측정 중 전극과의 접촉이 유지되지 않으면 측정이 중단될 수 있습니다.
- 측정이 완료되기 전까지는 팔을 굽히거나 흔들지 말고 고정된 자세를 유지하십시오.

분석방법


대기화면

대기화면에 연결된 장비(프린터, 혈압계, 신장계)를 표시합니다.

- 부팅 시 연결 디바이스 확인해서 대기화면에 표시합니다.



- 대기화면에서는 [성별] 버튼을 눌러서 연결 디바이스(신장계,혈압계)를 확인합니다. (프린터는 연결 즉시 확인)

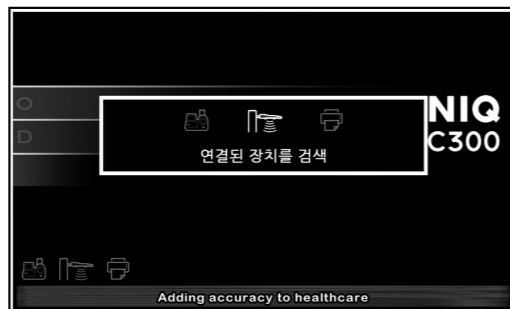

개인자료 입력 및 기본측정

1) 체중측정



- 체중계에 올라서면 차임벨 소리와 함께 화면이 전환되며 체중 측정이 시작됩니다. 이때 체중이 완전히 측정되기 전까지 움직이거나 말하지 마시고, 측정 시 다른 곳을 짚거나 물체를 들고 체중계에 올라서지 않도록 주의하십시오.
- 체중 측정이 완료되면 화면에 측정 결과가 표시됩니다.

2) 체중 측정이 완료되면 그림과 같이 키패드 부분을 들어 측정자의 정보를 입력합니다.



시스템설정의 'GUIDE'를 NO로 선택한 경우에는 그림과 같은 가이드 화면이 표시되지 않고, 바로 개인 정보 입력화면이 표시됩니다.

3) 개인자료

분석에 필요한 자료의 입력 순서는 ID, 신장, 나이, 성별 순서로 진행됩니다. 자료의 입력 상태를 확인한 후 'NEXT' 또는 '▶' 버튼을 누르면 다음 항목으로 넘어갑니다. (시스템 설정의 'ID USAGE'가 'YES'로 설정 되어 있을 경우에만 ID 입력화면이 표시됩니다.)

[ID 사용 – YES]

- ID입력
 - “ID를 입력해 주십시오.” 라는 메시지가 나옵니다. 키패드를 이용해 ID를 입력합니다. 영문, 숫자 그리고 띄어쓰기를 포함한 20자리까지 입력 가능합니다.
 - 입력이 완료되면 ‘▶’ 버튼을 눌러주세요.



[ID 사용 – NO]

- 신장입력
 - “신장을 입력해 주십시오.” 라는 메시지가 나옵니다.
 - 키패드의 숫자판을 이용하여 측정자의 신장을 입력하면 됩니다.
 - 입력이 끝나면 ‘NEXT’ 버튼을 눌러주세요. 측정자의 신장이 입력범위를 벗어나는 경우는 분석이 불가능 합니다.
- 나이입력
 - “나이를 입력해 주십시오.” 라는 메시지가 나옵니다.
 - 키패드의 숫자판을 이용하여 측정자의 연령을 입력하면 됩니다.
 - 입력이 끝나면 ‘NEXT’ 버튼을 눌러주세요.



- 성별입력
 - “성별을 선택해 주십시오.” 라는 메시지가 나옵니다.
 - 기본적으로 여자가 선택됩니다. 키패드의 ‘♂/♀’를 눌러 해당하는 성별을 선택합니다.
 - 입력이 끝나면 ‘NEXT’ 버튼을 눌러주세요.



[신장 측정]

- 옵션으로 신장계를 선택한 경우, 체중 측정 후 신장 측정화면이 표시됩니다.
- 바르게 서서 신장을 측정하십시오.
- 신장 측정 후 개인정보 입력 과정은 동일합니다.




알림

1. 기존에 등록된 ID로 재측정시에는 ID 입력 후 ‘▶’ 버튼을 누르면 저장된 신장, 나이, 성별이 자동으로 입력됩니다. ‘◀’, ‘▶’ 버튼을 눌러 원하는 항목을 수정하실 수 있습니다.
2. 기본 제공되는 데이터 관리 프로그램 사용 시 멤버전송을 할 경우, 시스템설정의 'ID USAGE' 설정과 관계없이 ID 사용 화면이 표시됩니다. 이 때 기기에서 신장, 나이, 성별 등 개인정보는 수정이 불가능합니다. 프로그램 상에서 개인정보 수정 후 다시 멤버를 전송하십시오.


- 신장입력
 - “신장을 입력해 주십시오.” 라는 메시지가 나옵니다.
 - 키패드의 숫자판을 이용하여 측정자의 신장을 입력하면 됩니다.
 - 입력이 끝나면 ‘▶’ 버튼을 눌러주세요. 측정자의 신장이 입력범위를 벗어나는 경우는 분석이 불가능 합니다.



- 나이입력
 - “나이를 입력해 주십시오.” 라는 메시지가 나옵니다.
 - 키패드의 숫자판을 이용하여 측정자의 연령을 입력하면 됩니다.
 - 입력이 끝나면 ‘▶’ 버튼을 눌러주세요.

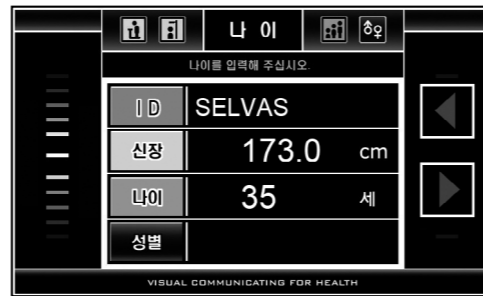

- 성별입력
 - “성별을 선택해 주십시오.” 라는 메시지가 나옵니다.
 - 기본적으로 여자가 선택됩니다. 키패드의 ‘♂/♀’를 눌러 해당하는 성별을 선택합니다.
 - 입력이 끝나면 ‘NEXT’ 버튼을 눌러주세요.

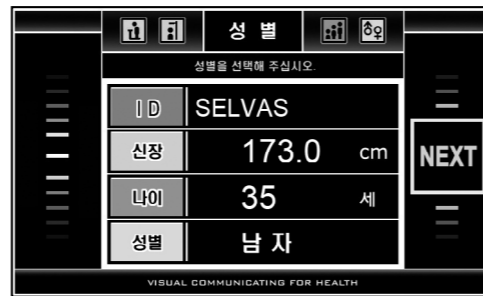

알림

신장 측정 시 기기 주변에 측정자보다 키가 큰 사람이 있으면 정확한 신장을 측정할 수 없습니다. 신장 측정 시, 초음파 신장계의 정확한 측정을 위해 측정자 이외 다른 사람은 기기 주변에 서 있지 않도록 주의하십시오.

측정


1) 분석에 필요한 데이터 입력이 완료되면 다음 그림이 화면에 나타납니다. 발판전극에 발이 바르게 닿도록 서 주십시오.




2) 그림과 같이 전극 손잡이를 감싸 진 후 몸통과 팔의 각도가 30°가 유지되도록 합니다.



3) 집게 손가락으로 시작버튼을 누르십시오.
 • 측정자가 시작버튼을 누르면, “측정을 시작합니다.
 • 움직이거나 말하지 마십시오.” 라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

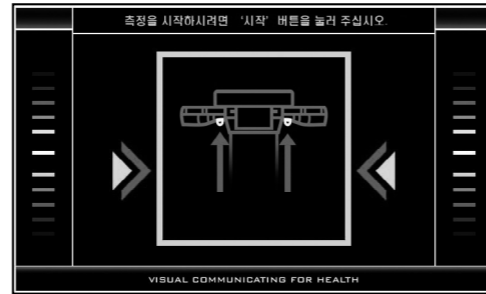

4) 측정이 진행되면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

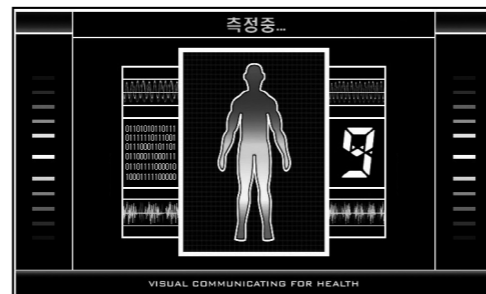

알림

1. 측정이 끝날 때까지 팔을 굽히거나 움직이지 않도록 주의 하십시오. 측정에 필요한 시간은 약 1분 이내입니다.
2. 측정이 잘못 되었을 경우
 - “임피던스가 측정범위를 벗어났습니다.”라는 문구가 화면에 나타납니다.
 - 다시 측정하기 위해서는 전극 손잡이를 감싸 진 후 전극손잡이의 시작버튼을 누르십시오.
 - 3회 연속 측정이 잘못 되었을 경우 “연속적인 오류로 측정을 종료합니다. 초기화를 위해 체중계에서 내려서 주십시오.”라는 문구가 화면에 나타납니다.
 - P. 59~60의 ‘문제해결’을 참조 하십시오.

결과화면

분석이 완료되면 약 2~3초 후 측정결과가 화면에 나타납니다.



- 분석결과는 그래프와 수치로 표시되어 이해하기 쉽습니다.
- 분석결과를 나타내는 그래프와 수치를 확인하신 후 ‘PRINT’ 혹은 ‘NEXT’ 버튼을 누르십시오.

결과 인쇄 및 재시작

- 1) 모든 분석결과가 화면에 나타남과 동시에 프린터에서 전용지로 출력 가능합니다.
- 2) 분석결과를 확인한 후, 재측정을 원하시면 ‘NEXT’ 버튼을 누르십시오.
- 3) 측정결과가 모두 표시된 후 2분이 경과하도록 재시작하지 않으면 자동으로 초기화면으로 돌아갑니다.




알림

1. 본체와 프린터를 연결하면 분석과 동시에 A4 전용지로 결과를 인쇄하여 보실 수 있습니다.
2. 시스템설정에서 인쇄를 자동으로 설정했을 경우 측정결과는 측정 후 1회 자동 출력되고, ‘PRINT’ 버튼을 누르면 더 출력할 수 있습니다.
3. 개인용 PC에 윈도우용 체성분 관리 프로그램이 설치되어 있을 경우 모니터를 통하여 실시간으로 결과를 확인할 수 있으며 A4 전용지로 출력해 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 체성분 관리 프로그램 CD에 들어있는 사용설명서를 참고하십시오.

혈압계를 이용한 분석


본 제품과 혈압계를 연결하여 혈압 측정과 함께 체성분을 분석하는 방법으로 당사의 병원용 혈압계를 옵션으로 선택하셔야 합니다.

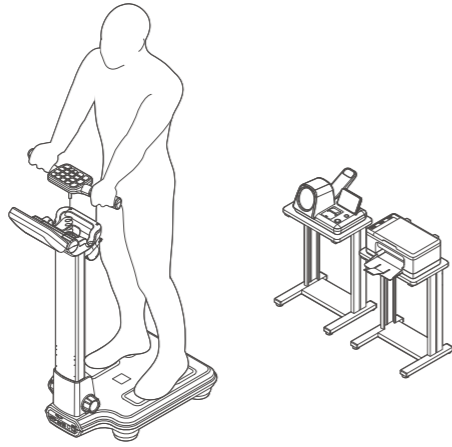

이 방법을 이용하면 혈압과 비만을 연계하여 진단, 평가하고 체성분 변화에 의한 혈압개선 효과를 수치로 제시하여 환자를 과학적으로 관리할 수 있습니다.

혈압계 사용 체성분 분석의 방법은 아래와 같습니다.

- 1) 체지방측정기와 혈압계를 연결합니다.
- 2) 먼저 혈압을 측정합니다.
- 3) 혈압 측정이 끝나면 체성분을분석합니다.
- 4) 체성분 분석이 끝나면 체지방측정기 화면에 측정된 혈압을 사용할지 여부를 확인하는 확인창이 표시됩니다.
- 5) '예'를 선택하면 A4결과지에 혈압 데이터가 표시되고, '아니오'를 선택하면 표시되지 않습니다.

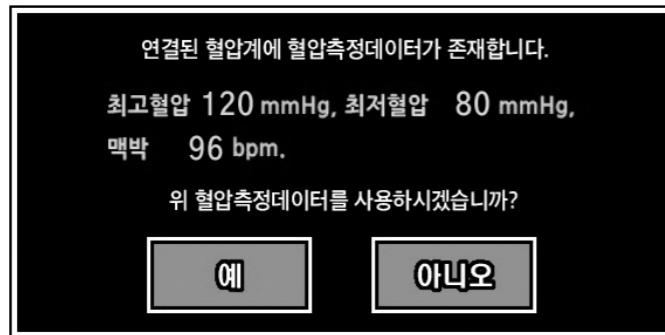


USB 메모리를 이용한 데이터 저장


데이터 저장

FLASH MEMORY 저장을 선택한 경우

- 1) 초기화면에서 본 기기 후면에 있는 'USB(A) 포트'에 USB 메모리를 꽂아주십시오.

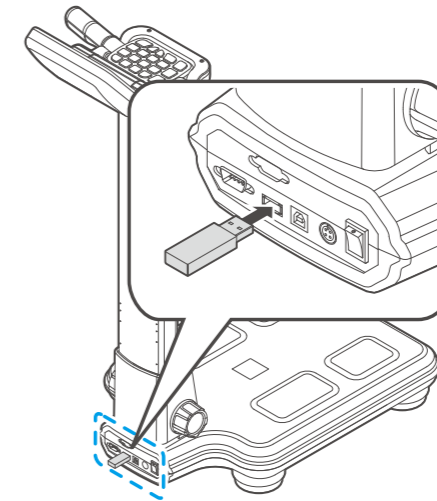

- 2) 초기화면에 그림과 같이 "USB 메모리에 저장된 측정결과를 전송하시겠습니까?"라는 창이 나타납니다. "예(BACK 버튼)"를 눌러 USB 메모리로 데이터를 전송합니다.
- 3) 전송 중 창이 표시됩니다. 전송이 완료되면 "저장이 완료되었습니다" 라는 메시지가 표시되며, '확인(BACK 버튼)'을 눌러 저장을 완료합니다.

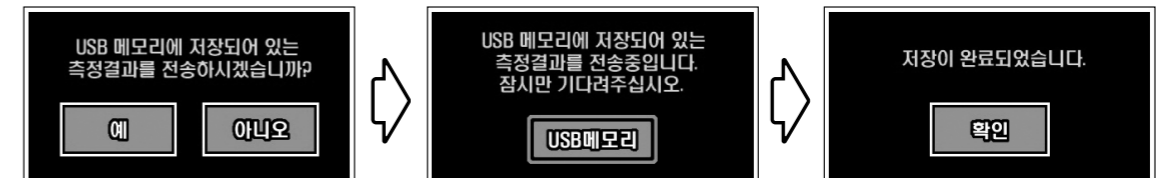

USB MEMORY 저장을 선택한 경우

'USB MEMORY' 선택 시에는 별도의 알림 없이 매 측정데이터를 USB MEMORY에 저장합니다. 측정 시 USB MEMORY를 본체의 초기화면에서 꽂아두어야만 USB MEMORY에 데이터가 저장됩니다. USBMEMORY가 꽂혀있지 않은 상태에서 측정했을 경우 FLASH MEMORY에 저장됩니다.



알림

시스템설정의 "ID USAGE"가 'YES'로 설정되어 있고 해당 저장 방식을 선택하였을 때에만 위와 같은 방법으로 데이터 저장이 가능합니다. USB MEMORY가 꽂혀있지 않은 상태에서 측정했을 경우 FLASH MEMORY에 데이터가 저장됩니다. (FLASH MEMORY에 저장된 데이터는 ID 사용으로 설정 후 측정한 경우가 아니면 데이터 검색이 불가능합니다. ID를 사용하지 않는 경우 초기화면에서 USB를 연결하여 저장된 측정결과 전송 후 PC 매니저에서 확인 가능) "FAT32 format을 지원하는 USB MEMORY 를 사용하면 됩니다."



알림

1. USB 메모리는 초기화면에서만 인식하므로, 반드시 초기화면에서 꽂아 주십시오.
2. FLASH MEMORY에 저장된 데이터가 없을 경우에는 측정결과 전송여부를 묻는 화면에서 '예'를 눌렀을 때 "저장된 측정결과가 없습니다." 라는 메시지가 표시됩니다. 체성분 측정 후 USB 메모리를 꽂아 주십시오.
3. USB MEMORY 저장방식에서 FLASH MEMORY 저장방식으로 변경할 경우, 반드시 USB메모리에 저장된 데이터를 PC로 옮기셔야 합니다.
4. USB 메모리의 데이터를 데이터 관리프로그램에서 수신하는 방법 및 자세한 사용법은 데이터 관리프로그램 사용설명서를 참조해 주십시오.

ID 검색 (FLASH MEMORY 사용 시에만 해당)

초기화면에서 키패드의 'ID' 버튼을 누르면 ID 검색창이 나타납니다.

찾고자 하는 ID 번호를 입력하고 '확인(BACK 버튼)'을 누르면 검색한 ID의 가장 최근에 측정한 데이터의 결과화면이 표시됩니다.

'인쇄' 버튼을 눌러 결과를 출력하거나 '재시작' 버튼을 눌러 초기화면으로 돌아갑니다.

USB MEMORY에 저장한 데이터는 장비에서 검색이 불가능합니다.

데이터 삭제 (FLASH MEMORY 사용 시에만 해당)



초기화면에서 키패드의 '←1111→'을 입력합니다.

삭제를 확인하는 "본체에 저장된 측정결과를 모두 삭제하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다.

삭제를 원하시면 '예(BACK 버튼)'를 눌러 삭제하시고, 원하지 않으시면 '아니오(NEXT 버튼)'를 선택합니다.

'예(BACK 버튼)'를 눌러 삭제하면 '모두 삭제하였습니다.' 라는 메시지가 뜹니다.

'확인(BACK 버튼)'을 눌러 초기화면으로 돌아갑니다. (삭제된 데이터는 복원이 불가능합니다.)

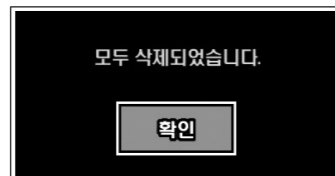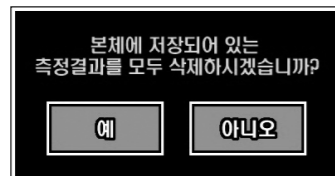

결과 판정 기준 및 해설

본 제품은 임피던스 측정 데이터 뿐만 아니라 체성분 분석을 통해 체형판정, 비만 및 근감소 평가, 영양 및 세포 건강도 평가, 부위별 평가 등 다양한 분석 데이터를 제공합니다. 전용지에 출력되는 결과에 대한 설명 및 판정 기준은 다음과 같습니다.

체성분결과지

개인자료

피검자의 성명 / ID 번호, 측정날짜, 신장, 체중, 연령, 성별이 인쇄 됩니다. 측정값에 대한 신뢰성을 확인하는데 유용한 정보가 됩니다.

로고

병원이나 스포츠 센터, 비만클리닉의 상호, 전화번호, 주소, 담당자 등 본 기기의 사용자의 정보를 고객에게 제공합니다. 로고삽입은 소프트웨어 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.

체성분 분석(Body Composition Analysis)

사람의 몸을 구성하고 있는 성분을 크게 체수분, 단백질, 무기질, 체지방으로 나눌 수 있으며, 이와같은 체성분의 양과 비율은 신체의 건강 상태를 진단할 수 있는 지표로 활용됩니다.

- 1) 체중(Weight): 체성분을 모두 합한 값으로 몸무게를 의미합니다.
- 2) 체지방량(FFM): 체중에서 체지방을 제외한 값을 의미하며, 근육량과 무기질의 합으로도 계산이 가능합니다.
- 3) 근육량(SLM): 근육은 크게 골격근, 심장근, 내장근으로 구성되어 있으며, 체수분과 단백질의 합으로 계산이 가능합니다.
- 4) 체수분량(TBW): 세포막을 기준으로 세포내수분과 세포외수분으로 구성되어 있으며, 둘의 합이 신체의 총 체수분량이 됩니다.
- 5) 단백질량(Protein): 수분과 함께 근육을 구성하는 인체의 주요 성분으로 세포의 영양 상태를 간접적으로 판단할 수 있는 지표로 활용이 가능합니다.
- 6) 무기질량(Minerals): 무기질은 대부분 뼈를 구성하는 성분으로 이루어져 있어 측정치를 통해 뼈의 상태를 간접적으로 평가할 수 있으며, 무기질에 해당되는 영양소는 칼슘, 인, 나트륨 등이 있습니다.
- 7) 체지방량(FM): 피하지방량과 내장지방량을 합한 값으로 신체의 총 체지방량을 의미합니다.

골격근/지방분석 (Skeletal Muscle/Fat Analysis)

- 체중 (Weight)
표준체중은 BMI의 표준값을 기준으로 산출되며, 표준범위는 표준체중의 ±15%입니다.

• **골격근량 (Skeletal Muscle Mass)**

근육은 골격근, 심장근, 내장근으로 구성되어 있으며, 이 중 뼈에 붙어 골격을 형성하고 인간의 의지로 움직이게 할 수 있는 근육을 골격근이라 하며, 총 근육량의 약 60%를 차지합니다.

• **체지방량 (Fat Mass)**

체지방량은 크게 필수지방과 저장지방으로 분류되고 체중에서 체지방량을 제외한 나머지 값으로 나타낼 수 있으며, BMI와 함께 비만을 진단하는 지표로써 활용됩니다.

비만 분석 (Obesity Analysis)

• **체질량지수 (BMI – Body Mass Index)**

체질량지수(BMI)는 체중(kg) / 신장(m²) 으로 계산됩니다. 정확한 비만 진단을 위해서는 신체의 외형적 요소만 고려된 BMI뿐만 아니라 BIA를 통해 도출한 체지방률(FM / Weight)과 함께 분석하는 것이 좋습니다.

	저체중	표준	과체중	비만
한국	18.5미만	18.5≤~<23	23≤~<25	25이상
WHO	18.5미만	18.5≤~<25	25≤~<30	30이상
중국	18.5미만	18.5≤~<24	24≤~<28	28이상

• **체지방률 (PBF – Percentage of Body Fat)**

체지방률은 체중에서 차지하는 체지방량의 비율을 나타낸 값으로 BMI와 함께 비만 진단을 위해 활용되는 항목입니다. 표준범위(%)는 남성은 15~≤20, 여성은 20~≤30입니다.

복부비만 분석

• **복부비만율 (WHR – Waist hip ratio)**

엉덩이 둘레와 허리 둘레의 비율을 의미하며, (허리 둘레 / 엉덩이 둘레)로 계산됩니다. 남성은 0.9이상, 여성은 0.85이상일 때, 복부 비만으로 판정합니다.

• **내장지방레벨 (VFL – Visceral Fat Level)**

피하지방과 내장지방은 6:4의 비율을 이루고 있을 때 적절하다고 평가되며, 내장지방의 비율에 따라 그 정도를 1~20단계로 분류하여 레벨을 표시합니다. 1~4단계는 피하형, 5~8단계는 균형형, 9~10단계는 경계형, 11~15단계는 내장비만형, 16~20단계는 고도내장비만형으로 평가됩니다.

• **내장지방단면적 (VFA – Visceral Fat Area)**

복부 내장에 축적되어 있는 지방의 단면적을 추정 계산하여 cm² 로 표시합니다. 내장지방이 과도하게 축적되면 당뇨병, 고혈압 등 각종 성인병의 원인이 되므로 조절이 필요합니다. 정상 범위는 남성: 50~100cm², 여성: 40~80cm² 입니다.

부위별 체지방량 (Segmental Fat Mass)

지방량에 대해 신체의 부위별 발달 정도를 평가하기 위하여 신체의 다섯 부위(양팔, 양다리, 몸통)의 측정값과 세가지 판정 기준(표준이하, 표준, 표준이상)에 따른 부위별 상태를 평가합니다.

부위별 근육량 (Segmental Lean Mass)

근육량에 대해 신체의 부위별 발달 정도를 평가하기 위하여 신체의 다섯 부위(양팔, 양다리, 몸통)의 측정값과 세가지 판정 기준(표준이하, 표준, 표준이상)에 따른 부위별 상태를 평가합니다.

체성분 변화 (Body Composition Change)

측정자의 전·후 체성분 결과를 한 눈에 확인할 수 있도록 측정일과 함께 체중, 체지방량, 근육량에 대한 결과 데이터를 제공합니다.

종합 평가 (Comprehensive Evaluation)

• **체형판정 (Body Type)**

BMI와 PBF를 통해 구분되는 20가지의 체형 중에서 현재 측정자에게 가장 근접한 체형을 판정합니다.

• **신체연령 (Biological Age)**

신체연령은 성별과 실제연령, 체성분 결과에 따라 고려된 생물학적 연령이며, 신체의 건강 수준을 참고할 수 있도록 나타낸 수치입니다. 신체연령의 범위는 실제연령 ±5세 이며, 20세가 최소값입니다. 따라서 실제연령이 만 20세 미만일 경우 신체연령은 실제연령과 동일하게 표시합니다.

• **기초대사량 (BMR – Basal Metabolic Rate)**

사람이 생명을 유지하는데 필요한 최소한의 에너지량을 의미합니다. 산출 방식은 체지방량과 비례하는 근육조직이 기초대사량에 큰 영향을 미친다는 점을 고려하여 당사의 임피던스 직접 측정 데이터인 체지방량을 변수로 활용한 Katch-McArdle의 공식을 통해 정확한 기초대사량을 산출합니다.

$$BMR(Katch McArdle 공식) = 370 + (21.6 \times FFM)$$

• **1일 필요열량 (TDEE – Total Daily Energy Expenditure)**

1일 필요열량은 하루동안의 기초대사량과 활동대사량과 소화대사량을 합한 값으로 정의되며, 소화대사량은 측정이 불가능할 뿐만 아니라 변동 비중이 적어 고려하지 않았으며, 활동량에 따라 소비되는 열량(활동대사량)에 따라 필요열량의 차이가 크게 발생하는 점을 고려하여 다음과 같이 활동계수를 설정하였습니다.

$$1일\ 필요열량(TDEE) = 기초대사량(BMR) \times 활동계수(PAL: Physical\ Activity\ Level)$$

활동정도	안정상태	가벼운 활동	보통 활동	심한 활동	극심한 활동
활동계수	1.1	1.32	1.54	1.98	2.2

• **세포량 (BCM – Body Cell Mass)**

세포량은 단백질량 및 세포내수분량과 비례한 값을 나타내며, 위상각과 함께 세포의 건강도를 판단하는 지표로 활용됩니다. 세포량이 부족할 경우 발육부진, 영양상태의 악화, 면역력 저하 등을 야기할 수 있습니다.

$$세포량(BCM) = 세포내수분(ICW) + 단백질(Protein)$$

• **종합평점 (Total score)**

체성분이 표준범위 내에 위치해 있다고 하더라도 모두가 동일한 상태라고 가정할 수는 없습니다. 이에 따라 종합평점은 각 체성분의 표준범위보다 더욱 세부적으로 기준을 나누어 점수를 책정하였으며, 이를 통해 신체연령을 산출하여 측정자의 신체 상태를 보다 면밀히 판정합니다.

체중조절 (Control Guide)

측정자의 건강한 신체를 위해 권장하는 체중 및 체성분 상태에 도달하기 위한 목표 조절치를 제공합니다. 조절치가 (-)인 경우 감량, (+)인 경우 증가시켜야 합니다.

• **권장체중**

측정자의 근육과 지방 조절치를 통해 권장하는 체중 값을 표시합니다.

• **체중조절**

지방 조절치와 근육 조절치를 합한 총 목표체중 조절치입니다.

• **근육조절**

측정자의 현재 골격근량을 기준으로 표준 골격근량이 되기 위한 조절 목표치입니다. 근육량이 표준값 보다 많을 경우, 조절치는 +0.0으로 표시됩니다.

• **지방조절**

측정자의 현재 체지방량을 기준으로 표준 체지방량이 되기 위한 조절 목표치입니다.

비만평가 (Obesity Assessment)

• **BMI**

측정자의 체질량지수를 통해 저체중, 표준, 과체중, 비만 중에서 해당되는 항목에 체크 표시됩니다.

• **체지방률**

측정자의 체지방률에 대해 저지방, 표준, 과지방, 비만 중에서 해당되는 항목에 체크 표시됩니다.

• **비만도(Obesity Degree)**

현재체중과 표준체중을 통해 비만의 정도를 판정한 값으로써 아래 공식에 의해 도출됩니다.

$$\text{비만도} = (\text{현재체중} - \text{표준체중}) / \text{표준체중} \times 100 (\%)$$

• **복부둘레 (Abdominal Circumference)**

당사의 복부둘레는 내장지방 수치를 반영하여 추정치를 계산합니다. 실제 측정방법은 숨을 내신 상태에서 갈비뼈 가장 아랫부분과 골반뼈 가장 윗부분의 중간으로 대략, 배꼽 둘레를 기준으로 합니다.

국가별 기준치는 아래 표와 같습니다.

	WHO	한국	일본	중국(대만)	태국	미국
남성	102cm미만	90cm미만	85cm미만	85cm미만	90cm미만	40inch미만
여성	88cm미만	85cm미만	90cm미만	80cm미만	80cm미만	35inch미만

임피던스 (Impedance)

신체의 주파수 및 부위 별 저항을 나타냅니다. 주로 학술적인 연구의 참고자료로써 기기의 작동평가, 피검자의 상태변화 등 저항관련 지표들을 추론하기 위해 활용됩니다. 임피던스의 정상수치는 없으며, 기기에서 측정되는 인체 저항값으로 개인마다 고유한 값을 갖기 때문에 자신의 임피던스 값이 측정할 때마다 일정하게 표시되는지 확인을 통해 측정오류 여부를 판단할 수 있습니다.

혈압분석 (Blood Pressure Analysis)

체지방측정기와 혈압계를 연결하였을 때, 출력되는 결과입니다. 체중 증가로 인해 몸은 더 많은 산소와 양분이 필요하게 되며 이 수요를 채우기 위해 심장은 더 큰 압력으로 수축하므로 혈압이 상승할 수 있습니다. 또한 비만인은 정상인보다 인슐린 분비량이 높는데 인슐린은 물을 보유하려는 성질이 있어 전체 순환 혈액량이 증가하여 혈압이 높아지기 쉽습니다. 체지방측정기와 혈압계를 연동해 사용함으로써 비만과 고혈압을 동시에 관리할 수 있도록 자료를 제공합니다.

QR코드

결과지 또는 화면상에 표시되는 QR코드를 ACCUNIQ APP을 이용하여 스캔하면 검사결과를 서버와 사용자 디바이스에 등록하여 검사 결과 이력을 손쉽게 관리할 수 있습니다. ACCUNIQ app은 Play Store(Android) 또는 Apple Store(IOS)에서 AccunIQ를 검색하여 설치할 수 있습니다.

소아용 결과지(옵션)

개인자료

피검자의 성명 / ID 번호, 측정날짜, 신장, 체중, 연령, 성별이 인쇄 됩니다. 측정값에 대한 신뢰성을 확인하는데 유용한 정보가 됩니다.

로고

병원이나 스포츠 센터, 비만클리닉의 상호, 전화번호, 주소, 담당자 등 본 기기의 사용자의 정보를 고객에게 제공합니다. 로고 삽입은 소프트웨어 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.

체성분 분석(Body Composition Analysis)

사람의 몸을 구성하고 있는 성분을 크게 체수분, 단백질, 무기질, 체지방으로 나눌 수 있으며, 이와같은 체성분의 양과 비율은 신체의 건강 상태를 진단할 수 있는 지표로 활용됩니다.

- 1) 체중(Weight): 체성분을 모두 합한 값으로 몸무게를 의미합니다.
- 2) 체지방량(FFM): 체중에서 체지방을 제외한 값을 의미하며, 근육량과 무기질의 합으로도 계산이 가능합니다.
- 3) 근육량(SLM): 근육은 크게 골격근, 심장근, 내장근으로 구성되어 있으며, 체수분과 단백질의 합으로 계산이 가능합니다.
- 4) 체수분량(TBW): 세포막을 기준으로 세포내수분과 세포외수분으로 구성되어 있으며, 둘의 합이 신체의 총 체수분량이 됩니다.
- 5) 단백질량(Protein): 수분과 함께 근육을 구성하는 인체의 주요 성분으로 세포의 영양 상태를 간접적으로 판단할 수 있는 지표로 활용이 가능합니다.
- 6) 무기질량(Minerals): 무기질은 대부분 뼈를 구성하는 성분으로 이루어져 있어 측정치를 통해 뼈의 상태를 간접적으로 평가할 수 있으며, 무기질에 해당되는 영양소는 칼슘, 인, 나트륨 등이 있습니다.
- 7) 체지방량(FM): 피하지방량과 내장지방량을 합한 값으로 신체의 총 체지방량을 의미합니다.

골격근/지방 분석 (Skeletal Muscle / Fat Analysis)

- **체중 (Weight)**
표준체중은 BMI의 표준값을 기준으로 산출되며, 표준범위는 표준체중의 ±15%입니다.
- **골격근량 (Skeletal Muscle Mass)**
근육은 골격근, 심장근, 내장근으로 구성되어 있으며, 이 중 뼈에 붙어 골격을 형성하고 인간의 의지로 움직이게 할 수 있는 근육을 골격근이라 하며, 총 근육량의 약 60%를 차지합니다.
- **체지방량 (Fat Mass)**
체지방량은 크게 필수지방과 저장지방으로 분류되고 체중에서 체지방량을 제외한 나머지 값으로 나타낼 수 있으며, BMI와 함께 비만을 진단하는 지표로서 활용됩니다.

비만 분석 (Obesity Analysis)

- **체질량지수 (BMI – Body Mass Index)**
체질량지수(BMI)는 체중(kg) / 신장(m²) 으로 계산됩니다. 정확한 비만 진단을 위해서는 신체의 외형적 요소만 고려된 BMI뿐만 아니라 BIA를 통해 도출한 체지방률(FM / Weight)과 함께 분석하는 것이 좋습니다.

- **체지방률 (PBF – Percentage of Body Fat)**
체지방률은 체중에서 차지하는 체지방량의 비율을 나타낸 값으로 BMI와 함께 비만 진단을 위해 활용되는 항목입니다. 소아의 표준범위(%)는 성별과 연령에 따라 상이합니다.
- **복부비만율 (WHR – Waist hip ratio)**
엉덩이 둘레와 허리 둘레의 비율을 의미하며, (허리 둘레 / 엉덩이 둘레)로 계산됩니다. 남자는 0.9이상, 여자는 0.85이상일 때, 복부 비만으로 판정합니다.

키/몸무게 평가

한국소아발육곡선(대한소아과학회 참조)을 통해 어린이 및 청소년의 동일 나이 별 키, 몸무게에 대한 상대적 성장 정도를 평가할 수 있으며, 나이에 따른 신체조건을 비교 및 예측할 수 있습니다. 그래프 상 50%의 수치가 표준신체발육지수입니다.

종합 평가 (Comprehensive Evaluation)

- **체형판정 (Body Type)**
근육량과 체지방량을 통해 9가지의 체형을 도출할 수 있으며, 그 중에서 현재 측정자에게 가장 근접한 체형을 판정합니다.
- **기초대사량 (BMR – Basal Metabolic Rate)**
사람이 생명을 유지하는데 필요한 최소한의 에너지량을 의미합니다. 산출 방식은 체지방량과 비례하는 근육조직이 기초대사량에 큰 영향을 미친다는 점을 고려하여 당사의 임피던스 직접 측정 데이터인 체지방량을 변수로 활용한 Katch-McArdle의 공식을 통해 정확한 기초대사량을 산출합니다.
BMR(Katch McArdle 공식) = 370 + (21.6 x FFM)
- **1일 필요열량 (TDEE – Total Daily Energy Expenditure)**
1일 필요열량은 하루동안의 기초대사량과 활동대사량과 소화대사량을 합한 값으로 정의되며, 소화대사량은 측정이 불가능할 뿐만 아니라 변동 비중이 적어 고려하지 않았으며, 활동량에 따라 소비되는 열량(활동대사량)에 따라 필요열량의 차이가 크게 발생하는 점을 고려하여 다음과 같이 활동계수를 설정 하였습니다.

1일 필요열량(TDEE) = 기초대사량(BMR) X 활동계수(PAL: Physical Activity Level)

활동정도	안정상태	가벼운 활동	보통 활동	심한 활동	극심한 활동
활동계수	1.1	1.32	1.54	1.98	2.2

- **세포량 (BCM – Body Cell Mass)**
세포량은 단백질량 및 세포내수분량과 비례한 값을 나타내며, 위상각과 함께 세포의 건강도를 판단하는 지표로 활용됩니다. 세포량이 부족할 경우 발육부진, 영양상태의 악화, 면역력 저하 등을 야기할 수 있습니다.
세포량(BCM) = 세포내수분(ICW) + 단백질(Protein)
- **비만도 (Fatness)**
현재체중과 표준체중을 통해 비만의 정도를 판정한 값으로써 아래 공식에 의해 도출됩니다.
비만도(Fatness) = (현재체중 – 표준체중) / 표준체중 X 100 (%)

신체균형평가 (Body Balance Assessment)

인체에서 상체 좌우, 하체 좌우가 균형을 이루고 있는지를 평가하는 항목으로 당사의 판정 기준에 따라 균형, 약한 불균형, 심한 불균형 중에서 평가합니다.

체중조절 (Control Guide)

측정자의 현재 연령에 대한 권장하는 체중 및 체성분 상태에 도달하기 위한 목표 조절치를 제공합니다. 조절치가 (-)인 경우 감량, (+)인 경우 증가시켜야 합니다.

- **권장체중**
측정자의 근육과 지방 조절치를 통해 권장하는 체중 값을 표시합니다.
- **체중조절**
지방 조절치와 근육 조절치를 합한 총 목표체중 조절치입니다.
- **근육조절**
측정자의 현재 근육량을 기준으로 표준 근육량이 되기 위한 조절 목표치입니다.
근육량이 표준값 보다 많을 경우, 조절치는 +0.0으로 표시됩니다.
- **지방조절**
측정자의 현재 체지방량을 기준으로 표준 체지방량이 되기 위한 조절 목표치입니다.

부위별 체지방량 (Segmental Fat Mass)

지방량에 대해 신체의 부위별 발달 정도를 평가하기 위하여 신체의 다섯 부위(양팔, 양다리, 몸통)의 측정값과 세가지 판정 기준(표준이하, 표준, 표준이상)에 따른 부위별 상태를 평가합니다.

부위별 근육량 (Segmental Lean Mass)

근육량에 대해 신체의 부위별 발달 정도를 평가하기 위하여 신체의 다섯 부위(양팔, 양다리, 몸통)의 측정값과 세가지 판정 기준(표준이하, 표준, 표준이상)에 따른 부위별 상태를 평가합니다.

임피던스 (Impedance)

측정자의 전체 임피던스(Ω)와 5K, 50K, 250K(Hz)에 대한 부위별 임피던스 측정값을 제공합니다. 이는 주로 학술적 연구의 참고자료로써 활용되거나 기기의 작동평가, 피검자의 상태변화 등을 추론하기 위해 활용됩니다.

영양평가

생체 유지에 필요한 영양소인 단백질, 무기질, 지방질에 대한 측정자의 상태를 평가하고 해당 영양소 섭취를 위한 음식의 정보를 제공합니다.

운동칼로리

한국건강관리협회에서 제시하는 6가지 운동에 대한 칼로리 소모량(30분 운동기준)을 제공합니다.

QR코드

결과지 또는 화면상에 표시되는 QR코드를 ACCUNIQ APP을 이용하여 스캔하면 검사결과를 서버와 사용자 디바이스에 등록하여 검사 결과 이력을 손쉽게 관리할 수 있습니다. ACCUNIQ app은 Play Store(Android) 또는 Apple Store(IOS)에서 AccunIQ를 검색하여 설치할 수 있습니다.

보관 및 유지

전원의 허용 전류치에 유의하십시오.

직사광선, 습기, 먼지, 진한 기름이나 소금기 등이 있는 장소나 극단적인 온도 변화가 있는 곳에는 보관하지 마십시오.

화학약품이나 가스 보관 장소 또는 가스발생 장소에 설치, 보관하지 마십시오.

불안정한 곳, 진 동, 충격 등이 가해지는 장소에서는 사용하지 마십시오.

기기 뒷면의 등전위 단자와 사용실내의 접지선을 연결하여 누설전류나 전위차에 의한 감전을 예방하십시오.

본 기기 위에 물건을 올려 놓지 마시고 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

본체를 함부로 분해 또는 개조하지 마십시오.

장시간 사용하지 않았던 기기를 재사용할 때에는 제품과 부속품의 외관 및 기능의 이상여부를 확인 한 후 사용하십시오.

본 기기에 액체를 흘리거나 내부에 이물질을 넣지 마십시오.

이물질이 들어갔거나 특수한 환경에 노출되었던 기기는 반드시 점검 서비스를 받은 후 사용하십시오. 전원 공급선이나 어댑터 등은 제조자가 제공한 것을 사용하십시오.

이때 전선의 피복, 플러그 접속상태, 그 외 점검 사항의 결함이 없는지 먼저 확인 하십시오.

- RS 232C 케이블
- USB단자
- 어댑터

전원 코드는 먼저 전원을 끈 다음 플러그를 바르게 잡고 빼 주십시오.

텔레비전, 마이크로 전자파 이용 기기, X-ray 나 강한 전기장을 발생하는 기기 근처에서 사용할 때는 다른 장비의 전원을 끄거나 충분한 거리를 두어야만 측정값의 신뢰도가 유지되며 누설전류나 전위차에 의한 감전 등을 막을 수 있습니다.

손질을 할 경우에는 부드러운 천으로 닦아내고 벤젠, 알코올 등 휘발성 액체나 젖은 걸레 등은 사용하지 마십시오. 2~3일에 한번씩 마른 걸레로 작은 먼지 등을 닦습니다.

발판을 닦을 때는 알코올이나 윤활유는 사용하지 마십시오. 알코올이나 윤활유 사용 시 전극 및 도장이 벗겨질 수 있습니다. 물티슈를 사용해 닦아주십시오.

보관환경: 온도 $-25^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$, 상대습도 93% 미만(non condensing)

작동환경: 온도 $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, 상대습도 15~93% 미만(non condensing)

대기압이 70kPa(700mbar)이하이거나 106kPa(1060mbar)이상인 곳에서는 보관 또는 사용하지 마십시오.

‘안전관리’를 참조하십시오.

문제 해결

에러발생과 처치요령

에러	원인	대책
임피던스가 측정범위를 벗어났습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용자의 임피던스가 측정범위를 벗어나는 경우 • 전극과의 접촉이 불량한 경우 • 임피던스가 범위보다 낮거나 높은 경우 • 측정범위: 100~950Ω 	<ul style="list-style-type: none"> • 측정부위(전극, 손, 발)를 청결히 한 후 다시 측정하십시오. • 전극을 쥐는 법과 측정 자세를 올바르게 하여 다시 측정하십시오. ('올바른 측정 자세' 참조) • 순간적으로 전극과의 접촉이 불량해지지 않도록 측정 중 몸을 움직이지 마십시오. • 재측정 시에도 같은 에러가 LCD에 표시 될 경우 당사나 지정거래처로 문의하십시오.
체지방률이 측정범위를 벗어났습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용자의 체지방률 분석결과가 허용범위를 벗어난 경우 • 개인정보 입력 오류 • 체지방률이 범위를 벗어난 경우 	<ul style="list-style-type: none"> • 전극 손잡이를 깨끗하게 닦은 후 다시 측정하십시오. • 다시 측정할 때에도 같은 에러가 화면에 표시 되면 당사나 지정거래처로 문의하십시오.
측정 다음단계로 진행되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 사용자의 신장이나 나이 입력 범위를 벗어난 경우 • 신장입력 오류 • 나이입력 오류 	<ul style="list-style-type: none"> • 신장과 나이를 정확히 입력하십시오. 단, 분석범위를 벗어나는 경우는 입력이 불가능합니다.
체중이 측정되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 사용자의 체중이 측정 범위를 벗어난 경우 • 체중측정 오류 • 측정 중 계속 움직이는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> • 체중을 다시 측정하십시오. 단, 사용자의 체중이 측정 범위를 벗어난 경우는 측정이 불가능합니다.
체지방계와 연결되지 않았습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 내부 통신오류가 발생한 경우 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 껐다 켜주십시오. • 같은 메시지가 반복적으로 표시되면 당사나 지정 거래처로 문의하십시오.

오차 발생과 문제 해결

에러	원인	대책
체지방률이 아주 높게 측정되거나 아주 낮게 측정되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 운동 직후, 목욕 후, 땀을 많이 흘린 후, 다량의 수분 섭취 등 수분의 불균형 상태 • 측정 중 움직이거나 말한 경우 • 전극손잡이, 손, 발 등의 측정 부위가 불결한 경우 	<ul style="list-style-type: none"> • '측정 시 주의사항'을 숙지한 후 측정방법에 따라 올바르게 재측정 하십시오. • 측정 중 움직이거나 말하지 않도록 주의하십시오. • 전극 손잡이의 전극 부분을 부드러운 거즈로 닦아낸 다음 재측정 하십시오. • 손발에 땀이 있거나 불결할 경우 깨끗이 씻은 후 다시 측정하십시오. • 전극과 측정 부위 사이에 이물질이 없는지 확인하십시오.
측정시작 버튼을 눌러도 측정이 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 헤드와 본체 사이의 연결선이 끊어지거나 접촉 불량일 경우 • 측정시작 버튼이 불량일 경우 	<ul style="list-style-type: none"> • 당사나 지정거래처로 문의하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> • 헤드가 본체에 연결되어 있지 않은 경우 • 전극손잡이에 문제가 있을 경우 	<ul style="list-style-type: none"> • 당사나 지정거래처로 문의하십시오.

사용상 문제점

만약 기기에 문제가 발생한 경우, 아래와 같은 방법으로 조치해 주시기 바랍니다.

- 1) 측정 점검 사항에 맞추어 다시 한번 점검해 보시기 바라며, 문제가 지속될 경우 당사나 지정거래처로 연락해 주시기 바랍니다.
- 2) 당사나 지정거래처로 연락하실 때에는 모델명, 제조번호, 구입날짜, 작동 불량에 대한 설명 등을 간단하게 적어 보내주시기 바랍니다.
- 3) 당사는 소비자들의 요구를 충족시켜 드리기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 당사에서 만들어 내고 있는 제품에 대해서는 능숙하고 숙련된 애프터서비스 기술을 갖추고 있으며, 기기에 문제가 발생하면 최상의 서비스로 신속히 해결해드리겠습니다.



알림

당사의 주소와 연락처는 사용설명서 뒷면을 참조하십시오.

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원 (Tel. 080-080-4183)

포장 및 운송

당사에서는 이 기기를 안전하게 운반하기 위해서 가장 적합한 방법으로 포장하였습니다. 이 포장 방법 이외의 방법으로 이동하거나 운반할 경우 기기 자체의 손상을 가져 올 수 있습니다. 기기의 포장 및 운송은 당사가 포장한 상태를 유지하면서 기기가 충격을 받지 않도록 신중하게 다루셔야 합니다.

본 기기를 사용하다가 운송할 필요가 있는 경우 다음과 같은 순서로 재포장 하십시오.

- 1) 본 기기의 전원을 차단합니다.
- 2) 주변 기기가 연결되어 있을 경우 각 기기의 전원을 차단하고 연결을 해제합니다.
- 3) 본 기기를 조립할 때와 반대의 순서로 기기를 해제합니다.
- 4) 보관한 본 기기의 포장재를 이용하여 재포장 합니다.
- 5) 기기가 충격을 받지 않도록 최대한 조심하면서 운반합니다.

기기 사양

항목	설명
모델	ACCUNIQ BC300
측정(전극)방법	8개 접촉 전극을 이용한 4전극법
주파수범위	5, 50, 250 kHz
측정부위	전신, 부위별 측정(양팔, 양다리, 몸통)
결과항목	<p>[체성분결과지] 체성분 분석(체중, 체지방량, 체지방량, 근육량, 단백질, 무기질, 체수분량), 골격근/지방 분석(체중, 골격근량, 체지방량), 비만 분석(체질량지수, 체지방률), 복부비만 분석(복부비만을, 내장지방레벨, 내장지방면적), 부위별(왼팔, 오른팔, 왼다리, 오른다리, 몸통)체지방량/근육량, 체성분 변화(전회, 금회), 종합 평가(체형판정, 신체연령, 기초대사량, 1일필요열량, 세포량), 체중조절(권장체중, 체중조절치, 근육조절치, 지방조절치), 임피던스(부위별&주파수별), 혈압(혈압계 연동 시), QR 코드</p> <p>[소아용결과지 (옵션)] 체성분 분석(체중, 체지방량, 체지방량, 근육량, 단백질, 무기질, 체수분량), 골격근/지방 분석(체중, 골격근량, 체지방량), 비만 분석(체질량지수, 체지방률, 복부비만율), 소아성장곡선(키, 몸무게), 영양평가(단백질, 무기질, 지방), 종합평가(체형판정, 기초대사량, 1일필요열량, 세포량, 비만도), 신체균형평가(상체좌우, 하체좌우), 체중조절 (권장체중, 체중조절치, 근육조절치, 지방조절치), 부위별(왼팔, 오른팔, 왼다리, 오른다리, 몸통)체지방량/근육량, 임피던스(부위별&주파수별), QR 코드</p>
측정전류	약 280µA 이내
소비전력	60VA
전원전압	아답터 입력: AC100~240V, 50/60Hz, 출력: DC 12V , 5A
표시방법	LCD 그래픽 방식
입력장치	키패드
전송장치	USB 단자
인쇄장치	USB 단자(제조사 지정프린터), 써멀프린터(옵션)
크 기	400 x 735 x 890mm(W x D x H, ±10mm)
중 량	약 10kg(본체)
측정시간	약 1분 이내
입력신장	50 ~ 220cm
입력중량	10~200kg
측정연령	1 ~ 99세
사용범위	온도 +10 ~ +40°C, 습도 30% ~ 75%미만
보관범위	온도 -20 ~ +60°C, 습도 95% 미만

※ 본 기기와 옵션의 외관 및 사양은 품질개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서

제 품 명	임피던스 체성분 분석기		
모 델 명	ACCUNIQ BC300		
제조인증 번호	제인 09-224 호		
보증기간/구입일	제조일로부터 1년		
고 객	주소	성명	
		전화	
판 매 점	주소	성명	
		전화	

- 1) 본 제품은 철저한 품질 관리와 엄격한 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2) 만일 보증 기간 이내에 정상적으로 사용하는 도중 발생한 고장이나 제조상의 결함이 생겼을 경우 당사 서비스 센터로 연락 주시면 무상으로 수리해 드립니다.
- 3) 보증 기간 중이라도 본 보증서 내의 유상 서비스 안내에 해당되는 경우에는 서비스 요금을 받고 수리를 해 드립니다.
- 4) 수리를 요청할 때는 꼭 보증서를 제시하십시오.
- 5) 본 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하십시오.
- 6) 제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 경제 기획원 고시 '소비자 피해보상규정'에 따릅니다.
- 7) 제품 수리용 부품 보유 기간은 제품 단종 후 5년 입니다.
- 8) 본 제품은 의료기기입니다.

유상 서비스 안내

- 1) 품질 보증 기간이 경과한 경우
- 2) 품질 보증 기간 중이라도 사용자의 귀책 사유에 의한 것으로 인정되는 고장 또는 손상
- 3) 취급 부주의로 인한 고장
- 4) 천재지변에 의한 고장
- 5) 당사 직원 이외의 사람이 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상 시켰을 경우
- 6) 보증서의 기재란에 내용이 기재되어 있지 않는 경우
- 7) 소모품에 해당되는 부품은 사용자의 사용 횟수에 관계가 있으므로 교환 시 유상 처리됩니다.



(주) 셀바스헬스케어

본사 | 대전광역시 유성구 신성로 155 Tel 042) 879-3000 Fax 042) 864-4462

서울지점 | 서울시 금천구 가산디지털1로 19 대륭테크노타운 18차 20층 Tel 02) 587-4056

고장신고를 하실 때에는 먼저 사용설명서를 확인하신 후 이상 유무가 확인되면 제품의 모델명, 고장상태 및 주소, 성명, 전화번호, 위치를 정확히 알려주시고 접수자의 소속과 성명을 알아두시면 편리합니다.

※ 외관 및 기계의 기능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.

서비스센터

Tel 02) 587-4056